

この機器で測定したデータは、下記スマートフォンアプリに  
送り測定結果をグラフや数値で確認することができます。



## スマートフォン向け専用データ管理アプリ A&D Connect Smart



こちらのアプリを使うと測定したデータの管理ができます。

### 1. 『A&D Connect Smart』アプリをインストールします。

アプリは下記リンクよりインストールできます。

#### ● iOS



<https://itunes.apple.com/jp/app/a-d-connect-smart/id937659279?mt=8&uo=6>

#### ● Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.aandd.andconnectwi>

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

### 2. 『A&D Connect Smart』アプリと機器登録します。

#### ① 『A&D Connect Smart』アプリを起動します。

##### ■ クラウドサーバにデータを保存 したい場合

最初に『新規アカウント作成』から、  
ご自身のアカウント作成後、登録  
したメールアドレスとパスワードを  
入力し『ログイン』を選択ください。

##### ■ クラウドサーバとの連携を 希望されない場合

『ログインせずに使用する』を  
選択してください。

アカウントの情報入力

ログイン

新規アカウント作成



ログインせずに使用する

#### ● 対応機種

・ iPhone iOS 8.1以降

・ Android OS搭載スマートフォンの互換性はQRコードか、  
下記サイトをご参照ください。

[https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict\\_compatibility.html](https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html)



- 2 画面左上の『メニュー』を選択してください。
- 3 続いて『機器設定』を選択し、『機器設定』画面で当製品を選択してください。
- 4 下記画面が表示されましたら、次に血圧計のスタートボタンを長押しします。血圧計には『Pr』と表示されます。
- 5 スマホのアプリ画面の指示に従って『ペアリング』を選択します。以上でペアリングが完了です。血圧計の画面では『End』と表示されます。



※スマートフォンの「設定」からBluetooth®を「オン」にするのを忘れないでください。  
 ※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

### 3. 『A&D Connect Smart』アプリへ測定データ送信方法

#### メインダッシュボード画面



- 1 『A&D Connect Smart』アプリのメインダッシュボード画面を開いた状態で測定を行うと、測定終了後、自動的に測定したデータはアプリに送信されます。