


かんたん操作

額体温計のつかいかた

UT-701 取扱説明書

(保証書付き)

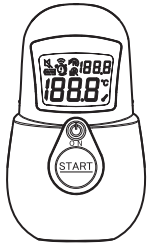

- この度はお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 裏表紙が保証書になっていますので紛失しないように保管してください。

1WMPD4003125



安全上のご注意

安全上のご注意 <必ずお守りください>

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みにし、記載事項をお守りください。

表示の説明	
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害（*1）を負うことが想定されるか、または物的損害（*2）の発生が想定される内容を示します。
	禁止 △は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	強制 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

*1：傷害とは、治療入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
*2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

図記号の説明	
	禁止 △は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	強制 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上のご注意

● 一般的な注意事項

- 注意**
測定結果をもとに、自己判断で治療しない
薬剤の服用および治療については医師の指示に従ってください。
※ 守らないと、病気が悪化することがあります。
- お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
※ 守らないと、ケガ・事故の原因になります。
- センサー部は、汚れたまま使用しないでください。
※ 守らないと、測定誤差の要因となります。
- 着脱可能な部品は、子供やペットが誤飲しないように手の届かないところに保管してください。
※ 守らないと、ケガ・事故の要因となります。
- 可燃性・支燃性ガスを使用する環境では使用しない
※ 守らないと、火災・故障の原因になります。
- 衝撃を加えたり、落下させない
※ 守らないと、故障の原因になります。
- 測定中に携帯電話を使用しない
※ 守らないと、誤動作の原因になります。
- 強い静電気や電磁波に近づけない
※ 守らないと、故障・誤動作の原因になります。


安全上のご注意

● 一般的な注意事項（つづき）

- 注意**
温度変化に敏感なため、長時間手で握ったりポケットに入れるなどした後ですぐに使用しない。
※ 守らないと、測定誤差の原因になります。
- 電池機器・通信機器・PCから3.3m以上離れて使用する
※ 守らないと、誤測定・誤動作の原因になります。
- 分解・修理・改造はしない
※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。
- 強制**
乳幼児の誤飲に注意する
※ 守らないと、傷害・死亡の原因になります。
- 異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、点検・修理を依頼する
※ 守らないと、事故・故障の原因になります。
- 本体および使用済みの乾電池は、お住まいの市区町村の指導に従い処分する
※ 守らないと、火災・事故の原因になります。
- 万一、乾電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し必ず医師の治療を受ける
※ 守らないと、失明など障害の原因になります。
- この取扱説明書をよく読み、理解してから使用する
※ 守らないと、事故・故障の原因になります。


各部のなまえと表示

確認しましょう

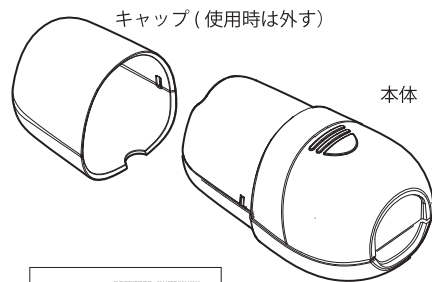

キャップ（使用時は外す）

本体

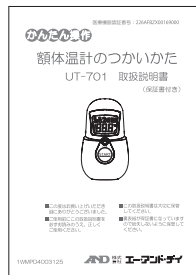

モニター用電池（内蔵）

取扱説明書、添付文書


各部のなまえと表示

液晶表示部




はじめて使うとき

モニター用電池が内蔵されています。はじめて使うときは透明な絶縁シートを引き抜いてください。

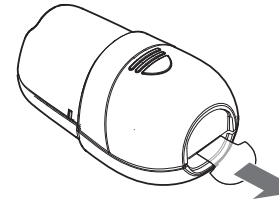

電池交換のしかた


電池残量マーク が点滅したら電池を交換してください。

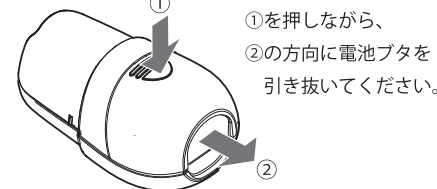

全点灯のまま、あるいは完全に消耗してなにも表示されない場合にも交換してください。

電池交換のしかた

- ① 細い棒で古い電池を取り出してください。
- ② +極を上にして新しい電池（CR2032）を装着してください。
- ③ 電池ボタンを開けてください。

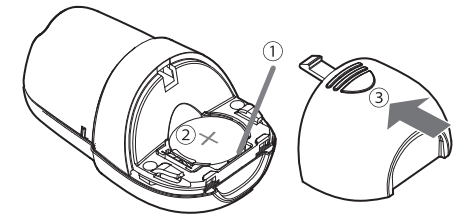


※電池は必ず CR2032 を使用してください。
※電池ボタンは乳幼児が簡単に開けられない構造になっているため、やや開けにくいことがあります。

体温計モードではかる


- ・10℃～40℃の室温でご使用下さい。また本体は使用する場所の温度に十分なじませて下さい。
- ・キャップは外してください。



スタンバイ時は室内温度表示になっています。

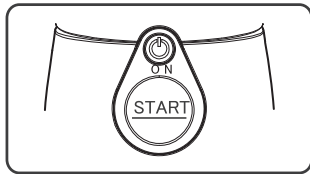


ON ボタンを押すと測定画面になります。


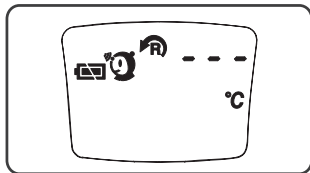


測定画面です。体温計マークを確認します。

-8-

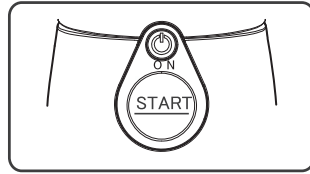

額に向けてSTART ボタンを押します。

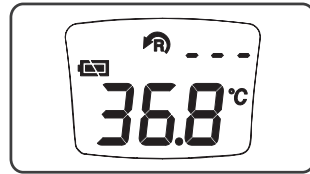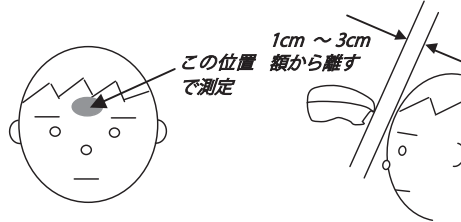

約1秒で測定結果が表示されます。オフ操作不要。1分後オートパワーオフし室内温度表示になります。

- ・繰り返し測定するときは3秒待つて下さい。すぐに測ると、「Er1」が表示されます。
- ・右上表示は前回体温値です。オートパワーオフ後、表示はリセットされますがメモリに記憶されています。

-9-

お手入れのしかた

- ・センサーが汚れていたら消毒用エタノールを染み込ませた綿棒などで清掃してください。清掃後は数分以上たってからご使用ください。
- ・ご使用にならないときはキャップをして-20℃～+50℃(95%RH以下)で保管してください。

故障かと思ったら

エラーメッセージ	問題	対処方法
Er5 Er9	システムが適切に機能していない。	電池を取り出して1分間待ちセッとしなおしてください。メッセージが再び表示された場合、お客様相談センターにご連絡ください。
Er1	本体の安定化前の測定。	点滅した後、点灯するまで待ちます。
Er3	周囲温度が10℃～40℃の範囲内ではありません。	温度計を、10℃～40℃の室温で十分馴染ませてください。
Hi	(1) 体温計モード時：対象の温度がモードの測定限界値(42.2℃)を超えている。 (2) 温度計モード時：対象の温度がモードの測定限界値(80℃)を超えている。	仕様表示範囲内の対象に対し測定してください。
Lo	(1) 体温計モード時：対象の温度がモードの測定限界値(34℃)より低い。 (2) 温度計モード時：対象の温度がモードの測定限界値(-22℃)より低い。	仕様表示範囲内の対象に対し測定してください。センサー部の汚れを確認してください。
1888	電池投入時に体温計モードへ移行しない。	新しい電池に取り換えてください。

-12-

仕様

医療機器認証番号：226AFBZX00169000

検温方式：赤外線式

医療機器分類：管理医療機器、
類別：機械器具 16 体温計

販売名：皮膚赤外線体温計 UT-701

表示範囲：体温計モード(補正温度) +34.0℃～+42.2℃
：温度計モード(表面温度) -22.0℃～+80.0℃
：室内温度 +10.0℃～+40.0℃

測定部位：皮膚(補正温度の場合は、額中央部)

測定精度：
・体温計モード：+36.0℃～+39.0℃の間は、±0.2℃
それ以外は±0.3℃
※標準室温23℃にて標準黒体を測定した場合
・温度計モード：+22.0℃～+42.2℃の間は±0.3℃
-22.0℃～21.9℃、+42.3℃～+80.0℃の間は
±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値
※標準室温23℃にて標準黒体を測定した場合
・室内温度：±0.2℃

機能：体温計モード、温度計モード、室内温度表示、
発熱アラーム、メモリ機能(25メモリ)
ミュートON/OFF切替

使用温湿度：+10℃～+40℃ 15～90%RH


保存温湿度：-20℃～+50℃ 95%RH以下

-13-

- ・体温計モードは舌下平衡体温(舌下で5分以上測った温度)を基準に体温換算しています。
- ・寒い時、汗をかいたとき、化粧をしているときなどは低い温度が表示されることがあります。
- ・37.5℃以上の場合、お知らせ音(ピピピ)がなります。
- ・体温計モードの補正温度は当社独自の方法により舌下体温に換算しています。必ずしも舌下体温に一致するものではないことをご理解のうえ体温の目安としてご使用ください。

メモリをみる

体温計モードのときにON ボタンを押すとメモリ番号が表示され前回(1個前)の測定値が表示されます。

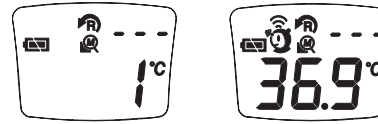


もう一度ON ボタンを押すとその前のメモリ番号を表示後、体温表示します。最大25回メモリされます。

このときSTART ボタンを押すと体温計モードとして測定をおこなえます。

-10-

温度計モードではかる

ON ボタンを押しながらSTART ボタンを押すとモード切替できます。温度計モードマークの表示を確認してから測定してください。

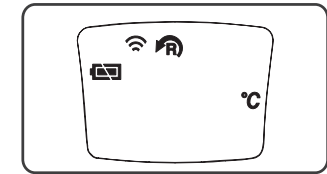

測定対象から、約30mm離してSTART ボタンを押してください。

START ボタンを押すことで連続測定できます。

体温計モードに切替るときは、再びON ボタンを押しながらSTART ボタンを押してください。温度計モードは測定対象の表面温度を測定します。測定対象の表面状態によって低く表示される場合がありますので目安としてご使用ください。

ブザー音の消しかた

体温計モードでON ボタンを3秒以上押すとブザーがミュート(消音)し、ミュートマークを表示します。もう一度同じ操作をすると鳴るようになります。

-11-

保証規定

● 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷
- 2 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷
- 3 不適切な修理・改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷
- 4 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
- 5 保証書のご提示がない場合
- 6 保証書にご購入年月日、保証期間、ご購入店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 7 ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品の、付属品の交換

● 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

● 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only Japan.

※ ご購入店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

保証書

このたびは、額体温計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。この製品が、取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてご購入の販売店または最寄りの弊社・営業所にご持参願います。保証規定に基づき、保証期間内に限り無償で修理・調整いたします。

品名	皮膚赤外線体温計
型名	UT-701
お客様名	様
住所	□□□-□□□□
ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	(必ず販売店にて記入・捺印していただくこと。)
保証期間	ご購入日より1年間
株式会社 エーアンドデイ 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)	
製品のお問い合わせはお客様相談センターへ	
【受付時間】月～金 AM 9:00～12:00 PM 1:00～5:00 (祝日、弊社休業日を除く)	
通話料無料 0120-514-016	
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 (株) エー・アンド・デイ FE 課 修理係	

-15-