



Bluetooth® Smart Ready対応スマートフォン用アプリ  
A&D Connectで記録したい方

## スタートアップガイド

Bluetooth®内蔵 血圧計 UA-651BLE  
SMART

Bluetooth® Smart Ready対応スマートフォン用アプリと本製品を連携させるには、機器同士を登録するペアリングが必要です。このガイドに従いペアリングを行ってください。

本製品は、Bluetooth® Smart Ready対応スマートフォンに接続してアプリに血圧の測定値データを送ることができ、さまざまな健康管理コース(プログラム)に参加することができます。



### ペアリング

Bluetooth® Smart Ready対応スマートフォンのペアリング方法は、ご利用のアプリによって異なります。アプリから血圧計をペアリングモードに入れるように指示がありましたら、下記の操作を行ってください。

本製品の開始/終了スイッチを長押しして、「Pr」と表示されている間がペアリングモードです。ペアリングは、初回のみ必要です。(例外もありますのでアプリの仕様をご確認ください。)

**アプリ立ち上げ** (アプリは事前にインストールしておいてください。)

測定開始前にアプリを立ち上げてください。

立ち上げるアプリは、ひとつとする方が通信(データ通信)が安定します。

その他の操作方法につきましては、ご利用アプリの情報をご参照ください。



データ管理アプリ  
A&D Connect  
iOS版、Android版

A&D Connectは App Store、Google play から  
無償でダウンロードができます。

A&D MedicalのWellness Connectedシリーズ製品の情報は、下記をご参照ください。  
<http://www.wellnessconnected.jp/>

### お問い合わせ

それぞれの機器やアプリについてご不明な点がございましたら、該当する機器やアプリの取扱説明書をご参照ください。

● 弊社機器・サービスのお問い合わせは

エー・アンド・デイ「ウェルネスコネクテッド」<http://www.wellnessconnected.jp/>のサイトを参照し、「 お問い合わせ」からお問い合わせください。



土・日・祝日・年末年始、および弊社休曜日にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

Bluetooth®とそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
その他記載された会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 エー・アンド・デイ

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)

<http://www.aandd.co.jp>