


体重計

取扱説明書（保証書付）

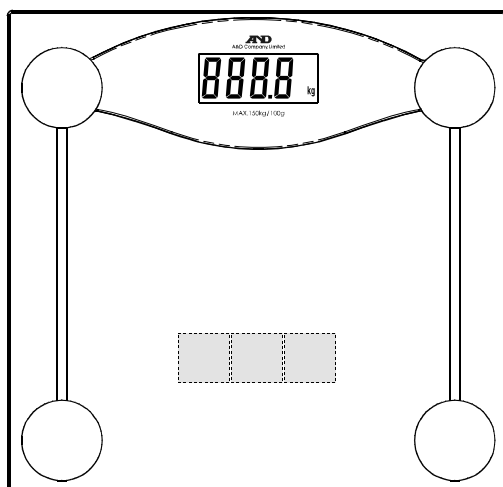

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、前項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

1WMPD4001682C

保証書

このたびは、体重計をお買い上げいただきまして有り難うございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてお買い上げの販売店または最寄りの弊社・営業所にご持参くだされば、保証規定に基づき保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 体重計

型名 UC-331

お客様

お名前

ご住所 □□□-□□□□

ご購入日 年 月 日

ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）

保証期間 ご購入日より1年間

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14（ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F）

1. はじめに

このたびは、UC-331（体重計）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味



この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△注意

修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷および機能を失う恐れがあります。

機器の異常

機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお、修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 計量法上の注意

本製品は主として家庭における体重の測定に使用して頂く「体重計」です。品物の売買取引や、体重や物の重さを公に証明する場合は、本製品を使用しないでください。




4. 取り扱い上の注意

△注意

- ・体重計のガラスは、濡れると滑りやすく大変危険です。濡れた足で乗らないでください。
- ・体重計の端に乗ると転倒する恐れがあります。必ず中央にお乗りください。
- ・強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・体重計のガラスは、強化ガラス製で安全に配慮した設計になっておりますが、落下等により破損する恐れがありますので取り扱いに注意してください。

- ・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ・防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
- ・はかることができる最大ひょう量より重い物を体重計に載せないでください。
- ・輸送する場合は、本製品が入っていた箱を使用してください。

5. 各部の名称

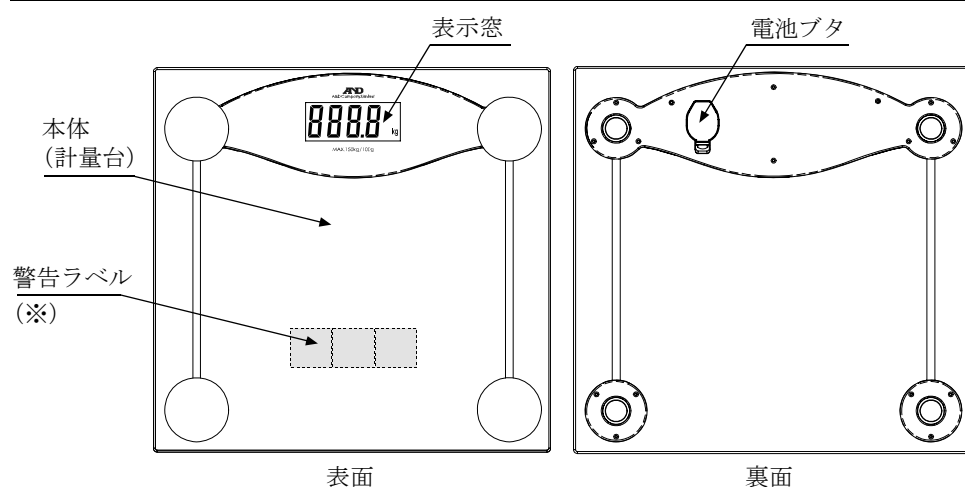

※測定時の注意事項が表示してあります。


6. 電池の交換方法

ご購入時には、体重計本体に電池が取り付けられていますが、不用意に電源が入らないように電極との間に絶縁テープが入っています。ご使用前に絶縁テープを取り除いてください。なお、この電池はモニタ用なので電池寿命が短い場合があります。

交換の際には、下記の手順に従って電池を入れてください。

本製品は、コイン形リチウム電池（CR2032）を1個使用しています。

- (1) 本体裏の電池プタを取り外してください。
- (2) 古い電池を取り出してください。
- (3) +側を上にして、新しい電池を入れてください。
- (4) 電池プタを元のようにはめ込んでください。

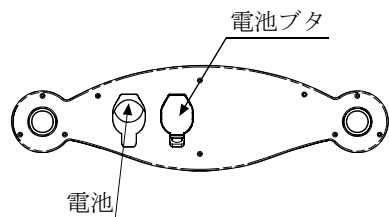

※ 電池の+-を逆に接続しますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となります。

⚠注意

電池使用上のお願い

1. 電池は必ず指定のものをご使用ください。
2. 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
3. 環境保全のため、使用済みの電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。
4. 長期間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外して保存してください。
5. 電池は幼児の手の届かない所においてください。万が一飲み込んでしまった場合は直ちに医師に相談してください。

7. ご使用方法

⚠注意

本製品は、電源スイッチの代わりに、振動センサ（振動させると電源がオンになります）を使用しています。
電源を入れるには、計量台（ガラス部）を上からたたいて、振動させてください。


-3-

はかる前に

- ・ 正確に体重を測定するために、体重計を設置する場所は、なるべく平らで堅い床面を選んでください。柔らかい所（※）は避けてください。
※量やカーペット、毛足の長い絨毯等の上では正しく計量できない場合があります。
- ・ 繰り返し体重を測定した場合、100gの範囲で違いのあることがあります。この最小目の違いは、デジタル化する上で避けられないものであり、故障ではありません。例えば、体重が42.2~42.3kgの間の方は、42.2kg、42.3kgのどちらにもなることがあります。また、体重計への乗り方も結果を左右することがあります。
- ・ 直射日光の当たる場所や高熱を発生する器具の近くでは使用しないでください。
- ・ 直接水がかかる所では使用しないでください。

体重のはかり方

- (1) 計量台（ガラス部）を上からたたいて振動を加えると電源が入り、「8」表示が表示窓左側から右側へと順に4回シフトし、その後「0.0」と表示されます。
※ 電源が入り難い場合は、ガラスを強めに弾くようにたたいてください。
- (2) 必ず「0.0」が表示されてから体重計に乗ってください。体重測定値が表示窓に表示されます。
※ 「0.0」が表示される前に乗ると、「— — —」を表示した後電源オフになります。
体重計から降り、最初からやり直してください。
- (3) 数値が点滅し、点滅が点灯に変われば測定終了です。測定結果の表示はロックされ、体重計から降りても表示値を保ちます。

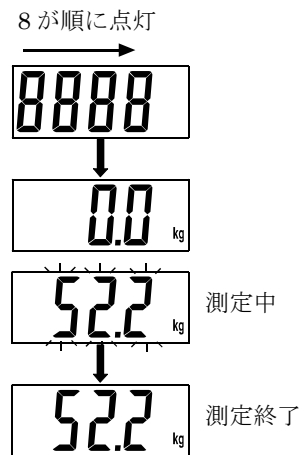

- ※ 体重計から降りるかどうかにかかわらず、測定結果表示後約6秒で自動的に電源が切れます（電源オフのスイッチはありません）。
- ※ 電源を入れた後、何もしない場合は約10秒後に電源が切れます。
- ※ 計量台の上でふらつくなど測定値が不安定な状態が約30秒続くと電源が切れます。
- ※ 体重計に乗ったまま電源を入れても、「— — —」表示後電源が切れ測定はできません。

エラー表示の意味

表示窓に数字以外が表示された場合は次の意味があります。

- 「OL」 : はかれる範囲を越えています。
- 「LO」 : 電池残量がありません。（測定できませんので、電池を交換してください）。
※ 「LO」が表示された場合は約2秒後に電源が切れます。
- 「— — —」 : 「0.0」表示になる前に体重計に乗ったため測定できません。
※ 「— — —」が表示された場合は約2秒後に電源が切れます。

-4-

8. お手入れ

- ・ 汚れた場合は、水をきつく絞った布等で表面を拭き取ってください。
 - ・ 汚れがひどい場合は、スポンジか布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを拭き取ってください。この時、直接水や薬品、油等を本製品にかけないでください。
- ※計量台（ガラス部）以外の部分には、プラスチックなどが使用されているため、薬品等の影響による製品劣化や故障の恐れがあります。

9. 保存

保存時は下記の事項に注意してください。

- ・ 水平な所に置いてください。
- ・ 長期間本製品を使用しない場合は、電池を本体から外してください。

10. 修理、サービスを依頼する前に

こんなとき	ここを確認
計量台をたたいても何も表示されない。	・ 電池はしっかり入っていますか？ ・ 電池は消耗していませんか？ ・ たたき方が弱すぎませんか？
実際の体重値と表示がズレている。	・ 柔らかい物の上で測定していませんか？ （畳やカーペット、絨毯等） ・ 体重計の下に何か入り込んでいませんか？

11. 仕様

形式	: UC-331
ひょう量	: 150kg
測定範囲	: 5kg~150kg
目量	: 100g
精度	: 5kg~80kg ±400g 80kg~150kg ±800g
計量安定時間	: 約2秒
電源	: コイン形リチウム電池（CR2032）×1個
電池寿命	: 約2000回測定可能
使用温度範囲	: 10℃~40℃（結露しないこと）
保存温度範囲	: 0℃~50℃（結露しないこと）
寸法	: 約310(W)×300(H)mm
質量	: 約1.5kg（電池含む）
付属品	: モニタ用電池（装着済み）、取扱説明書

-5-

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取り扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、および使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。

保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

本保証は日本国内においてのみ有効です。

※ お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様ご負担でお願い申し上げます。

製品に関するお問い合わせはお客様相談センターへ

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00, 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

0120-514-016

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 株式会社イー・アンド・デイ FE課

2012/07/10 日現在

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

-6-