




# 取扱説明書

## エーアンド・デイ 家庭用デジタル体重計 UC-321PBT

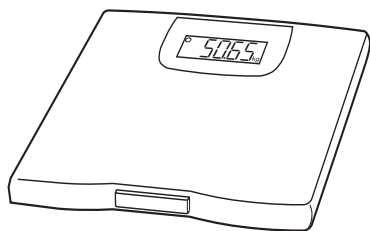

### もくじ

#### ご使用前に

安全にお使いいただくために	1
使用上の注意	1
無線機能についての注意	2
なまえ と はたらき	3
電池の入れ方（取り換え方）	4
精度について	4
畳やじゅうたんの上で測定する場合	5

#### ご使用方法

体重測定	6
赤ちゃんやペットの体重測定	7

#### お問い合わせ等

仕様	8
修理、サービスを依頼される前に	9
お手入れの方法	9
廃棄処分するときは	9
保証規定	10
保証書	裏表紙

このたびは、お買いあげいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

うら表紙が保証書になっていますので、紛失しないようご注意ください。

# 安全にお使いいただくために - 必ずお守りください -

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。お買い上げいただいた体重計を安全に正しくお使いいただくためによくお読みください。

**⚠️ 注意** この表示の欄は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定されている内容です。



この図記号はしてはいけないこと（禁止）を示します。



この図記号は必ず守っていただきたいこと（強制）を示します。

使用前に

## ⚠️ 注意

❗ すべりやすい場所で使用したり、濡れた足で乗ったり、端に乗ると、すべて転倒し、けがをする場合があります。



❗ 液晶表示部分を踏んだり、体重計に飛び乗ったりしないでください。けがや故障の原因となります。



⊘ 分解や修理・改造をしないでください。ホッチキス、クリップなどの金属や、水などの液体を体重計の中に入れてください。ショートや発火の恐れがあります。



⊘ 風呂場など、水分や水蒸気の多いところでは使用しないでください。故障の原因となります。



## 使用上の注意

□ この体重計は、家庭での使用を主な目的としていますので、業務用としては使用できません。

□ 体重計は、何もしない状態が続きますと自動的に電源が切れる「オートパワーオフ」を採用していますので、電源を切るスイッチはありません。

・オートパワーオフ時間について

0. 00 kg 表示時	約 45 秒
--------------	--------

体重値確定後	約 15 秒
--------	--------

□ 正確に体重を測定するために、体重計を設置する場所は、平らで堅い床面を選んでください。柔らかい所は避けてください。



- スイッチを押したままにしないでください。表示が消えていても電池が消耗します。

---

## 無線機能についての注意

---

### 警告

-  航空機や病院など、使用を禁止された区域では、使用しないでください。  
電子機器や医用電気機器に影響をおよぼす場合があります。
-  自宅療養など、医療機関以外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を使用する場合には、電波の影響について個別に医用電子機器メーカーなどにご確認ください。

ご使用前に

無線機能のご使用にあたり、次の注意事項をお読みください。

- この体重計には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。そのため、本設備の無線機能を使用するときに無線局の免許は必要ありません。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 本設備は工事設計認証を取得していますので、本設備を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 2.4GHz付近の電波を通信している無線装置などの近くで本設備を使用した通信をすると、双方の処理速度が落ちる場合があります。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。（環境により電波が届かない場合があります。）

# なまえ と はたらき


ご使用前に

## 表示部

[OK]マーク




## 表側

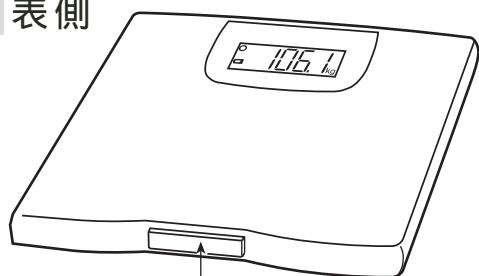



[測定]スイッチ
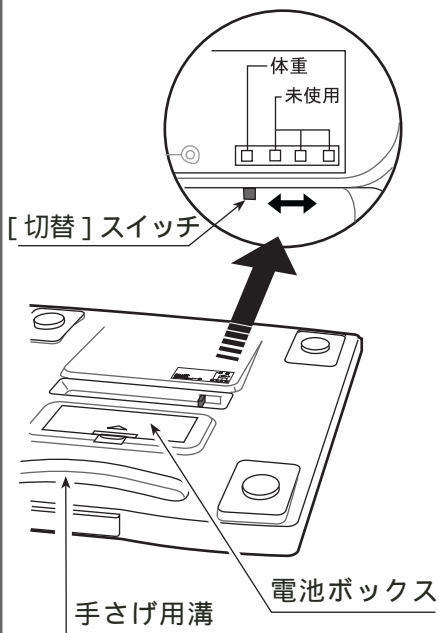
## 裏側



## 表示記号



	[OK]マーク。測定値が安定すると、このマークが表示されます。
	電池交換マーク。このマークが表示されましたら、新しい電池と交換してください。

## [切替]スイッチ

体重	「体重測定」参照。 体重を測定します。
未使用	選択しないでください。選択すると、体重データは送信されません。

# 電池の入れ方（取り換え方）



## ⚠注意

- 電池の+ - を間違えないように入れてください。間違えると動作しません。
-  マークが表示された場合、新しい電池に交換してください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池が完全に消耗すると、[測定]スイッチを押しても  マークは表示されません。
- 電池の寿命は、電池の種類や周囲の温度により異なります。
- 長時間使用しない場合、電池を取り出してください。電池を入れたまま放置すると、電池の液漏れが起こり故障の原因になります。
- 付属の電池はモニタ用です。モニタ用電池の寿命は短い場合があります。

使用前に

## 手順

- 1 体重計裏側の電池ボックスのフタを開けます。
- 2 電池の+ - を間違えないように、新しい単3電池4個を入れてください。
- 3 電池ボックスのフタを閉じます。

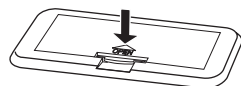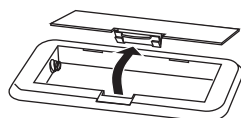

## 精度について

- 保証精度の範囲  
体重計は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。なお、製品の保証範囲は下表の通りです。

計量範囲	保証精度
100kgまで	±0.1kg
100kgを超えて150kgまで	±0.2kg

通産省令  
適合マーク




## 畳やじゅうたんの上で測定する場合

### ⚠注意


- 補助脚を付けた場合、転倒に注意してください。
- 正確な測定には、体重計を設置する場所は、平らで堅い床面を選んでください。

付属の補助脚を本体裏側の脚に差し込んでください。  
脚の2個の穴と、補助脚の突起を合わせて、差し込んでください。

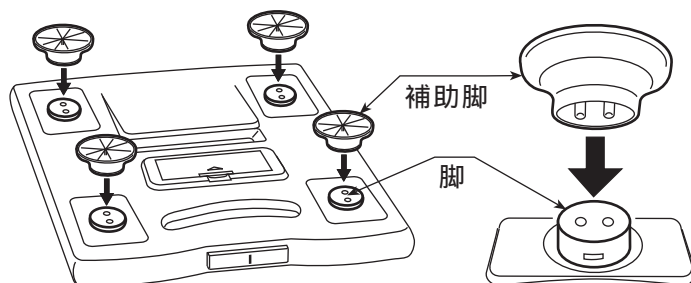


# 体重測定

- 1 [切替]スイッチを「体重」に合わせます。 [切替]スイッチ  
体重  
↓  
[測定]スイッチ
- 2 [測定]スイッチを押します。  
全表示されます。
- 3 体重計に乗ります。  
0.00kgと[OK]マークが表示されたら、  
静かに体重計に乗ります。[OK]マークが消え、  
測定を開始します。測定中は、できるだけ体を  
かさないでください。  
0.00kgのまま約45秒経過すると自動的に  
電源が切れます。
- 4 [OK]マーク表示後、体重が表示され  
ます。  
体重を表示してから約15秒で自動的に電源が切  
れます。
- 5 体重計から降ります。

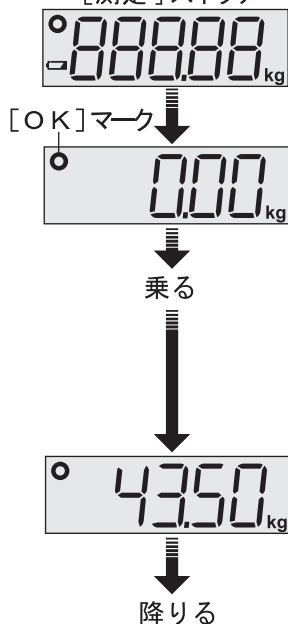

ご  
使  
用  
方  
法

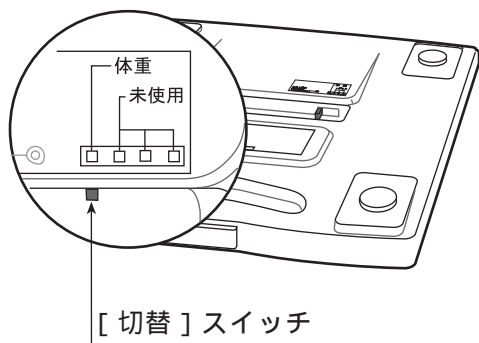

# 赤ちゃんやペットの体重測定

1 [切替]スイッチを「体重」に合  
合わせます。

[切替] スイッチ  
体重

2 [測定]スイッチを押し、  
体重計に乗ります。

[測定] スイッチ  
乗る

数秒間全表示となります。0.00kgと  
表示される前に体重計に乗ります。

(赤ちゃんやペットは抱かずに)

0.0000 kg

3 赤ちゃんやペットを抱きます。  
0.00kgと[OK]マークが点灯し  
てから45秒以内に、赤ちゃんやペット  
を抱いて体重計に乗ります。

[OK] マーク

自分  
の体重

0.00 kg

[OK]マークが表示されるまでできる  
だけ体を動かさないください。

赤ちゃんやペット  
を抱く

4 [OK]マーク表示後、赤ちゃん  
やペットの体重が表示されま  
す。

赤ちゃんや  
ペットの  
体重

16.50 kg

体重を表示してから約15秒で自動的に  
電源が切れます。

降りる


5 体重計から降ります。



# 仕 様

測定方法	電気抵抗線式
表示	デジタル液晶表示 文字高 2.5 mm
最大計量	150 kg
最小表示	0 ~ 100 kg まで 0.05 kg 100 ~ 150 kg まで 0.1 kg
ワイヤレス通信	ARIB STD-T66 (小電力データ通信システム規格、2.4 GHz)
電源	単3電池 (R6P) × 4個
電池寿命	約1000回
付属品	補助脚、モニタ用電池、取扱説明書

本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

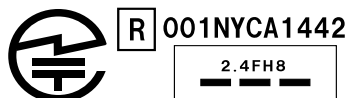

本製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

## ワイヤレス通信について

体重データは体重測定後、自動的に受信装置に送信されます。受信装置が動作していない、もしくは体重計の送信範囲外にある場合、体重データは体重計のメモリに記憶されます。(最大40データ分。41回目からは、一番古いデータから順に消され、新しいデータが記憶されていきます。)

お問い合わせ等

## 修理、サービスを依頼される前に

こんなとき	ここを確認
[測定] スイッチを押しても何も表示されない。	電池を入れ直してください。または、新しい単3電池4個に交換してください。
888888 表示のままである。 H または L が表示されたままである。 E-0 が表示された。	体重計に何かふれていませんか？ 体重計の下に何か物が入り込んでいませんか？ 電池を抜き2、3分待ってから電池を入れ直してください。
体重が極端にズれている。	じゅうたん、畳などの柔らかいものの上で使用していませんか？ 付属の補助脚を付けて使用してください。 体重計の下に何か物が入り込んでいませんか？

## お手入れの方法

お問い合わせ等

- 柔らかい布を使って乾拭きしてください。
- 水、洗剤、有機溶剤（シンナー、アルコール、ベンゼンなど）は使用しないでください。

## 廃棄処分するときは

- 体重計を廃棄する際には、各自治体の分別方法に従って廃棄してください。

# 保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷。
- 2 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 3 不適切な修理改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷。
- 4 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
- 5 保証書のご提示がない場合。
- 6 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 7 ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。

保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

メディカル機器に関するご質問・ご相談・修理品 窓口

ME 機器相談センター 0120-707-188

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00, 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

修理品の発送先 〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-19  
株式会社エー・アンド・デイ ME事業本部FE課  
TEL. 0572-21-6644

お問い合わせ等

# 保証書

(修理受付票)

このたびは、家庭用デジタル体重計をお買い上げ頂き有難うございました。この製品が、取扱説明書に基づき通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてご購入の販売店または弊社修理品発送先へご送付お願い致します。保証規定に基づき、保証期間内に限り無償修理・調整いたします。

保証期間：ご購入より12ヶ月

製品修理受付票	
販売名	エー・アンド・デイ 家庭用デジタル体重計 UC-321PBT
型名	UC-321PBT
製造番号 (S/N)	
取扱店名	
住所	〒
ご購入日	年 月 日

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

TEL. 03-5391-6126 FAX. 03-5391-6129

製造販売業者 株式会社エー・アンド・デイ

〒364-8585 埼玉県 北本市 朝日1-243

製造業者 爱安德电子(深圳)有限公司