


生体情報の集中管理で  
より安全で充実のケア  
患者管理を実現

無線双方向通信・セントラルモニタ

# バイタルステーション

TM-2140 / TM-2140W  
数値表示4ベッド 波形表示2ベッド

医療機器承認番号 21500BZZ00682000

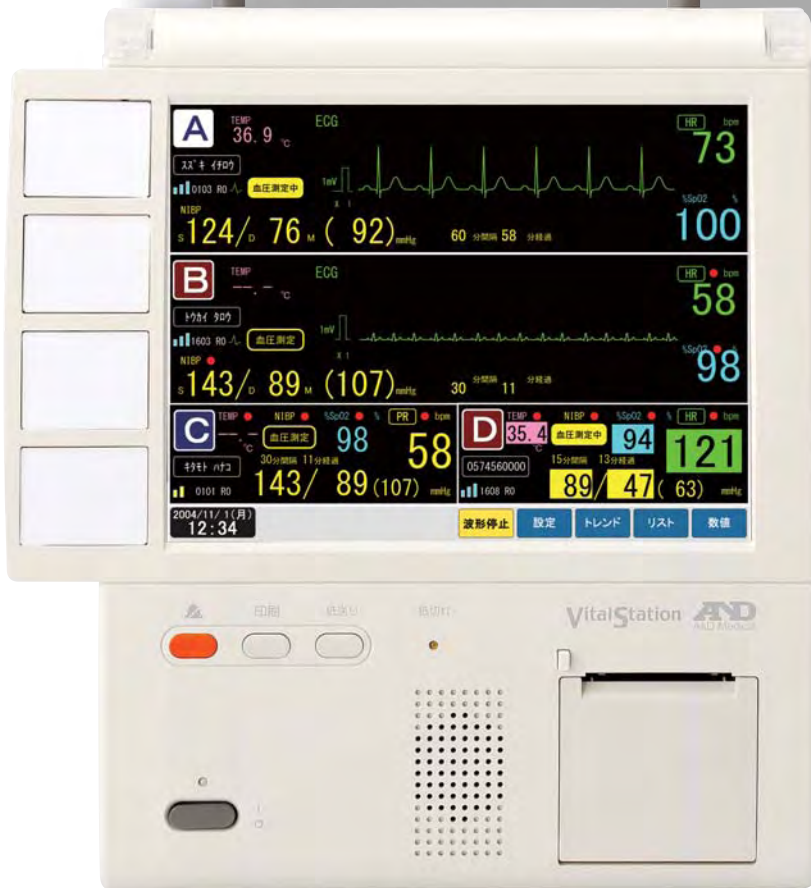

無線双方向通信で  
4ベッドまで  
監視、遠隔操作

- タッチパネル操作
- 12.1型TFTカラー表示
- レコーダー内蔵

## ベッドサイドモニタ 選べる充実の3シリーズ

色々な組合せができ、ロスなく安価にシステムが構築できます!



バイタルセンサG

バイタルボックス

血圧監視装置

**A&D**  
A&D Medical

無線双方向通信・セントラルモニタ

# バイタルステーション

TM-2140 / TM-2140W

数値表示4ベッド

波形表示2ベッド

医療機器承認番号 21500BZZ00682000

## ■ 使いやすいタッチパネル操作

表示を見ながら画面に触れて操作、測定などが実行できる簡単操作。

## ■ 見やすい12.1型TFTカラー液晶

測定項目別に色分け表示。アラーム情報も表示反転で識別が確実。

## ■ 無線双方向通信で業務を軽減

離れている場所から、血圧などの測定開始やアラームなどの設定を遠隔操作でき労力を軽減。  
制御項目：血圧測定・測定間隔設定・監視値設定・加圧値設定

## ■ わかりやすいアラーム機能

設定を超えた場合のアラーム情報は、本体上部のランプ点灯や警報音、画面反転でお知らせ。

数値表示専用 TM-2140 標準価格¥1,080,000 (税込価格¥1,134,000)

波形表示対応 TM-2140W 標準価格¥1,280,000 (税込価格¥1,344,000)



表示項目

数値表示：最高・最低血圧、脈拍数(心拍数)、SpO<sub>2</sub>、体温  
波形表示：心電図

## システム構成

測定数値表示専用のTM-2140と、心電波形表示も対応のTM-2140Wの2機種があり、ベッドサイドモニタは、3シリーズの豊富な機種の中から用途や必要な機能、価格から選択、色々な組合せができ最適なセントラルモニタが構築できます。



## 接続できるベッドサイドモニタ

3シリーズの豊富な機種から選択、色々な組合せができます。



### バイタルセンサG


### バイタルボックス

### 血圧監視装置

バイタルステーション画面表示	波形・数値	波形・数値	数値
測定項目	血圧、SpO <sub>2</sub> 、ECG、*体温	血圧、SpO <sub>2</sub>	血圧
測定器本体表示	TFTカラー液晶	蛍光(LED)、カラー液晶(LCD)	蛍光(LED)、液晶(LCD)

\*オプション：ワイヤレス体温計


## 画面表示

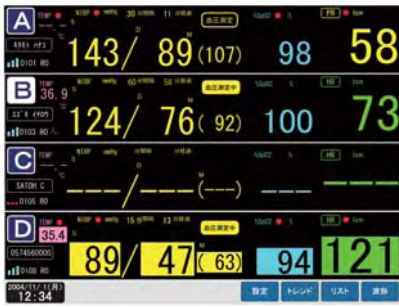


4ベッド数値表示




2ベッド波形表示

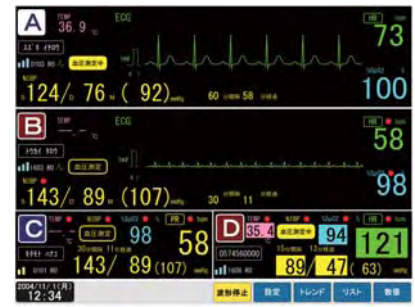

2ベッド波形・2ベッド数値表示

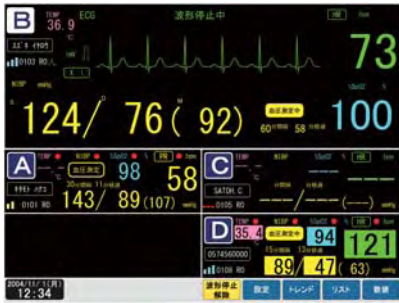

1ベッド波形・3ベッド数値表示

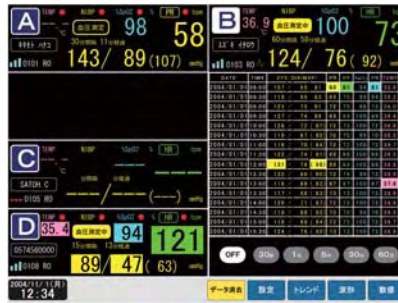

リスト表示



トレンド表示



基本設定表示

日時、クリック音調節、警報印刷、リスト格納、警報音選択



監視値設定表示

最高血圧、最低血圧、脈拍数、SpO2、体温



患者登録表示

患者名登録、カナ、数字入力




患者固有設定表示


測定間隔、加圧値、同期音

## プリント印字


紙幅58mmの感熱式プリンターで、設定、測定値、警報、リスト、トレンドを印字します。

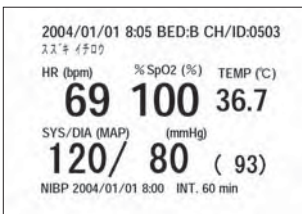


測定値印字

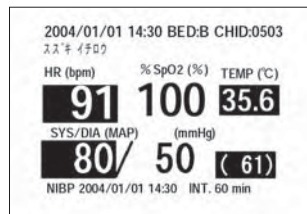


警報印字

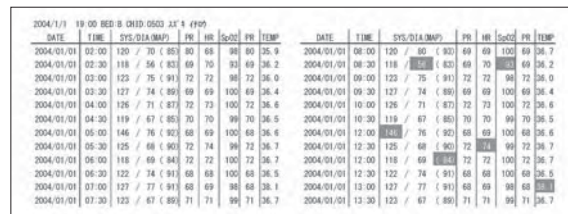


リスト印字

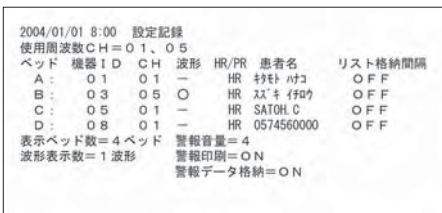


設定印字

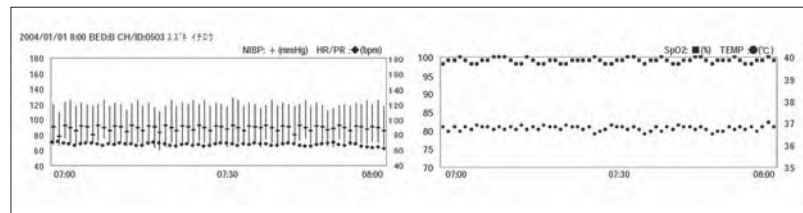

トレンド印字

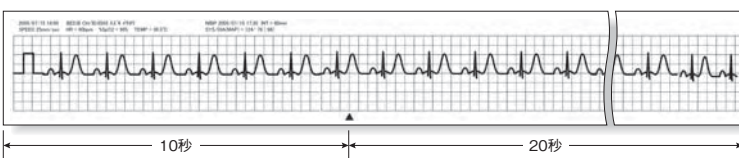

波形印字

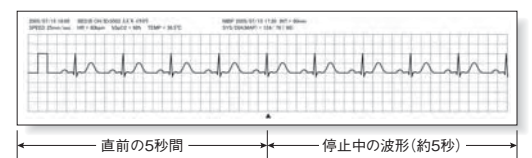

波形停止印字

## オプション



**拡張ボックス**  
〈バイタルセンサG用〉  
TM-2560G-20  
標準価格¥50,000  
(税込価格¥52,500)



**無線ユニット**  
〈バイタルボックス・バイタルノート用〉  
TM-2570-20  
標準価格¥180,000  
(税込価格¥189,000)



**無線ユニット**  
〈バイタルセンサG用〉  
TM-2140-10  
標準価格¥130,000  
(税込価格¥136,500)



**中継器**

プリンタ用紙	AX-PP147-S	標準価格 ¥5,000 (税込価格 ¥5,250)	ネームプレート	AX-1084016537	標準価格 ¥3,000 (税込価格 ¥3,150)
電源ケーブル	AX-KO1108	標準価格 ¥1,000 (税込価格 ¥1,050)	架台	TM2560G-03	標準価格 ¥60,000 (税込価格 ¥63,000)
チャンネルシール	AX-1083007977	標準価格 ¥2,500 (税込価格 ¥2,625)	架台取付金具	TM2140-16	標準価格 ¥10,000 (税込価格 ¥10,500)

## 仕様

機種名	TM-2140	TM-2140W
表示方法	12.1型TFTカラー液晶	
表示項目	数値表示：最高・最低血圧、脈拍数、心拍数、血中酸素飽和度、体温 波形表示：心電図	
表示ベッド数	数値表示：最高4ベッド 波形表示：2ベッド+数値表示：2ベッド 波形表示：1ベッド+数値表示：3ベッド 波形表示：2ベッド	
内蔵テレメータ	1	2
通信方式	双方向テレメトリ(特定小電力無線)	
周波数範囲	429.250~429.375MHz	
チャンネル数	40ch (ch間隔 12.5kHz)	
リストメモリデータ数	600件/ベッド	
リスト格納間隔	30秒、1分、5分、30分、60分	
プリンタ部	サーマル式ラインプリンタ(紙幅58mm)	
印字	測定値、リスト、トレンド、機能設定、警報	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	40VA	
電源保護形式	クラス特(B型)	
本体外形寸法	350(W)×382(H)×198(D)mm	
質量	約8kg	


特定保守 管理医療機器  
一般的名称：多項目モニタ 33586000

ME機器に関するお問い合わせは  
イー・アンド・デイ ME機器相談センター  
フリーダイヤル **0120-707-188**  
受付時間：月～金曜日 9:00～12:00 13:00～17:00

## 付属品

- 電源コード……………1本
- 通信チャンネルシール……1式
- ネームプレート……………1セット(4枚入)
- プリンタ用紙……………1巻
- 取扱説明書、保証書

## 外形寸法

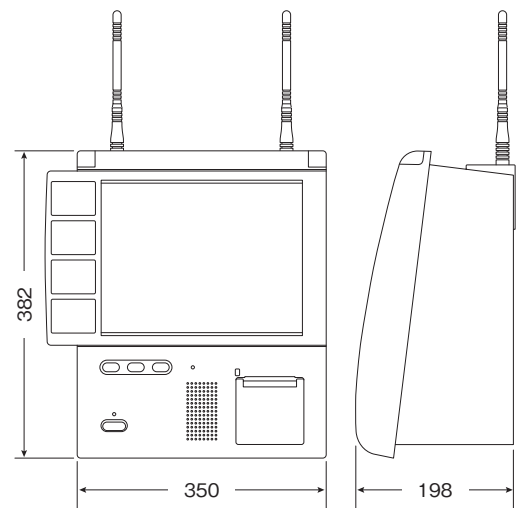

## AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者：株式会社イー・アンド・デイ  
〒364-8585埼玉県北本市朝日1-243

製造業者：研精工業株式会社 つくば工場

<http://www.aandd.co.jp>