

※この文書の内容及びソフトウェアの意匠、仕様に関しては、将来予告なく変更することがあります。
※本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

[はじめに]

このたびは、血圧データ集計ソフト tmMateをご使用いただき誠にありがとうございます。
本ソフトをご使用いただくにあたりまして、以下のご理解をよろしくお願いいたします。

[免責事項]

本ソフトはフリーソフトですが、著作権は 株式会社エー・アンド・デイ が保持しています。

以下の条件に同意する場合に限り使用することができます。

- ・このソフトウェアの使用または使用不可により、いかなる損害を受けても作者は一切の責任を負いかねます。
- ・作者はバージョンアップ（バグ修正を含む）の義務を負いかねます。
- ・本ソフトを作者の許可無く再配布することはできません。
- ・再配布する際は、ソフト本体とこの説明書の改変はできません。

[動作環境]

対応OS : Windows2000, WindowsXP, WindowsVista, Windows7
メモリ : 512MB以上

[インストール]

インストールは、以下の初期ファイル tmMate.exe と tmMateHELP.chm を任意のフォルダにコピーしてください。

tmMate.exe : 本ソフトウェア実行ファイル
tmMateHELP.chm : ソフトウェアヘルプ実行ファイル
Readme.txt : 本書

以下のファイルは起動時に自動生成されます

tmMate.ini : 環境設定保存ファイル
dataフォルダ : バックアップデータ用フォルダ

※tmMateを移動する場合、上記(初期ファイル)と共に、tmMate.iniを移動させると、環境設定を引き継ぐことができます。

[アンインストール]

インストール時にコピーしたフォルダ内、
tmMate.exe、tmMateHELP.chm、Readme.txt、tmMate.ini、dataフォルダ
をすべて削除してください。
本ソフトはレジストリ等の操作はいたしません。

[起動方法]

アプリケーションを起動させるには、tmMate.exeを実行してください。

[操作方法]

操作法は、起動後のメニューより、「ヘルプ(H)」 - 「トピックの検索(H)」にて、ヘルプをご参照ください。

////////// Release Note //////////

2007. 07. 07 Ver1. 01 リリース
2007. 12. 16 Ver1. 03 TM2550シリーズ、TM2560シリーズ正式対応
2008. 01. 07 Ver1. 05 TM2655シリーズ正式対応
血圧計からのインポートで50件以上のデータにも対応
2011. 11. 01 Ver1. 11 TM2590シリーズ正式対応
2012. 05. 28 Ver1. 13 TM2590のリストインポート時の測定値アラーム対応
2013. 09. 25 Ver1. 22 トレンド描画対応(麻酔向け 最長4時間トレンド)
2014. 08. 01 Ver1. 23 「患者ID送信」を設定していると「リスト格納間隔」が正
常に動作しない不具合修正。

////////// [メディカル機器に関するご質問・ご相談・修理品窓口] //////////
受付時間 : 月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) AM9:00～PM5:00

株式会社 エー・アンド・デイ
ME機器相談センター
(フリーダイヤル) 0120-707-188