

3年・10年保証

業務使用は対象外

エー・アンド・デイは
医療・測定機器の
総合メーカーです。

A&D
A&D Medical

調剤薬局で販売

快適・カンタン
血圧計

やさしさ、たくさん
快適・カンタン血圧計
シリーズ



..... 調剤薬局でお求めください。.....

A&D 株式会社 **エー・アンド・デイ**

上腕式血圧計…………

UA-1000 シリーズ

3年保証

業務使用は対象外

やさしさ、使いやすさを
コンパクトに仕上げた血圧計



音声でお知らせ
UA-1030T

3Dフィットカフ・ACアダプタ付き
UA-1020B



しっかり巻けるカフ
UA-1020G

手首式血圧計…………

UB-500 シリーズ

10年保証

業務使用は対象外

小型・スリムデザイン
手軽に測れ、携帯に便利



手首高さガイド付き
UB-533PGDP



シンプル手軽に測れる
UB-525DP



安心と信頼の理由

エー・アンド・デイ血圧計は、多くの医療機関で
使用されており、その精度・品質・耐久性を
評価いただいています。



生体情報モニタ



全自動血圧計



24時間携帯型自動血圧計



プロフェッショナル品質



国際的な*精度基準を満たす事が
臨床試験で証明されています。



ボタンを押すだけで測定から
結果表示まで簡単に操作できます。

*欧州高血圧学会 (ESH)・英国高血圧学会 (BHS)



調剤薬局 3つの安心

1 調剤薬局で相談できる安心

薬剤師さんに相談できるので購入後も安心

2 3年・10年保証付きの安心

調剤薬局専用血圧計は3年・10年保証付き

消耗品(カフ、電池)を除く

業務用に使用された場合は対象外となります

3 無償引き取りサービスの安心


修理の際は自宅まで引き取りに伺います

※無償は保証期間内に限ります



引き取りサービス

万が一故障が発生した場合は、
ご自宅まで商品を引き取りに伺います。
エー・アンド・デイお客様相談センター
0120-514-016(通話料無料)まで
ご連絡ください。

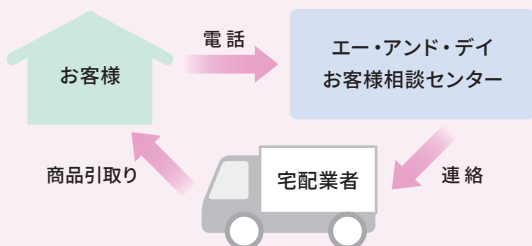


おすすめ機能

速くて快適な おまかせスピード測定

UA-1020G/1020B/1030T

お使いになる方に最適な加圧・排気を自動調整して測定時間を短縮します。当社従来品の約半分の時間で測定できます。カフの締め付け時間が短いので、腕の負担を軽減でき快適です。

※ UA-1030T、UA-1020B、UA-1020Gに内蔵

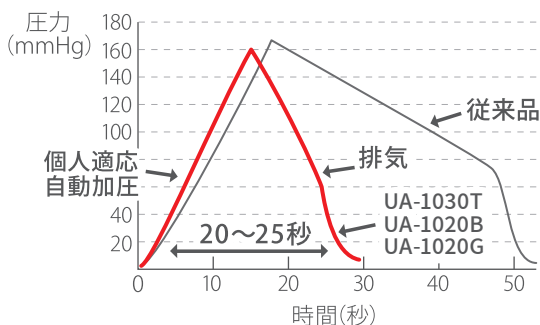

測定値の分類が一目でわかる WHO区分表示

UA-1020G/1020B/1030T
UB-525DP/533PGDP

測定値がWHO（世界保健機関）の血压分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上のバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140・最低90以上

正常高値血圧…最高130～139

最低85～89

正常血圧……………最高130・最低85未満
(mmHg)

高血圧

正常高値血圧

正常血圧



正確測定のための カフゆる巻きエラー表示

UA-1020G/1020B/1030T
UB-533PGDP

カフが正しく巻かれているかチェックして、ゆるく巻かれている場合、液晶上にアイコンを表示します。




おすすめ機能

正確測定のための 不規則脈波 (IHB) 表示

UA-1020G/1020B/1030T
UB-525DP/UB-533PGDP


脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。測定後、本表示が点灯の場合は、再測定をお勧めします。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

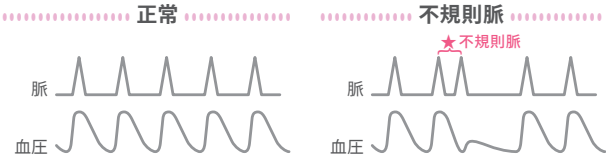

測定値の信頼性を高める 不規則脈波頻度 (%IHB) 表示

UB-533PGDP

不規則脈波の発生頻度レベルをアイコンのバーの本数で表示します。測定後、メモリにて本表示を確認ください。発生頻度が高ければ医師へ相談する目安となります。※メモリデータが6データ以下のときは表示されません。

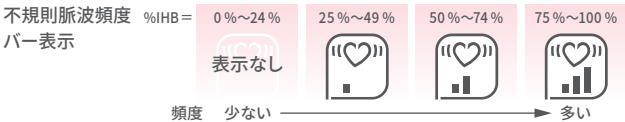


正確測定をサポートする 手首高さガイド

UB-533PGDP


正しい手首の高さをランプでお知らせします。本体内蔵のポジションセンサにより手首の高さを検出、最適な高さをランプの色と位置でお知らせします。




測定前：高さ判定と高低をランプの色と位置でお知らせ

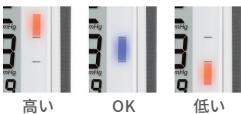

測定後：測定前と測定後の高さを判定

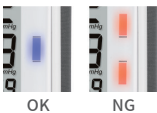

血圧を測る時は、カフの位置を心臓と同じ高さにすることが重要です。

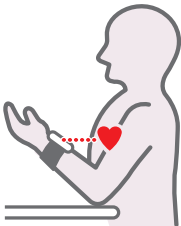

音声で
いろいろ
お知らせ

UA-1030T

3年保証

測定は、表示と音声でお知らせ、
目と耳で確認できて安心



音声ガイド



ACアダプタ付



大型表示



痛くないカフ

おまかせ
スピード測定

WHO区分
表示

体動検出
表示

不規則脈波 (IHB)
表示

カフゆる巻き
エラー表示

90メモリ

医療機器認証番号 224AHBZX00019000

管理医療機器

販売名: エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1030T

おすすめ機能

おしゃべり血圧計 ～音声ガイド～

測定値や、血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧の
ワンポイント情報をお話します。測定値を目と耳で確認ができて安心です。

おはようございます。

お疲れ様でした。



いろいろ
お知らせします。

体や腕を
動かさないで
ください。

あなたの
最高血圧は
〇〇……

・音声「切」と音量
6段階設定

・音声内容「語り」と
「標準」様式切替

3Dフィットカフ(痛くないカフ)

※ 特許取得済

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、
痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を
包み込みます。

カフ内布に
シワがよらない



痛くないカフ



従来のカフ



カフ
ゆる巻き
エラー表示

カフがゆるく巻かれて
いると点灯します。



付属品

専用ACアダプタ(TB-233)/お試し用単3形乾電池4本/収納ケース/
血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書

3Dフィットカフ
&
ACアダプタ
付

UA-1020B

3年保証

片手で簡単に巻ける3Dフィットカフ
経済的なACアダプタ付



おまかせ
スピード測定

不規則脈波 (IHB)
表示

WHO区分
表示

カフゆる巻き
エラー表示

体動検出
表示

90メモリ

医療機器認証番号 224AHBZX00018000

管理医療機器

販売名: エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1020

おすすめ機能

3Dフィットカフ (痛くないカフ)

※ 特許取得済

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。

カフ内布に
シワがよらない



痛くないカフ



従来のカフ




カフがゆるく巻かれて
いると点灯します。



WHO区分表示 ～測定値の分類が一目でわかる～

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧
正常高血圧
正常血圧

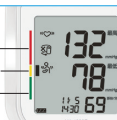

経済的なACアダプタ付

コンセントから電源がとれて経済的
小型・軽量、コード長さ約152 cm



AX-TB233

付属品

専用ACアダプタ (TB-233) / お試し用単3形乾電池4本 / 収納ケース /
血圧管理手帳 / 取扱説明書 / 添付文書

見やすい
大型表示

UA-1020G

3年保証

腕にフィット、しっかり巻ける、
からだにやさしい“脱アレルギーカフ”



大型表示



脱アレルギーカフ

おまかせ
スピード測定

WHO区分
表示

体動検出
表示

不規則脈波 (IHB)
表示

カフゆる巻き
エラー表示

90メモリ

医療機器認証番号 224AHBZX00018000

管理医療機器

販売名: エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1020

おすすめ機能

WHO区分表示 ～測定値の分類が一目でわかる～

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140・最低90以上
正常高値血圧…最高130～139
……………最低85～89
正常血圧……………最高130・最低85未満
(mmHg)

高血圧
正常高値血圧
正常血圧



ソフトカフ(脱アレルギーカフ)

金属・天然ゴム アレルギー対策、皮膚炎やジン麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。

A&D
オリジナル

樹脂リングカフ



カフゆる巻きエラー表示

カフがゆるく巻かれていると
点灯します。

付属品

お試し用単3形乾電池4本/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書

手首式

お手軽に
測りたい方に

UB-533PGDP

10年保証

手首高さガイドで
正確な測定をサポート



手首高さガイド



不規則脈波頻度
(%IHB)表示



カフゆる巻き
エラー表示

60×2メモリ

自動昇圧測定
方式

WHO区分
表示

カレンダー&
時計表示

体動検出
表示

収納ケース付

医療機器認証番号 229AHBZX00020000

管理医療機器


販売名: エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533

おすすめ機能

手首高さガイド ～手首高さガイドと測定前後の高さ判定～



正しい手首の高さをランプでお知らせします。本体内蔵のポジションセンサにより手首の高さを検出、最適な高さをランプの色と位置でお知らせします。

測定前: 高さ判定と高低をランプの色と位置でお知らせ

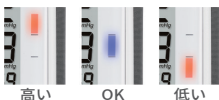

血圧を測る時は、カフの位置を心臓と
同じ高さにすることが重要です。

測定後: 測定前と測定後の高さを判定

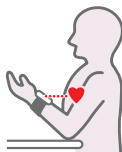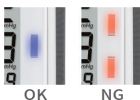

不規則脈波頻度 (%IHB) 表示 ～発生頻度レベルをバー表示～

測定後、メモリにて本表示を確認ください。

発生頻度が高ければ医師へ相談する目安となります。

不規則脈波頻度

%IHB =

0%～24%

25%～49%

50%～74%

75%～100%

バー表示

表示なし



頻度 少ない

多い

付属品

お試し用単4形乾電池2本/収納ケース/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書

10年保証



※糖尿病、肝臓病、腎臓病、動脈硬化など末梢循環器障害のある方は、上腕と手首での測定値に差が出ることがあります。

お試し用単4形乾電池2本/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書

家庭血圧の正しい測り方

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に変動しています。また、カフ（腕帯）の巻き方や姿勢、測定中の体動などで血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に

2～3回深呼吸し、安静にしてリラックスした状態で測りましょう。



※ 朝食・薬を飲む前

起床後1時間以内、排尿後
朝の服薬前、朝食前
座った姿勢で1～2分安静に



就床前、排尿を済ませ
座った姿勢で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています。

家庭血圧 測定ポイント

- 原則1機会2回測定、平均値を記録
- 長期間、継続する
- 測定値は、すべて記録する

※ 測定は、条件を一定にする

※ とくに冬季、暖房の無い部屋での測定は血圧を上昇させるので室温にはご注意ください



家庭血圧の正しい測り方

上腕式

カフの巻き方

- カフは肌に直接巻く
(薄手のシャツ1枚であれば可)
- 上着の袖のたくし上げは、腕の血管を
圧迫するのではない
- カフは、肘関節にかからないように



座った姿勢での測り方

姿勢

背もたれのある椅子に座り
背筋を伸ばす
(前かがみや腹部を圧迫しない、
足を組まない)

高さ

カフと心臓の位置を
同じ高さに

安静

体の力を抜き
1～2分安静にしてから

測定中は

体や腕を動かさない



手首式

手首帯の巻き方

- 手首の内側に血圧計の表示部がくるように

姿勢


背もたれのある椅子に座り、
肘をついて1～2分安静に
足を組まない

高さ

手首と心臓の位置を
同じ高さに

測定中は

手や体を動かさない

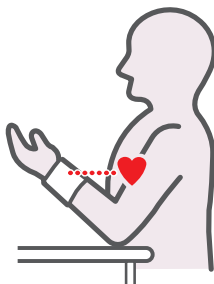

血圧計仕様

	音声でいろいろお知らせ	3Dフィットカフ& ACアダプタ付
型名	UA-1030T	UA-1020B
商品コード	UA-1030TG-JCAC	UA-1020F-JC1AC
製品外観		
価格	オープン価格	オープン価格
ワンプッシュ操作	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○
WHO区分表示	○	○
カフゆる巻きエラー表示	○	○
体動検出表示	○	○
不規則脈波 (IHB) 表示	○	○
おまかせスピード測定 (上腕)	○	○
自動昇圧測定方式 (手首)	—	—
平均値表示	○	○
メモリ数 (最新)	90	90
音声ガイド	○	—
手首高さガイド	—	—
カフ	3Dフィットカフ (痛くないカフ)	3Dフィットカフ (痛くないカフ)
測定可能腕周・手首周	17 cm～32 cm	17 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個 またはACアダプタ	単3形乾電池4個 またはACアダプタ
電池寿命 (アルカリ乾電池)	約700回	約1,000回
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	140×105×60 mm	140×105×60 mm
本体質量 (乾電池を除く)	約300 g	約285 g
付属品	専用ACアダプタ (TB-233) / 単3形アルカリ乾電池4個 (お試し用) / 収納ケース / 血圧管理手帳 / 取扱説明書 / 添付文書	
JANコード	 4 981046 021302	 4 981046 021227

3Dフィットカフ (痛くないカフ)

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。

カフ内布に
シワがよらない



痛くないカフ 従来のカフ



ソフトカフ (脱アレルギーカフ)

金属・天然ゴムアレルギー対策、皮膚炎やジン麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。

A&D
オリジナル 樹脂リングカフ



カフゆる巻きエラー表示
カフがゆるく巻かれていると点灯します。



カフゆる巻きエラー表示
カフがゆるく巻かれていると点灯します。

見やすい大型表示


手首式

お手軽に測りたい方に

UA-1020G	UB-533PGDP	UB-525DP
UA-1020F-JC	UB-533B-JC11	UB-525A-JC11
		
オープン価格	オープン価格	オープン価格
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	—
○	○	—
○	○ (%IHB)	○
○	—	—
—	○	○
○	○	○
90	60×2	60
—	—	—
—	○	—
ソフトカフ(脱アレルギーカフ)	クリップカフ	クリップカフ
22 cm～32 cm	13.5 cm～21.5 cm	13.5 cm～21.5 cm
単3形乾電池4個 またはACアダプタ	単4形乾電池2個	単4形乾電池2個
約1,000回	約200回	約250回
140×105×60 mm	56×21.5×88 mm	56×21.5×88 mm
約285 g	約95 g	約90 g
単3形アルカリ乾電池4個 (お試し用)/血圧管理手帳/ 取扱説明書/添付文書	単4形アルカリ乾電池2個 (お試し用)/収納ケース/血圧 管理手帳/取扱説明書/添付文書	単4形アルカリ乾電池2個 (お試し用)/血圧管理手帳/ 取扱説明書/添付文書
 4 981046 021203	 4 981046 151504	 4 981046 151511

付属品

便利な…血圧管理手帳

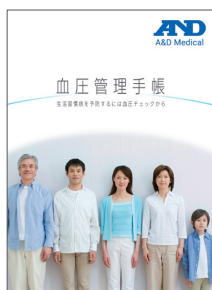

経済的な…専用ACアダプタ

(UA-1030T/UA-1020B：標準付属)
(UA-1020G：別売)
コンセントから電源がとれて経済的。
小型・軽量のACアダプタです。



ACアダプタ(別売)
AX-TB233 標準価格¥1,650(税込)
(コード長さ 約152 cm)
JANコード：4981046000116



家庭と病院をつなぐ

エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。全国の主要医療機関で使用されている医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をするトップクラスのメーカーです。



安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
 - 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
 - ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

<https://www.aandd.co.jp>

お客様相談センター

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

0120-514-016

月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)9:00～12:00/13:00～17:00



お問い合わせ
フォーム

血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で