



GOOD
DESIGN

AND
A&D Medical

Bluetooth®

睡眠中の血圧が測れる 上腕式血圧計



販売名
エー・アンド・デイ デジタル血圧計
UA-1300BLE

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

AND
A&D Medical

病院向けから家庭向けまでを
手掛ける血圧計メーカーです

株式会社エー・アンド・デイは、1977年創業以来、血圧計開発を続けてきました。家庭向け血圧計は、病院向け製品の開発での経験を生かした測定技術を搭載しています。



家庭向け血圧計




全自動血圧計



24時間携帯型自動血圧計

夜間(睡眠)高血圧とは？

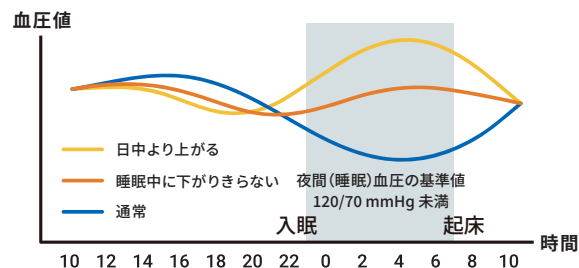

睡眠中の血圧の平均値が 120 / 70mmHg 以上の場合、「夜間(睡眠)高血圧」と呼ばれます。血圧は睡眠時は昼間に比べて 10 % ~ 20 % ほど下がるのが一般的ですが、夜間(睡眠)高血圧の場合は睡眠中に血圧が下がらない、もしくは昼間より高くなるとされています*。また、自覚しづらく、第三者も気づきにくい高血圧とされています。

夜間(睡眠)高血圧の
詳細はこちら



*日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019

※疾患の一般的説明であり、本製品が治療・予防・診断を行うものではありません。

睡眠中の血圧も測れる！

睡眠中・起床後の測定

腕に装着、アプリで測定時間を設定すれば、
睡眠中に**自動的に血圧測定**を行います。



※起床後の測定は、初期設定の場合、
起床から10分後に行われます。

日中(通常時)の測定も可能

測りたいタイミングで腕に装着、測定スタート。
コンパクトにまとまるので外出先や仕事場にも
持っていやすい。



睡眠中はもちろん、日常的にも使える仕様・設計

睡眠に配慮し、本体のコンパクトさに加え、静音構造を採用した血圧計です。簡単に持ち運びができ、仕事場や外出先など日中の様々な場面での測定にも便利です。




本体厚み
17mm

角のない薄型ボディで寝具にも
引っかかりにくい



動作音は最大
40dB
程度

睡眠中の測定に配慮した
静音設計

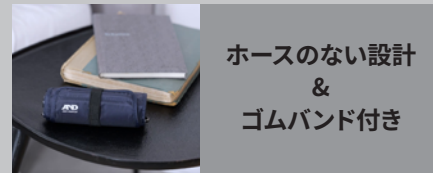

ホースのない設計
&
ゴムバンド付き

カフを本体に丸めて収納できて
持ち運びや収納に便利

製品機能

製品についての詳細はこちら
UA-1300BLE LP



Bluetooth Bluetooth 通信機能付き

「心」 不規則脈波 (IHB) 表示

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

最大5人までのユーザ登録可能

USB 充電 (Type-C)

アプリひとつで簡単に設定・記録・管理



専用アプリ
A&D Connect
ヘルスケア

アプリのダウンロードは
こちらから



より詳しいアプリの
使い方はこちら



睡眠中の測定時刻を設定

(例)
自由設定 1



睡眠中の血圧の測定時間は、固定設定と
自由設定2つの合計3パターンから選べます。

睡眠中の血圧に絞ったデータ・レポートを作成




日中の血圧だけでなく、睡眠中の血圧に絞ったデータ・レポートの作成も可能。グラフだけでなく、一覧として
振り返ることもできます。家族や医師との共有にも使えます。

3つのパターンで生活リズムにあった測定ができる

睡眠中・起床後の測定時間は専用アプリ「A&D Connect ヘルスケア」より設定を行います。設定方法は固定設定か、2つの自由設定の3つのパターンから選べます。自分の好きな時間に設定可能なため、生活リズムが不規則な方でも使用できます。


※就寝・起床の判定を機器自体で行います。

固定設定

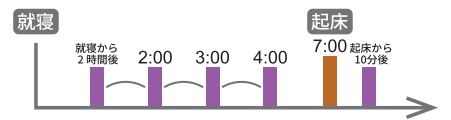


就寝から2時間後・2時・3時・4時の固定時間で測定

自由設定
1

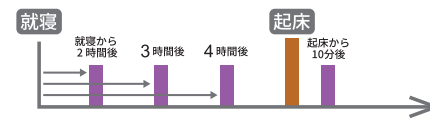

就寝から1時間後・2時間後・3時間後・・・と、就寝からの経過時間で自由に設定ができます。(1時間ごとに設定可能)

自由設定
2

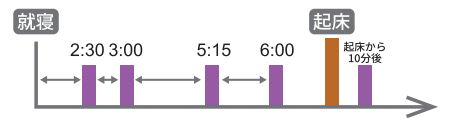

〇時・〇時・〇時・・・と、就寝期間内で希望する時刻に自由に設定できます。(15分毎に設定可能)

デジタル血圧計 UA-1300BLE 仕様	
型式名	UA-1300BLE
商品コード	UA-1300LA-JC11
JANコード	4981046102667
測定方式	オシロメトリック方式
測定範囲	圧力:0 mmHg～299 mmHg 脈拍数:40 拍/分～180 拍/分
測定精度	圧力:±3 mmHg 脈拍数:読み取り数値の±5 %以内
測定可能腕周	22 cm ～ 32 cm
本体サイズ	幅138 ×高さ17 ×奥行き34 (mm)
本体重量	約185 g
電源	リチウムイオン電池 (DC3.7 V)
測定回数	新品の状態からフル充電時:連続約100回使用可能 (室温23℃、170 mmHg 加圧、腕周囲27 cm)
通信方式	Bluetooth®通信 Ver.5.1 Low energy technology
付属品	USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)、 睡眠血圧リーフレット
一般の名称	自動電子血圧計 体動センサ
医療機器分類	管理医療機器
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1300BLE
医療機器認証番号	306AHBZX00038000

＊睡眠中の血圧を測定するには専用アプリ「A&D Connect ヘルスケア」が必要です。

安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
 - 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
 - ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ＊外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※Apple Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google PlayおよびGoogleロゴはGoogle LLCの登録商標です。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

<https://www.aandd.co.jp>

お客様相談センター

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

0120-342-043

月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)9:00～12:00/13:00～17:00



お問い合わせ
フォーム

ご購入は信用のある当店へ

生活の様々なシーンで測定出来る！



睡眠中



起床後



外出先でも



オフィスでも