

A&D

エーアンドデイ
ツイン・メモリ血圧計
UA-774

ご夫婦など、お二人の血圧管理や
朝・夜の時間帯別メモリ
ツイン・メモリの上腕式血圧計

ACアダプタ、モニター電池、
ハイグレードな収納ケース、血圧管理手帳付



血圧測定的重要性!

《家庭で血圧を測るメリットは》

わが国の高血圧者は、4,000万人と推定されています。高血圧は症状が出ないため放置する人が多く、糖尿病や肥満、高脂血症などと合併して心臓病や脳卒中になり、どうきや息切れなどの症状がでるようになってから気づくため、病状がかなり進行してしまっている状況です。

年一回の健診では、緊張から高めに出ることが多く、一回の測定だけで判断はできません。

また、血圧は起床後、徐々に上昇して夕方にピークになりますが、早朝に特に高くなる「早朝高血圧」は、脳卒中や心筋梗塞へのリスクが高まるため、朝・晩、家庭での血圧チェックが重要です。病院では、分かりにくい白衣性や仮面高血圧、早朝高血圧の発見に役立ちます。そこで、

家庭での血圧チェックを普段からこまめに行ない、病気の早期発見や合併症の発症を抑える生活習慣の改善や治療を行うことをおすすめします。

早朝高血圧を見つけるために
家庭血圧を測りましょう。





操作は簡単!
ワンプッシュ操作

ツイン・メモリ血圧計 UA-774

医療用具許可番号 11BY0051

オープン価格

ACアダプタ、モニター電池、ハイグレードな
収納ケース、血圧管理手帳付

ツイン・メモリ 2×30データ

二人分の測定値を別々に30回分まで記憶

最新30回分までの平均値を表示

使い方は ご夫婦など、お二人の血圧管理
朝・夜の時間帯別メモリ



光るツイン・スイッチ

判別しやすくスイッチを

グリーン・オレンジの2色に色分け


測定から記憶までワンプッシュ

操作のみ!



血压分類が一目でわかる 血压レベル表示

測定した値が、WHO(世界保健機構)の血压分類でどの領域にあるかを、6段階分けて液晶上にバーが点滅、位置表示します。

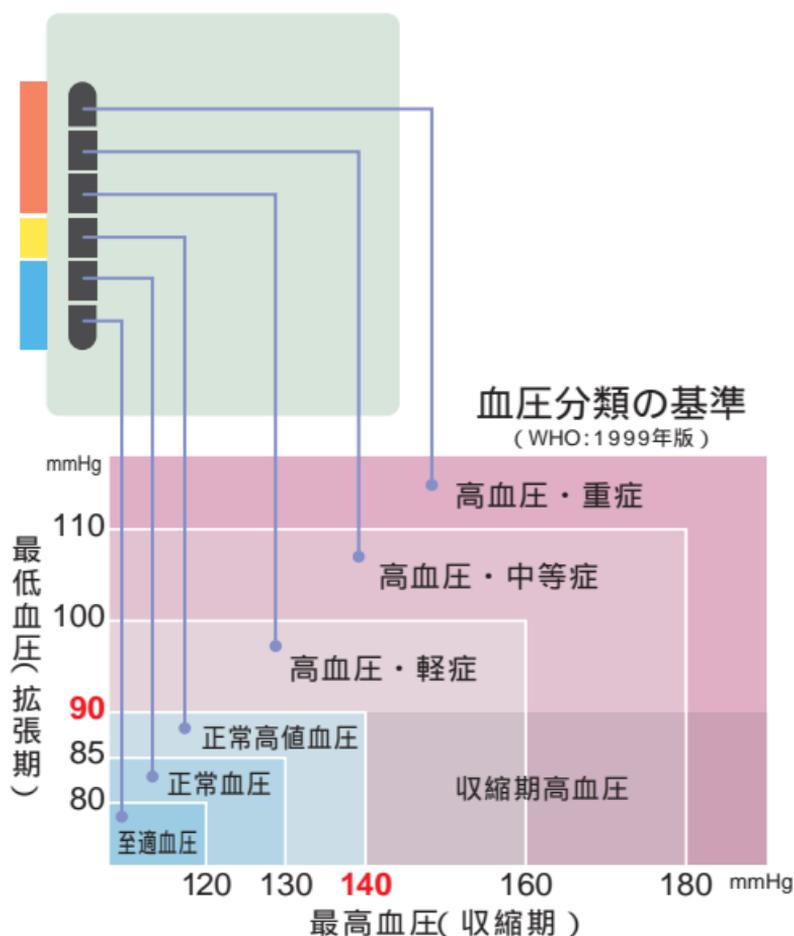


血压
レベル表示



血压分類の表示は、
最高血压・最低血压の測定値に対応した
各分類で高い方の分類表示が点滅します。


血圧・脈拍同時表示

最高・最低血圧値と脈拍数を同時に表示、
一目で確認、読み取れます。

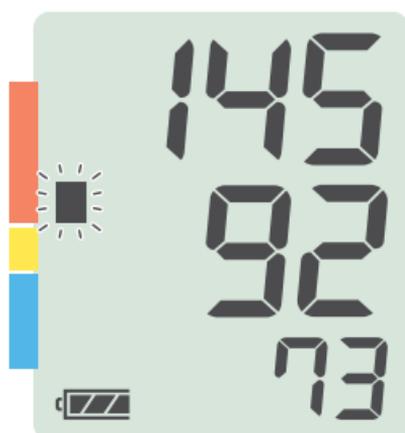

測定中の動きがわかる 圧力・バー表示

加圧開始と同時に圧力・バーが下から順に点灯を始め、
全点灯すると加圧は終了、減圧するにしたがいバーの
点灯数が減ってゆき測定終了後、血圧レベル・測定結果
表示に切り替わります。

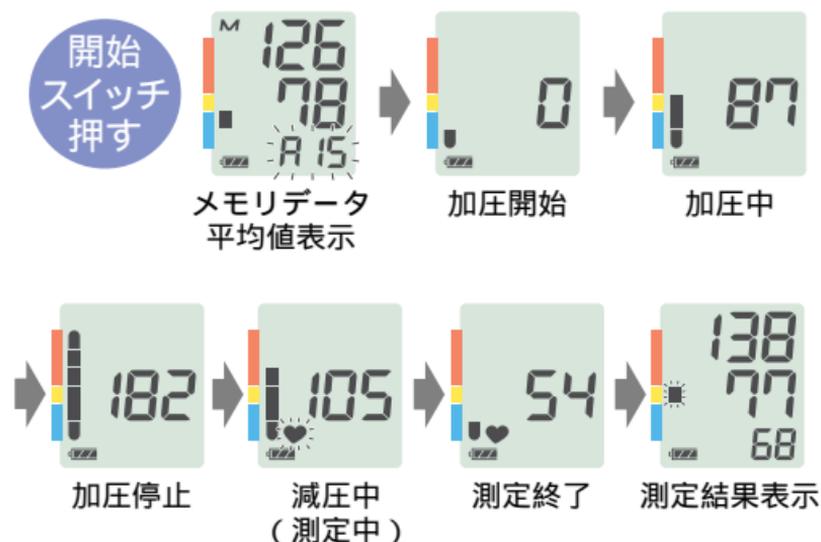

使いやすい工夫、いろいろ

操作は簡単 ワンプッシュ

カフを巻いて、開始スイッチを
押すだけで、測定からメモリまで自動



測定中の動作音が気にならない 超静音設計

測定者に最適な圧力まで、自動的に加圧 ファジー加圧

おまかせ加圧

経済的でお得！ 便利な2電源方式 ACアダプタ付

経済的なACアダプタも使え
単3形マンガン乾電池で約300回使用できます。



収納ケース付

収納や持ち運びに便利
ケースに入れたままで測定ができます。
血压レベル6段階表示グラフ付




毎日の血压データが残せる 血压管理手帳付



あなたの血圧は？

世界保健機構 (WHO) \ 国際高血圧学会 (ISH) では
1999年より、下図のように血圧分類を制定しています。

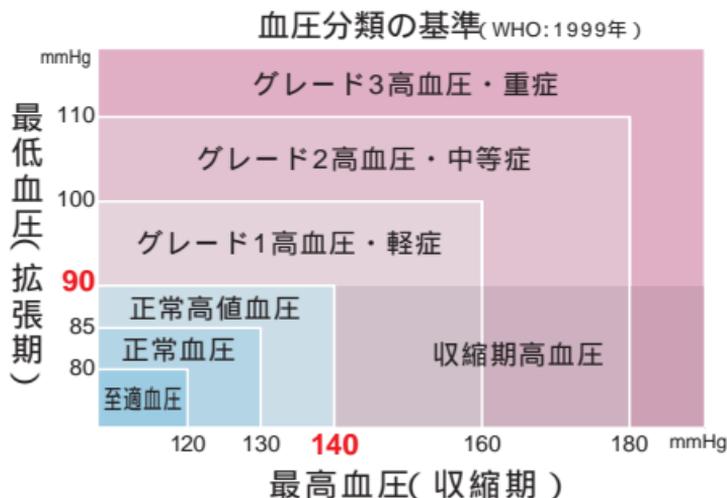


病院で140/90mmHg以上
家庭で135/85mmHg以上
このような方は高血圧です。

日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2004年度版

血圧は常に変動しています！

血圧は常に変動しており、1日のうちでも時間帯や季節、精神状態、身体状況により30～50mmHg変動することがあります。1回の測定値に一喜一憂せず、ご自分の平常値と変動傾向を知ることが大切です。

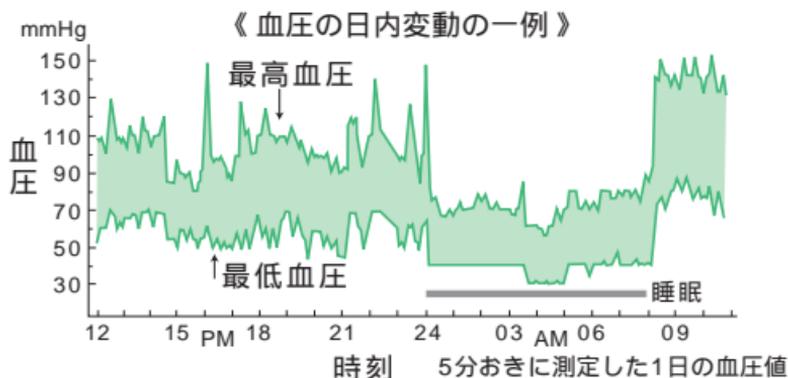

血圧、血圧計に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイ 健康機器相談センター

関東地区



フリーダイヤル

0120-514-016

関西地区



フリーダイヤル

0120-887-592

受付時間:月～金曜日 午前9:00～午後12:00 午後1:00～午後4:00

UA-774 仕様

測定方式	オシロメトリック方式
表示	液晶デジタル方式
測定範囲	圧力0～280mmHg 脈拍40～200拍/分
精度	圧力±4mmHg 脈拍±5%
加圧方式	ポンプによる自動加圧方式
減圧	電磁弁による自動減圧方式
排気	電磁弁による自動急速排気方式
電源	単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
電池寿命	約300回 マンガン電池使用
本体寸法	幅147×高64×奥行110mm
本体重量	約300g(乾電池のぞく)
付属品	専用ACアダプタ、モニター電池(単3形・4本)、 血圧管理手帳、収納ケース、添付文書、 ソフトカフ、取扱説明書

医療用具許可番号 11BY0051

* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

エー・アンド・デイは測定機器の総合メーカーです。
病院向けの医療機器等多機種製造しています。

<http://www.aandd.co.jp>



AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)

札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 東京北048-592-3111
名古屋052-701-5681 大阪06-4805-1207 広島082-233-0611
福岡092-441-6715



4 981046 027762

お買い上げは信用ある当店へ