

毎日、しっかり測りたい方に

快適・カンタン 血圧計



やさしさ、たくさん

快適・カンタン血圧計シリーズ

調剤薬局でお求めください。

快適・カンタン
血圧計

おすすめ特長

シンプル! 正確!

おすすめ機能

快適・カンタン血圧計シリーズは

血圧計をお使いの方や医療現場からのご意見・ご要望をもとに、細部にまで使いやすさと正確測定にこだわり、丁寧に作り上げた快適がたくさんさんの血圧計です。

簡単、ワンボタン操作

おまかせスピード測定

(UA-853・UA-786L・UA-782)

腕の負担を軽減

片手で簡単に巻ける

新型 e-カフ

細い腕にも対応

暖かみと清潔感がある

スタイル & カラー

美しいフォルム

測定値の分類がひと目でわかる

血圧レベル表示

正常・高血圧を
6段階分け表示

正確測定のための

不規則脈 (IHB) 検知

脈間隔をチェック

ACアダプタ付／血圧管理手帳付

(UA-853・UA-786L)



★ 安心の長期3年保証 ★


早くて快適な

おまかせスピード測定

お使いになる方に最適な、加圧・排気を自動調整して測定時間を短縮します。当社従来品の約半分の時間で測定できます。

カフの締め付け時間が短いので、腕の負担を軽減でき快適です。

※UA-853、UA-786L、UA-782に内蔵

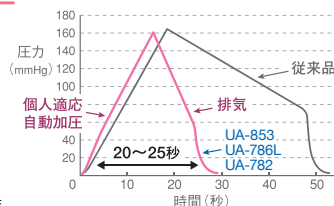

測定値の分類がひと目でわかる

血圧レベル表示

測定値がWHO (世界保健機関) の血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上のバーで点滅表示します。

高血圧...最高140以上 最低90以上

正常高値...最高130~139

血圧 最低 85~89

正常血圧...最高130未満 最低85未満
(mmHg)

血圧レベル表示

高血圧

正常高値血圧


正常血圧



正確測定のための

不規則脈 (IHB) 検知

脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

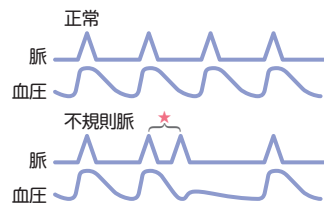

巻きやすいソフトな

新型 e-カフ



- ① 腕にはめて巻くだけ
- ② カフ幅が短いので腕にはめやすい
- ③ 適応の腕まわりが広いので細い腕の方も測れます



腕にはめる

巻き上げ止める

適応の腕まわり 17~32cm

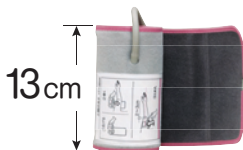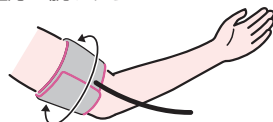

快適・カンタン血圧計シリーズ


朝・夜メモリ
血圧計

朝と夜、毎日測りたい方に

UA-853

朝・夜メモリ血圧計

オープン価格 医療機器認証番号
220AHBZX00008000

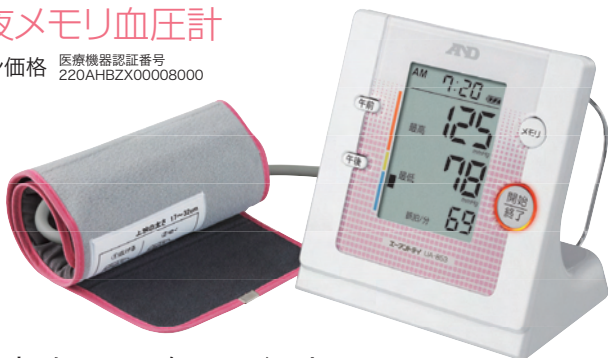

早朝高血圧の確認に役立つ

朝と夜のデータ分けメモリ表示

血圧を朝・夜しっかり測るなら、このスタイル

血圧計は、使いやすい所に置いて、毎日同じ時間に測ることが大切です。
UA-853は、場所を取らずにリビングに置けるスタイルです。

朝・夜の測定データが比べやすい


午前・午後分けメモリ表示

 (最新90回分を自動メモリ)

メモリデータを、午前・午後に分けて表示。それぞれの平均値、メモリデータが見られます。

- 早くて快適な おまかせスピード測定
- 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈 (IHB) 検知
- 巻きやすいソフトなe-カフ (細い腕の方にも対応)

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池付

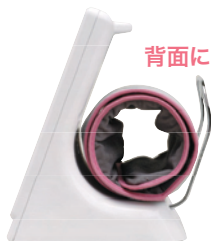

背面にカフ収納

時刻お知らせ機能付
(3設定まで)



快適・カンタン血圧計シリーズ

快適・カンタン
血圧計

毎日、しっかり測りたい方に

UA-786L

快適・カンタン血圧計

オープン価格 医療機器認証番号
219AHBZX00018000



見やすい大型表示

快適 おまかせスピード測定

光る大型スイッチで

測定開始が確認でき、しっかり測れます。



- 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈 (IHB) 検知
- 巻きやすいソフトなe-カフ (細い腕の方にも対応)
- 最新60回分の測定値を自動メモリ

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付



見やすい大型液晶
文字高19mm



ケース付で
収納に便利

快適・カンタン血圧計シリーズ

快適・ハートの
血圧計

初めてお使いになる方に

UA-782

快適・ハートの血圧計

オープン価格 医療機器認証番号
219AHBZX00018000



やさしさがたくさん
すぐに測れる卓上型

丸みのあるやさしいデザイン
リビングに置いて、毎日測れます。

- 早くて快適な おまかせスピード測定
- 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈 (IHB) 検知
- 巻きやすいソフトなe-カフ (細い腕の方にも対応)
- 最新90回分の測定値を自動メモリ

血圧管理手帳、カフホルダー、お試し乾電池付

背面にカフ収納



※ACアダプタ(別売)AX-TB233
標準価格¥1,500(税抜)

快適・カンタン血圧計シリーズ

快適・手首式
血圧計

手軽に測りたい方に、外出先で測りたい方に

UB-510

快適・手首式血圧計

オープン価格 医療機器認証番号
21700BZY00458000



シンプルで使いやすい手首式
巻きやすいワンタッチカフ

簡単ワンプッシュのおまかせ加圧

お使いになる方に最適な圧力まで自動的に加圧、測定をします。

- 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈 (IHB) 検知
- 最新30回分の測定値を自動メモリ

血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付

小型・軽量サイズだから
測りやすく
携帯がラクです。



ケース付で
持ち運びに便利



適応の手首まわり
13.5~21.5cm

ご家庭での血圧測定のすすめ

血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考える上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

家庭血圧の目安

高血圧：最高135以上 最低 85以上 (mmHg)	正常血圧：最高125未満 最低 80未満 (mmHg)
----------------------------------	-----------------------------------

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より



家庭血圧の正しい測り方

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に



※朝食・薬を飲む前

起床後1時間以内、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に



就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

家庭血圧 測定ポイント

- 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
 - 長期間、継続する
 - 測定値は、すべて記録する
- ※ 測定は、条件を一定にする



付属品

便利な・・・血圧管理手帳

測定データがきれいにまとめられます。グラフ表と、朝・夜分け表の2種類を掲載の血圧管理手帳です。



わかりやすい・・・取扱説明書

使い方やご注意など、写真と大きな文字でわかりやすい取扱説明書です。



経済的な・・・ACアダプタ (UA-853・UA-786L：標準付属) (UA-782：別売)

コンセントから電源が取れて経済的。
小型・軽量(約62g)のACアダプタです。



ACアダプタ(別売)
AX-TB233 標準価格¥1,500(税抜)
(コード長さ 160cm)
JANコード：4981046000116

血圧計 仕様

	朝・夜 測定する方に	毎日しっかり測りたい方に	初めてお使いになる方に	手軽に測りたい方に
型式名	UA-853	UA-786L	UA-782	UB-510
製品外観				
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ワンタッチ操作	○	○	○	○
血圧・脈拍同時表示	○	○	○	○
血圧レベル表示	○	○	○	○
IHB検知	○	○	○	○
おまかせ測定	○ (スピード)	○ (スピード)	○ (スピード)	○
平均値表示	○ (午前・午後分け)	○	○	○
メモリ数(最新)	90	60	90	30
適応腕(手首)まわり	17～32cm	17～32cm	17～32cm	13.5～21.5cm
電源	単3形乾電池4本またはACアダプタ	単3形乾電池4本またはACアダプタ	単3形乾電池4本またはACアダプタ(別売)	単4形乾電池2本
電池寿命	約200回(マンガン)	約200回(マンガン)	約200回(マンガン)	約250回(アルカリ)
本体寸法(幅×奥行×高)	150×126×156mm	163×111×63mm	116×147×89mm	62×70×56mm
本体質量	約500g	約320g	約320g	約83g
付属品	ACアダプタ、血圧管理手帳 お試し乾電池、取扱説明書	ACアダプタ、血圧管理手帳 お試し乾電池、収納ケース 取扱説明書	血圧管理手帳、カフホルダー お試し乾電池、取扱説明書	血圧管理手帳、お試し乾電池 収納ケース、取扱説明書
JANコード	 4 981046 028134	 4 981046 027861	 4 981046 027878	 4 981046 025126

エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。

全国の主要医療機関で使用されている

医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに

多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。

家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする

トップクラスのメーカーです。

(設立1977年・東証株式第一部上場)



生体情報モニタ 全自動血圧計

安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
- 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566 (代)

札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 名古屋052-726-8761
大阪06-4805-1207 広島082-233-0611 福岡092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

● 血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で