

バリアフリースケール

立位・車イス用 AD-6105R

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

RELIEF
for ALL

「安心」のRシリーズ体重計
低床・手すり付きの
バリアフリー仕様



- 検定付き体重計
- 体重測定ひょう量200 kg
- プリンタ内蔵
- 20 g 補助目盛付き



※車イスは製品に付属しません

低床・手すり付きのバリアフリー仕様


バリアフリースケール

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

立位・車イス用 AD-6105R 標準価格 ¥550,000 (税抜)

透析室

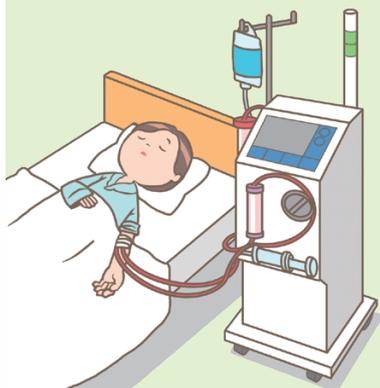

除水量
体重変化量

化学療法室



抗がん剤投与量
副作用・浮腫
外来栄養指導



患者の身体を支える
安心・安全な計測

栄養管理／栄養指導
NST 活動



病棟／外来

車イス通路幅を拡張


- ✓ 手すり幅を変えずに、車イス通路幅のみを拡張
700 mm 確保で電動車イスも乗降可能に
※ISO7193,7176/5(車いす) 手動及び電動車いすの寸法より




便利なスロープ

- ✓ 入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」
- ✓ 段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」

両側スロープ

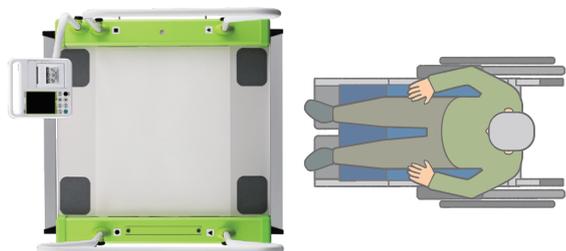

ダブルスロープ

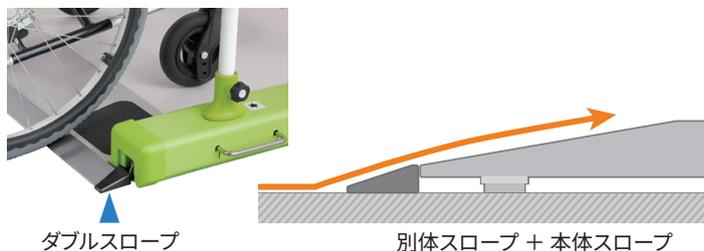


安心の精度誤差対策


- ✓ 測定誤差の大部分を占める「異物」の挟み込みを防止

異物が挟まると...

体重は軽い値に
測定されます

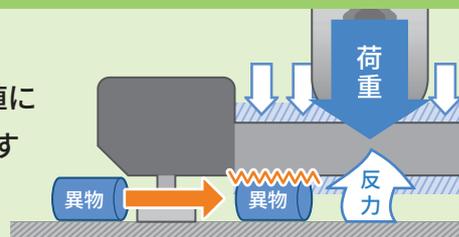


1 異物の侵入防止 (左右側面)

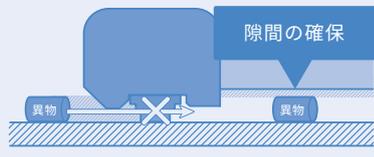

異物侵入対策


測定誤差の大部分を占める「異物」の挟み込みを防止。前後左右の全方位で対策を実施しました。

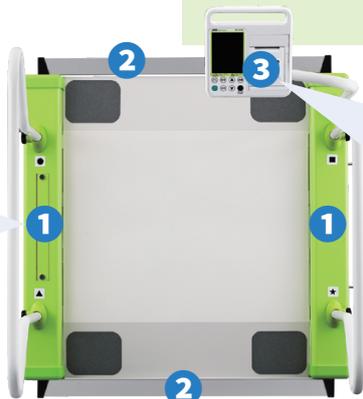

2 異物の侵入防止 (前後)



3 位置の特定・表示 (左右側面)

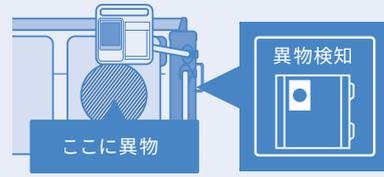

異物検知対策

万が一異物が侵入した場合は異物を検知する機能を実装。検知した場所を表示します。

前後体重メモリ機能

- ✓ IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
- ※バーコードリーダーオプションが必要です



IDを読み込み
体重値を記録します



体重測定

透析開始

透析終了

体重測定

日々の点検をサポート

- ✓ 日々の点検を習慣化できる「点検モード」を標準装備
- ✓ そのほか日常点検をサポートする分銅や点検マットをご用意


分銅

AD1601-10KM1
 ¥18,000(税抜)
 JANコード:4981046164207



専用点検保護マット

AD6105R-MAT
 ¥45,000(税抜)
 JANコード:4981046580489

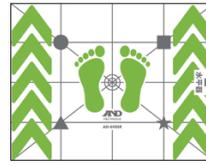

点検モード

- 車イス軌道、足形付き
- 点検の4隅確認に便利

仕様

品名	バリアフリースケール立位・車イス用
型名	AD-6105R
JANコード	4981046578882
商品コード	AD6105R
精度等級	3級(※ご使用地域をご指定下さい)
承認番号	第D242号
ひょう量	200 kg
目量	100 g (150 kg未満) / 200 g (150 kg以上)
測定	最小測定量 2 kg
	最大減算風袋量 90.0 kg以下
	計量台範囲 717(W) × 560(D) mm
表示	7セグメント液晶表示 メイン画面:文字高18 mm
外部出力	RS-232C × 2ch
外形寸法	948 (W) × 890 (D) × 917 (H) mm
本体質量	約42 kg
電源	専用ACアダプタ 単2形乾電池5本 ※補助としてご使用ください
付属品	取扱説明書、製品保証書 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール プリンタ用紙、別体スロープ
標準価格(税抜)	¥550,000

オプション



プリンタ用紙(5巻/箱)
 AX-PP147-S
 紙幅58 mm 長さ29 m
 ¥5,000(税抜)
 JANコード:4981046711340



専用ACアダプタ
 AX-TB278
 ¥5,000(税抜)
 JANコード:4981046154932



専用バーコードリーダー
 AX-BCR-USB A
 ¥20,000(税抜)
 JANコード:4981046579155



専用別体スロープ
 AD6105R-1
 ¥20,000(税抜)
 JANコード:4981046580496



BLEオプションボード
 GXA-27JA
 ¥9,000(税抜)
 JANコード:4981046306874



USBオプションボード
 FXI-02-JA
 ¥8,000(税抜)
 JANコード:4981046609357




イーサネットオプションボード
 FXI-08-JA
 ¥2,500(税抜)
 JANコード:4981046164375



外部表示器
 AD8931-JA
 ¥10,000(税抜)
 JANコード:4981046160308

NO Image

外形寸法図

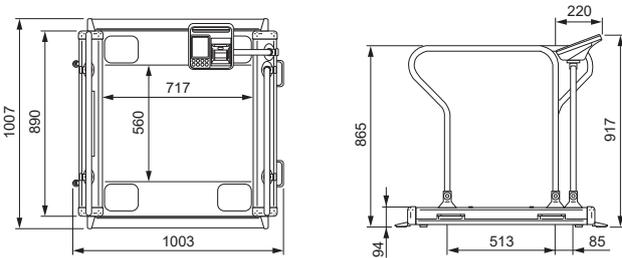

製造販売業者



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129
 札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759
 仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052
 名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769
 大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901
 広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058
 福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間: 月曜日~金曜日(※祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00/13:00~17:00

⚠️ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



発注時ご指定ください
 使用地域区分