

Discover Precision

AND
A&D Medical

ベッドサイドスケール

AD-6121A/AD-6122

小型・軽量だから
いろいろ使える検定付体重計



AD-6121A

目 量：100 g
ひょう量：150 kg
使用地域指定：要

精度等級
3級



AD-6122

目 量：100 g (99.9 kgまで)
200 g (100 kg~150 kg)
ひょう量：150 kg
使用地域指定：不要

精度等級
4級

持ち運び、設置・収納に便利な 薄型・軽量サイズ



ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計。

薄型・軽量で持ち運び、収納がしやすく、今までの業務用にはない仕様と低価格。

病棟、学校、健診、スポーツジム、エステティックなど幅広い分野で使用できます。

new form

軽量約3 kg、取っ手付だから

測定する場所まで、はかりを簡単に移動でき、持ち運びがラク。

本体サイズ315×314 mmだから

設置スペース、収納場所を取らず、邪魔にならない。

計量台の高さ57 mmだから

狭いスキ間にも、立てた状態で収納ができる。

足上げの負担が少なく安全に計量ができる。



ベッドの下に収納ができる。



AD-6121A

取引・証明用
検定付

¥39,500 (税抜)

目 量 (最小表示): 100 g

ひょう量 (最大計量): 150 kg

使用地域指定: 要

使用地域 (都道府県名) を指定してください。

精度等級
3級



AD-6122

取引・証明用
検定付

¥38,500 (税抜)

目 量 (最小表示): 100 g (99.9 kgまで)

200 g (100 kg~150 kg)

ひょう量 (最大計量): 150 kg

使用地域指定: 不要

精度等級
4級

new functions

表示方向切替

集団健診時に便利な対面表示。
本体裏面の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転します。



標準表示 (個人測定時)



対面表示 (健診時)


バックライト表示

暗い所でも見やすい。
(ACアダプタ使用時のみ)



水平調整

足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能です。

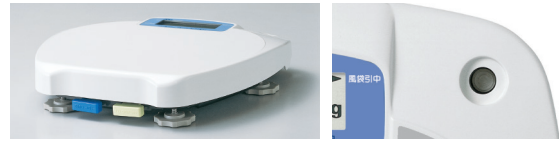

ブザー音

電源ONと測定終了時にお知らせします。
(ブザー音の入切可能) *ピピッ!*

使用方法切替 (表示固定)

用途(個人、健診、はかり)により3種の表示固定の切替ができ使いやすく便利です。

モード	表示固定
個人	5秒間表示 (降りてから)
健診	±3 kg以内の変動は固定
はかり	固定しない

2電源方式

用途、使用場所により使い分けができる
単三形乾電池4本またはACアダプタの2電源。
(単三形アルカリ乾電池での使用回数：約1,000回)

風袋引き

物を載せ、ゼロスイッチを入れ、表示を0にすると
風袋設定ができます。

オートパワーオフ

2分間、無動作で電源が自動的に切れ、電池消費を防ぎます。(ACアダプタの使用時はなし)

通信機能

拡張端子 (RS-232C出力準拠) 1チャンネル付で、
コンピュータなどに接続が可能です。



別売:通信ケーブル AX-KO2238 ¥1,500(税抜)
(通信用RS232C接続ケーブル、D-sub9ピン、長さ2 m)

キャリングケース (別売)

持ち運びに便利なハード型ケース

別売:AD6121-01 ¥15,000(税抜)



使用場所



ベッドサイドスケール
病棟・外来



ケンシンスケール
学校・健診




ウエイトスケール
スポーツジム・エステティック



※ 検定付だから、材料や荷物を計量する台はかりとしても使えます。



外形寸法 単位:mm

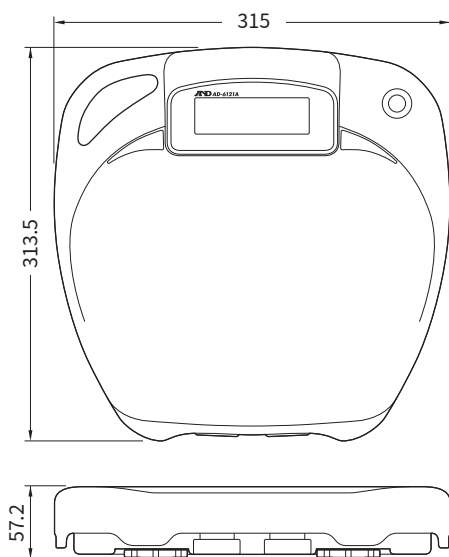

仕様

品名	ベッドサイドスケール	
型名	AD-6121A	AD-6122
精度等級	3級(※使用地域をご指定ください)	4級(※指定不要)
承認番号	第D065号	
ひょう量	150 kg	
目量	100 g	100 g (99.9 kg) 200 g (100 kg~150 kg)
使用範囲	2 kg~150 kg	
最大風袋引き量	150 kgまで	
表示方法	液晶、バックライト付(ACアダプタ使用時のみ)	
電源	ACアダプタ(AX-TB266)または単三形乾電池4本	
プザー	ON・OFF スイッチ付	
外形寸法	315(W)×314(D)×57(H) mm	
質量	約3 kg	
標準付属品	ACアダプタ(AX-TB266)、取扱説明書、保証書	
標準価格(税抜)	¥39,500	¥38,500
商品コード	AD6121A	AD6122
JANコード	4981046700689	4981046700696

オプション



通信ケーブル

AX-KO2238
¥1,500(税抜)
JANコード 4981046710657

ACアダプタ

AX-TB266
¥4,500(税抜)
JANコード 4981046618076

キャリングケース

AD6121-01
¥15,000(税抜)
JANコード 4981046712224

使用地域区分

使用地域(都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803 m/s ² ~9.807 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799 m/s ² ~9.804 m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796 m/s ² ~9.801 m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮城県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794 m/s ² ~9.799 m/s ²
⑤	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789 m/s ² ~9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6121A-ADJC-07-PR5-20cxxGP