

ベッドサイドスケール

AD-6121B / AD-6122B

持ち運びに、設置・収納に便利な薄型・軽量サイズ



AD-6121B

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

目量	100 g
ひょう量	150 kg
使用地域指定	要

※使用地域（都道府県名）を指定してください。



AD-6122B

取引・証明用
検定付

精度等級
4級

目量	100 g (99.9 kgまで) 200 g (100 kg～150 kg)
ひょう量	150 kg
使用地域指定	不要



ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計。
薄型・軽量で持ち運び、収納がやすく、今までの業務用でない仕様と低価格。
病棟、学校、健診、スポーツジム、エステティックなど幅広い分野で使用できます。

ベッドサイドスケール

外来・病棟



ケンシンスケール

学校・健診



ウエイトスケール

スポーツジム・エステティック



ベッドサイドスケール

AD-6121B / AD-6122B

■ 軽量約3 kg、取っ手付

測定する場所まで、はかりを簡単に移動でき、持ち運びがラク。

■ 本体サイズ315×314 mm

設置スペース、収納場所を取らず、邪魔にならない。

■ 計量台の高さ57 mm

狭いスキ間にも、立てた状態で収納ができる。
足上げの負担が少なく安全に計量ができる。



▼ 使用方法切替

モード	表示固定
個人	5秒間表示 (降りてから)
健診	±3 kg以内の変動は固定
はかり	固定しない

▼ バックライト表示



表示方向切替	集団健診時に便利な対面表示。 本体裏面の切替スイッチで、 液晶上の表示文字の天地が逆転します。
バックライト表示	暗い所でも見やすい。(ACアダプタ使用時のみ)
水平調整	足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、 正確な測定が可能です。
ブザー音	電源ONと測定終了時にお知らせします。 (ブザー音の入切可能)
2電源方式	用途、使用場所により使い分けができる 単三形乾電池4本またはACアダプタの2電源。 (単三形アルカリ乾電池での使用回数：約1,000回)

使用方法切替 (表示固定)	用途(個人、健診、はかり)により3種の 表示固定の切替ができて使いやすく便利です。
風袋引き	物を載せ、ゼロスイッチを入れ、 表示を0にすると風袋設定ができます。
オートパワーオフ	5～30分間で電源が切れるように ファンクションにて設定可能(5、10、15、20、25、30) 電池消耗を防ぎます。(ACアダプタの使用時はなし)
通信機能	拡張端子(RS-232C出力準拠)1チャンネル付で、 コンピュータなどに接続が可能です。 別売：通信ケーブル AX-KO2238 ¥1,500(税抜) (通信用RS232C接続ケーブル、D-sub9ピン、長さ2 m)
キャリングケース (別売)	持ち運びに便利なハード型ケース 別売：AD6121-01 ¥15,000(税抜)

仕様

品名	ベッドサイドスケール	
型名	AD-6121B	AD-6122B
精度等級	3級(※使用地域をご指定ください)	4級(※指定不要)
承認番号	第D2413号	
ひょう量	150 kg	
目量	100 g	100 g (99.9 kg) 200 g (100 kg～150 kg)
使用範囲	2 kg～150 kg	
最大風袋引き量	150 kgまで	
表示方法	液晶、バックライト付(ACアダプタ使用時のみ)	
電源	ACアダプタ(AX-TB294)または単三形乾電池4本(別売)	
ブザー	ON・OFF スイッチ付	
外形寸法	315(W)×314(D)×57(H) mm	
質量	約3 kg	
標準付属品	ACアダプタ(AX-TB294)、取扱説明書、保証書	
標準価格(税抜)	¥39,500	¥38,500
商品コード	AD6121B	AD6122B
JANコード	4981046582308	4981046582315

オプション



通信ケーブル
AX-KO2238
¥1,500(税抜)
JANコード：4981046710657




ACアダプタ
AX-TB294
¥4,500(税抜)
JANコード：4981046305419



キャリングケース
AD6121-01
¥15,000(税抜)
JANコード：4981046712224

外形寸法 単位：mm

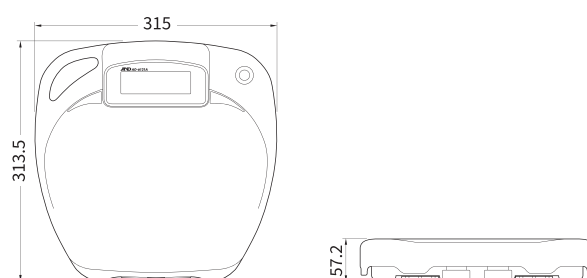

AND株式会社 エーアンドティ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763(直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904(直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日(※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年4月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AD6121B-ADJC-01-AD01-254007GP