

Discover Precision

A&D
A&D Medical

全自動身長体重計

AD-6228A

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

バリアフリー仕様
安全測定、省力化ができる
薄型50ミリの
全自動身長体重計



Stature & Weight

全自動身長体重計

AD-6228A 標準

¥680,000(税抜)

AD-6228AP プリンタ内蔵

¥750,000(税抜)

計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します

身長・体重を同時に測定、「身長」・「体重」・「BMI」値を表示

測定

■ バリアフリー仕様

床から50 mmの薄型、安全でラクに測定

床から計量面まで50 mmの薄型で、手すりも有り乗降の際、安全でなおかつ負担を軽減できます

■ 手すりバー付き

手すりにつかまったままでも、安全に測定できます

■ 測定モード切替

「身長・体重」「体重」「身長」の各測定モードに切替が可能

■ 測定終了をブザーでお知らせ

各測定モードの計測が終了すると、ブザー音でお知らせします

■ 身長測定部の高さ3段階調節

身長測定の際、測定範囲に合わせ3段階に支柱の高さ調節ができ、スピーディーな測定が行えます



レンジ1

60.0 cm～160.0 cm

レンジ2

100.0 cm～200.0 cm

レンジ3

120.0 cm～220.0 cm



表示器

キー操作で風袋引き設定

着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作によりプリセット
風袋 最大200 kgまで100 g単位で設定が可能です

■ 高速プリンタ内蔵 (AD-6228APのみ)

素早い印字、58 mm幅感熱式のプリンタ用紙で、
オートカッター付きです

2022/06/01 03:00
身長 165.2 cm
体重 (N) 60.0 kg
風袋 (PT) 1.0 kg
BMI 22.0

(N) : 正確量 NET
総量から風袋量を差し引いた
正確の質量です。
表示している体感値は
風袋を差し引いてあります。
(PT) : プリセット風袋 PresetTare
事前に記憶している
着衣などの質量を
風袋設定した値です。



移動

大型キャスター付で、移動がラク

身長測定部の支柱がコンパクトに縮められ、
キャスターや手すりバーにより、移動がラクに行えます。



拡張

拡張端子によりシステム対応

健診や院内LANなどの各システムに対応できるよう外
部入出力(RS-232C)は、標準で2chを装備、バーコ
ードリーダ(指定品)等の接続により、結果印字の際、
IDを出力することも可能です


ID 1234567890123456
2022 /06/01 03:00
身長 165.2 cm
体重 60.0 kg
BMI 22.0

Sensor

薄型重量センサ

新開発の薄型・高性能の重量センサにより、計量台の
厚みを薄くすることができ、センサを計量台の四隅に
使用することで、乗る位置にかかわらず、バラツキがな
く、高精度な計量が可能となりました。

正確

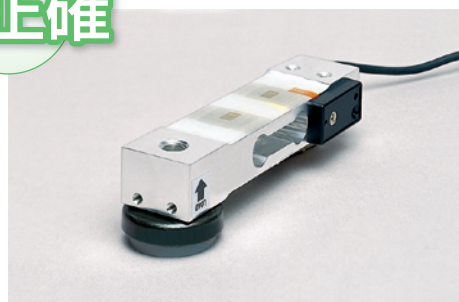

仕様

品名		全自動身長体重計	
型名		AD-6228A	AD-6228AP
体重測定部	精度等級	3級	
	ひょう量	200 kg	
	目量	100 g	
	実目量	20 g	
	最小測定量	2.0 kg	
	最大減算風袋量	200.0 kg	
	表示	7セグメントLED 文字高14.2 mm 6桁	
	計量台範囲	400(W)×340(D) mm	
身長測定部	測定範囲	レンジ1: 60.0 cm~160.0 cm レンジ2: 100.0 cm~200.0 cm レンジ3: 120.0 cm~220.0 cm	
	最小表示	0.1 cm	
	表示	7セグメントLED 文字高14.2 mm 4桁	
	精度	±2 mm	
	全体		
全体	BMI表示	7セグメントLED 文字高14.2 mm 3桁	
	時計表示	7セグメントLED 文字高10.0 mm 4桁	
	使用温湿度範囲	温度: +5℃~+35℃ 湿度: 85%RH以下(結露なきこと)	
	電源	AC100 V 50 Hz~60 Hz 50 VA	
	本体外形寸法	レンジ1: 400(W)×608(D)×1750(H) mm レンジ2: 400(W)×608(D)×2150(H) mm レンジ3: 400(W)×608(D)×2350(H) mm 収納時: 400(W)×608(D)×1535(H) mm	
	本体質量	約32 kg	
	外部入出力端子	RS232C 2 ch	
	付属品	電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4 (2本) 取扱説明書、プリンタ用紙 2巻 (AD-6228AP) のみ	
	標準価格(税抜)	¥680,000	¥750,000
	商品コード	AD6228A	AD6228AP
	JANコード	4981046701037	4981046701044

耐用期間: 設置後5年 当社データによる自己認証

(正規の保守点検など推奨された環境で使用した場合のデータです。使用状況により差異が生じることがあります。)

オプション




プリンタ用紙(5巻/箱)

AD-6228AP用
AX-PP147-S
紙幅58 mm 長さ30 m
¥5,000(税抜)
JANコード: 4981046711340


電源ケーブル

AX-KO115
¥2,500(税抜)
JANコード: 4981046712941

■ 本体

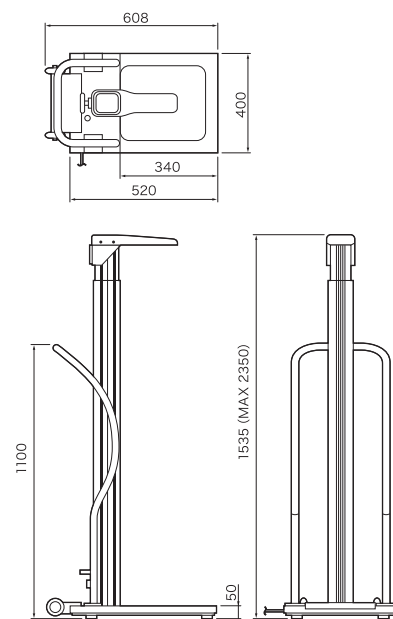

■ 表示器

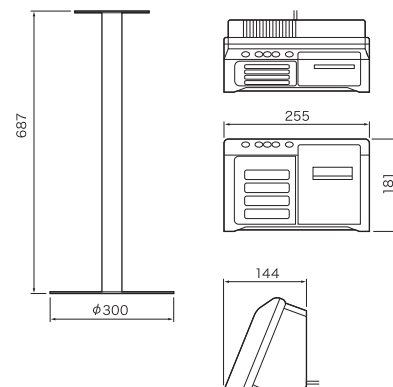

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803~9.807 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804 m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796~9.801 m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794~9.799 m/s ²
⑤	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は 0120-707-188

受付時間: 月曜日~金曜日(※祝日、弊社休業日を除く 9:00~12:00/13:00~17:00)

⚠ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。