

Technology You Can Trust

AND
A&D Medical

デジタル 身長体重計

AD-6350



精度等級
3級

取引・証明用
検定付

乗り降りがしやすい薄型
移動、収納がしやすい
軽量・コンパクトサイズ

乗り降りがしやすい低い台座

床から **65mm** ↑

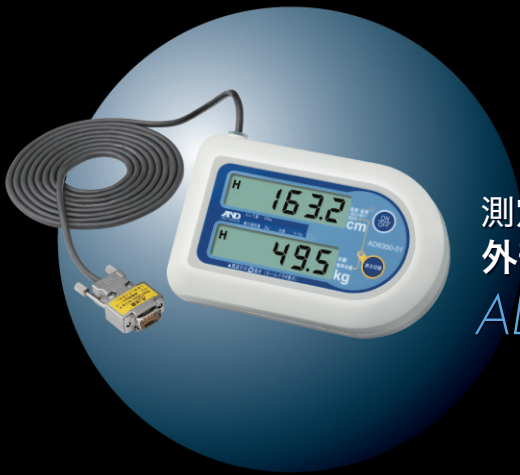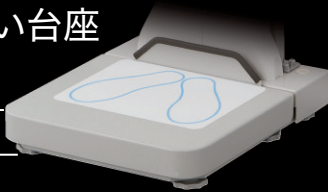

測定値が手元で見れる
外部表示ユニット (別売)
AD6350-01



デジタル 身長体重計

AD-6350

¥220,000(税抜)

床から65mmだから、乗り降りがラク
かるい12.2kgだから、移動がラク
健診業務に最適な身長体重計です。

- **床から65mmの薄型**
幼児、高齢者にも乗り降りしやすい安全設計
- **収納、移動がラクな軽量、コンパクト**
3段伸縮可能な支柱でコンパクト収納
軽い12.2kgだから移動がラク
- **便利な風袋引き機能付**
衣服などの重量(0.5kg以上)を
あらかじめ差し引いて表示
- **RS-232C出力を標準装備**
パソコンや専用プリンタ(別売)へ出力
- **専用座高計イス(別売)を装着すれば
座高計に切り替り**
幼児から大人まで測定可能
座高 55.0cm~179.0cm
- **電源は、専用ACアダプタまたは
乾電池の2方式**



表示器

- 測定モード切替 (身体計モード/はかりモード)
身体計モードでは、測定値をホールドスイッチで一時保持(約9秒間)
検診などの連続での測定の場合は、測定値を一時保持しない、はかりモード
- 体重測定の終了をブザー音でお知らせ
- オートパワーオフ
(なし、10分、30分、60分設定切替)

※ BMI・標準体重は表示しません。

測定範囲：身長 85.0~209.0cm
座高 55.0~179.0cm
体重 2.0~150.0kg
表示単位：身長・座高 0.1cm
体重 0.1kg



ホールドスイッチ

測定値を固定表示

台座部

- 立ち位置を示す足型シート
- 足を保護する、足当てカバー

キャスター 補助バー

移動、収納がラク



型式承認取得品: カルテや健診表、診断書等に記載する際の証明に使用できる体重計です。使用地域(都道府県)をご指定ください。

外部表示ユニット

AD6350-01 (別売)

標準価格 ¥60,000 (税抜)



手元で測定値が見られる

● 健診業務に最適

身長体重計本体の表示を離れた場所から確認でき、プライバシー保護に役立ちます。

● BMI・標準体重表示

表示モードの切替で、身長・体重 ◀▶ BMI・標準体重 が見られます。

仕様

表示単位 (身長)	0.1cm
表示単位 (体重)	0.1kg
通信方式	RS-232C
仕様温度範囲	0°C~+40°C
電源	単3型乾電池×4本
使用時間	約40時間
ケーブル長	約2.5m
重量	約520g
外形寸法	166×110×54mm (ケーブル、突起部含まず)



プリンタ

AD-8123-100

¥80,000 (税抜)

プリンタを接続専用ケーブルで身長体重計に継ぎ、ホールドスイッチを装着すれば、測定値や肥満度判定等が印字できます。

モード切替で

集団検診か個人別肥満度検診 (BMIまたは、ブローカ変法による肥満度判定) の選択、印字ができます。

プリント印字例

集団検診モード

```

No. 1  シェアウ = 182.0 cm
      967.0 kg
      [ アダプタ: 0.0 kg ]

No. 2  シェアウ = 157.9 cm
      967.0 kg
      [ アダプタ: 0.0 kg ]

No. 3  シェアウ = 177.5 cm
      967.0 kg
      [ アダプタ: 0.0 kg ]
    
```

連続番号、身長・体重

BMIによる肥満判定

```

シェアウ : 175.3 cm
967.0 kg : 67.2 kg
BMI : 21.9
アダプタ: アダプタ
***** ビロカ 変法 システム *****
アダプタ : 56.8 kg - 4 kg
アダプタ : 56.9 kg - 76.7 kg
アダプタ 1 : 76.8 kg - 92.1 kg
アダプタ 2 : 92.2 kg - 107.5 kg
アダプタ 3 : 107.6 kg - 122.8 kg
アダプタ 4 : 122.9 kg - 138.1 kg
      [ BMI 変法 ]
      [ アダプタ: 0.0 kg ]
    
```

身長・体重 BMI
肥満度判定

ブローカ変法による 肥満度%表示


```

シェアウ : 169.7 cm
967.0 kg : 68.9 kg
ブローカ変法 :
56.4 kg - 68.9 kg
ブローカ変法 : 62.7 kg
アダプタ : + 9.9 %
      [ アダプタ変法 ]
      [ アダプタ: 0.0 kg ]

No. 1  シェアウ = 182.0 cm
      967.0 kg
      [ アダプタ: 0.0 kg ]
    
```

身長・体重、標準体重
肥満度%表示

拡張性《健診データ収集システム》

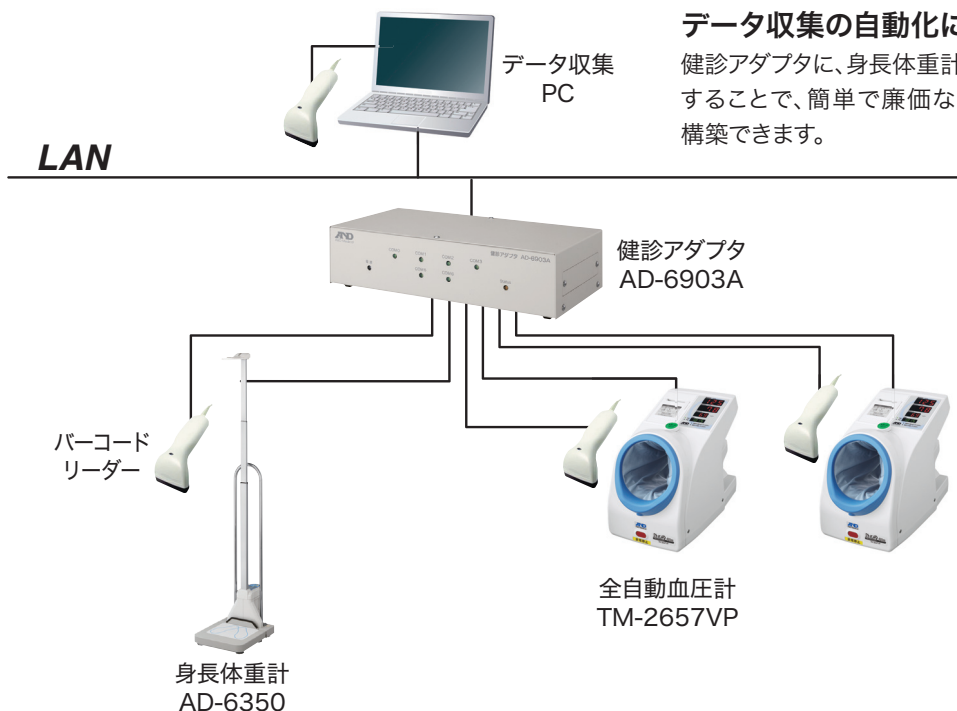


手書き・手入力の運用を、 データ収集の自動化に

健診アダプタに、身長体重計や他の測定機器を接続することで、簡単に廉価なデータ収集システムが構築できます。

AD-6350 仕様

機種名/型名	デジタル身長体重計 AD-6350	
商品コード	AD6350	
JANコード	4981046700856	
	身長(座高)計部	体重計部
検出方法	透過式フォト・インタラプタ方式	ロードセル方式
測定方法	支柱3段伸縮式	
測定範囲	身長 85.0cm~209.0cm 座高 55.0cm~179.0cm(30cm 専用イス使用)	2.0kg~150.0kg
表示	デジタル4桁LCD表示	
表示単位	0.1cm(1mm)	0.1kg(100g)
精度	±1mm + 1 digit	±0.1kg
機能	不完全収納時のErr表示(基点検出機能) ゼロセット(風袋引き)機能、表示安定報知機能 表示値保持(ホールド)機能、出力(コンピュータ・プリンタ・ワイヤレスモニタ)機能、 オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能	
使用温度	+5°C~+35°C	
電源	AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)または、単2形乾電池4本	
質量/外形寸法	12.2kg/330(W)×492(L)×1035(H)mm	
出力形式	RS-232C、微弱無線	
材質	支柱/アルミ、台座/鉄、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス	
付属品	ACアダプタ、ホールドスイッチ、電池ケース、取扱説明書	

外形寸法(mm)

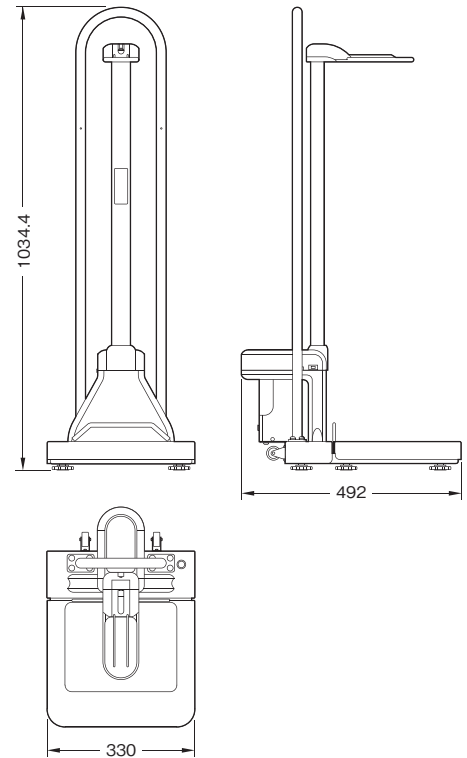

オプション

	商品コード		JANコード
外部表示ユニット	AD6350-01	¥60,000(税抜)	4981046713559
座高計イス(30cm)	AD6226-02	¥10,000(税抜)	4981046711647
ホールドスイッチ	AD6226-03	¥3,000(税抜)	4981046712118
ACアダプタ	AD6226-04	¥4,000(税抜)	4981046711845
デスクトッププリンタ	AD8123-100 00006	¥80,000(税抜)	4981046711739
RS-232C通信ケーブル(2m)	AX-KO3704-200	¥8,500(税抜)	4981046712682
プリンタペーパー(10巻)	AX-PP123-S	¥11,000(税抜)	4981046711517



ホールドスイッチ
AD6226-03



ACアダプタ
AD6226-04



RS-232C通信ケーブル
AX-KO3704-200



プリンタペーパー
AX-PP123-S

地域別重力加速度一覧

重力加速度と使用可能な地域を表しています。ご購入の際は、使用地域(都道府県)をご指定ください。

使用地域区分別 重力加速度の範囲	使用可能地域(都道府県)
9.803~9.807m/s ²	北海道
9.800~9.804m/s ²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県
9.798~9.802m/s ²	宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県
9.796~9.800m/s ²	栃木県、富山県、石川県、福井県、千葉県、群馬県、埼玉県、神奈川県、東京都(除島)、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、和歌山県、奈良県、鳥根県、岡山県、鳥取県、山口県、広島県
9.794~9.798m/s ²	山梨県、長野県、岐阜県、神奈川県、東京都(全域)、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、岡山県、鳥取県、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県(除島)、宮崎県
9.791~9.795m/s ²	宮崎県、鹿児島県(島)
9.789~9.792m/s ²	沖縄県

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・ディME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **イー・アンド・ディ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6350-ADJC-05-PR4-15000