

Dr.Pro Touch



Dr. Pro Touch TM-2485は、使いやすさを追及した携帯型、通信機能付き血圧計の専用解析装置です。タッチパネルによる操作性とわかりやすいインターフェースによって簡単に解析操作が行えるようになりました。



通信ポート 血圧計との通信ポート
LANコネクタ オプションプリンタ接続用



血圧計フォルダ
 解析時に血圧計を設置することができます。




USBポート
 オプションプリンタ接続用に2ポート装備、通信ケーブル、USBメモリーデータ転送。

タッチパネル画面
 見やすいカラー液晶で画面をタッチして操作することができます。

傾斜台
 傾斜台を装着することで、操作が行いやすい角度になります。

レポート印刷までの運用例

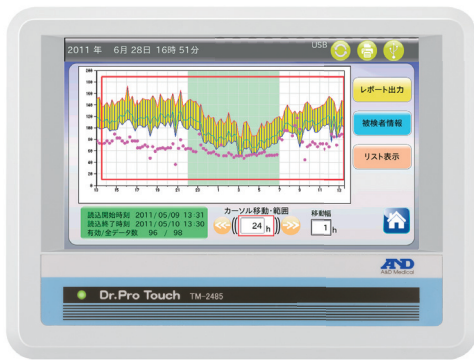

USBへ解析レポートデータ (PDF、CSVファイル) を保存



お使いの**パソコン**環境でPDFファイルを読み込みデータの保存や印刷を行います。

*お使いのパソコンでPDFファイルを読み込むにはPDFファイルを読み込むためのソフトが必要になります。



専用プリンタと接続してプリンタで解析レポート結果を印刷します。


かんたん操作




接続の自動認識
 特別な設定は必要なし！
 携帯型自動血圧計とDr. Pro Touchを専用の通信ケーブルで接続すると通信可能となります。



アイコンによる状態確認
 通信状態やUSB、プリンタの接続状態をアイコンで表示。

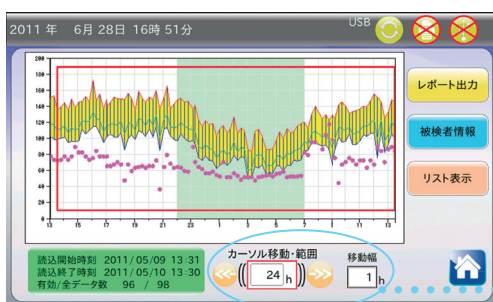

データ取込画面
 24時間データを画面上で確認でき、データ取込の範囲選択がカーソル操作で行えます。

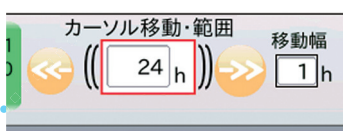

取込データの選択
 カーソル(赤枠)時間の設定など、かんたんに行えます。

サポート機能



取扱い説明

携帯型自動血圧計や本体の取扱いを画像と音声で説明します。



用語解説

グラフ表示などに用いられる用語について説明します。




行動記録表

本体にPDFファイルの行動記録表を保存、プリンタで印刷し使用することができます。

各種グラフ表示




サマリー

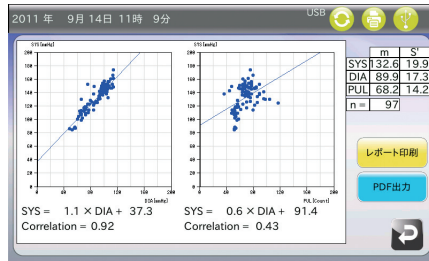


相関図




HBI

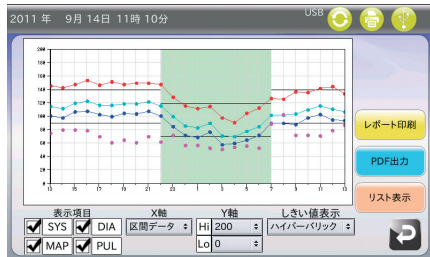

平均トレンド

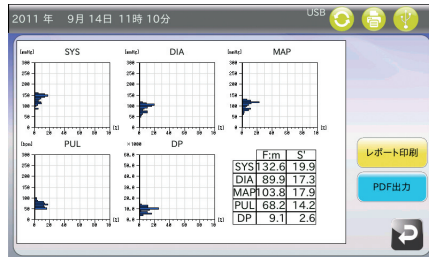


ヒストグラム

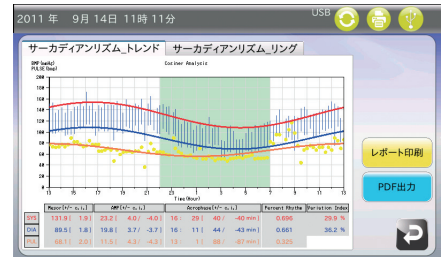


サーカディアンリズム

各種レポート形式

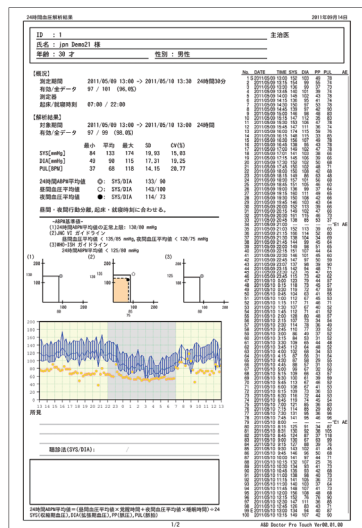


24時間レポート

各種ガイドラインに対応した測定結果を印刷するレポート形式です。

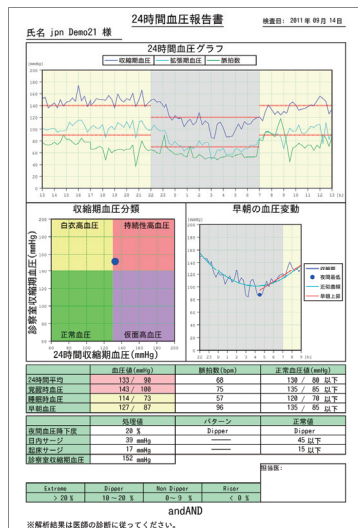

簡易レポート

24時間血圧グラフ、収縮期血圧分類、早朝血圧変動などA4サイズ1枚に印刷できるレポート形式です。

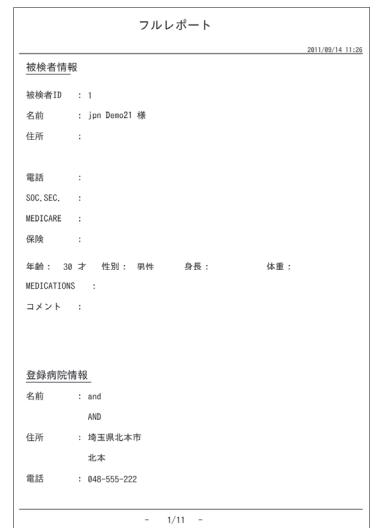

フルレポート

血圧リストデータ、すべてのグラフ表示を印刷するレポート形式です。

仕様

型名	TM-2485
販売名	解析ターミナル(Dr. Pro Touch)
表示	バックライト付きTFTカラー液晶表示 (7インチサイズ、800×480 dot)
外形寸法	約203(W)×153(D)×58(H)mm 突起部を除く
質量	約1.0kg(本体のみ)
電源	ACアダプタ: AX-TB252 入力: AC100V 50-60Hz 15VA 出力: DC12V
電撃保護形式	クラスII
通信機能	シリアル通信: EIA RS-232C規格準拠 USB通信: USB 1.1規格準拠
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
動作環境	温度: +10~+40°C 湿度: 30~85%RH 気圧: 70~107kPa
JANコード	4981046701273
標準価格(税抜)	¥250,000

標準構成

本体、傾斜台、ACアダプタ、通信ケーブル、取扱説明書

関連製品



携帯型自動血圧計 TM-2433

医療機器承認番号: 21000BZZ00455000
JANコード: 4981046701402
標準価格: ¥250,000(税抜)

オプション品 ●印は標準付属品



● ACアダプタ

商品コード: AX-TB252
JANコード: 4981046713450
標準価格: ¥6,000(税抜)

NO IMAGE

レーザープリンタ

オープン価格
※ご注文の際は、営業担当者まで
ご連絡ください。



● 通信ケーブル(ステレオミニジャック)

商品コード: AX-KO3676-1500
JANコード: 4981046711920
標準価格: ¥3,000(税抜)



USB-RS232C 変換ケーブル 2M

商品コード: AX-KO3057-200
JANコード: 4981046711920
標準価格: ¥1,800(税抜)



USBフラッシュメモリ 4G

商品コード: AS-GHUF2G
JANコード: 4981046713443
オープン価格



通信機能付血圧計 UA-767PC

医療機器承認番号: 219AHBZX00019000
JANコード: 4981046027625
標準価格: ¥15,000(税抜)

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者: 株式会社イー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL.048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*TM2485-ADJC-03-PR4-16205