


# Dr.Pro Touch 2




携帯型自動血圧計  
TM-2441

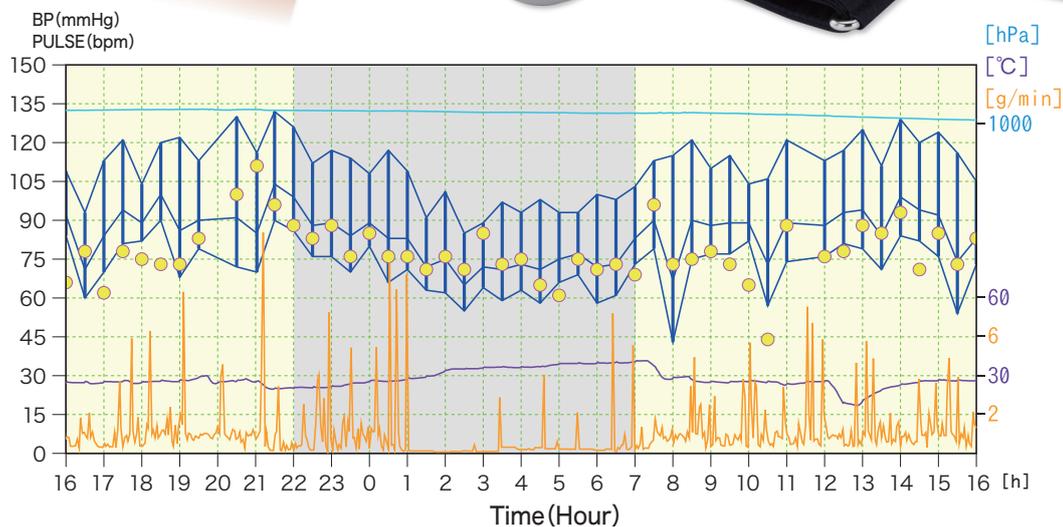

Dr. Pro Touch2はマルチセンサー搭載携帯型血圧計TM-2441専用解析装置です。タッチパネル式の従来の使いやすさはそのままに様々な解析が可能になりました。

## マルチセンサー対応・・・活動度、気温、気圧

血圧・脈拍に加え測定環境も記録

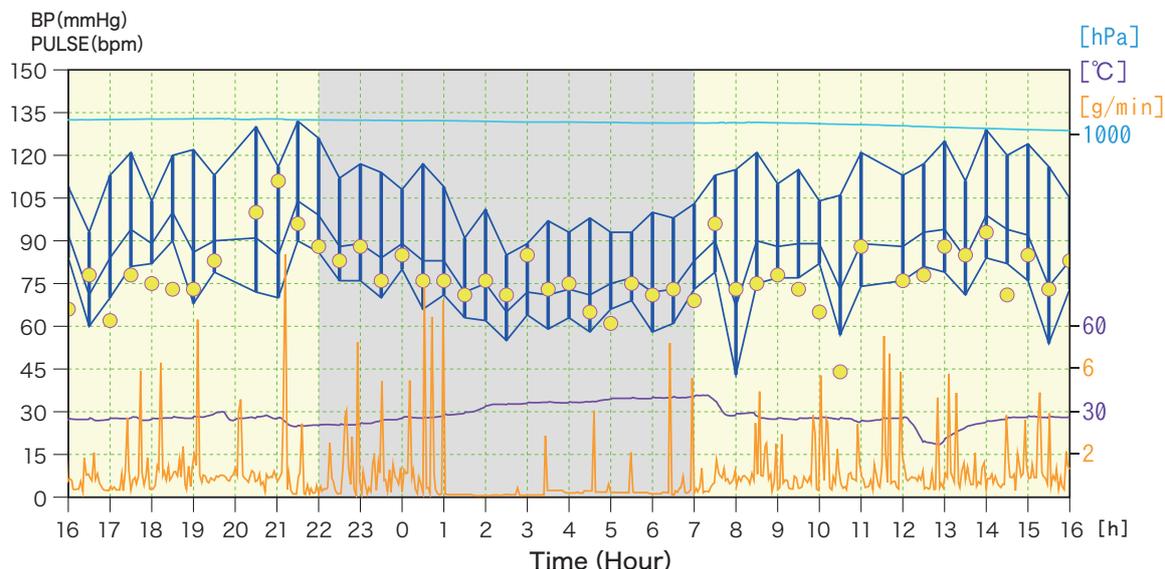

## かんたん操作・・・オートスタート、ストップ機能対応



自己測定		
0	測定値	ON
同期	スリープ	OFF
測定間隔(分)設定		OFF
開始時刻		OFF
動作時間		25時間

### タッチパネル画面

- ・カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作

### オートスタート、ストップ機能対応 《新機能》

- ・患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に (ABPMモード)
- ・家庭血圧モード設定 (一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)
- ・診察室血圧モード設定 (一機会測定回数、測定間隔)

#### ● レポート印刷までの運用例




USBへ解析レポートデータ (PDF、CSVファイル) を保存

お使いのパソコン環境でPDFファイルを読み込みデータの保存や印刷を行います。

# TM-2441のIHB検出機能に対応

4:00	93	63	30	75
4:30	98	58	40	65
5:00	93	66	27	61
5:30	93	69	24	75
6:00	100	58	42	71
6:30	98	61	37	73

**不規則脈波 IHBとは**  
**IHB (Irregular Heart Beat)**とは脈間隔の「ゆらぎ」を意味しています。  
 測定中の脈間隔のうち、平均の脈間隔から±15%以上差のある脈をIHBと呼んでいます  
 \* 自動測定時 (ABPMモード)は25%

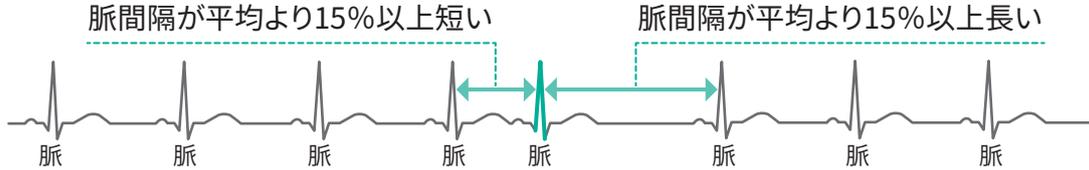


\* 脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。


## 各種グラフ表示



サマリー

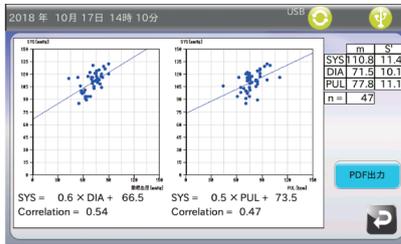


相関図

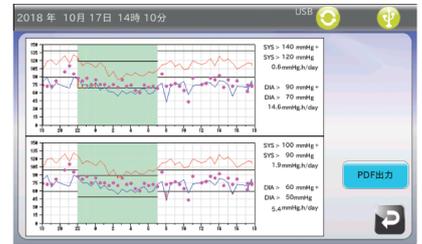

HBI



トレンドグラフ

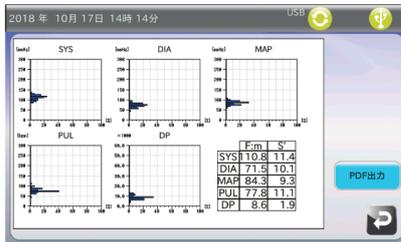


ヒストグラム




サーカディアンリズム

## 各種レポート形式

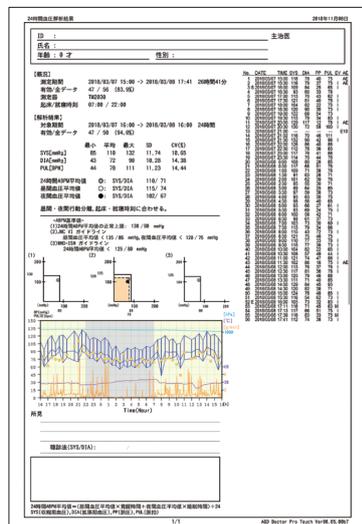


24時間レポート

各種ガイドラインに対応した測定結果を印刷するレポート形式です。

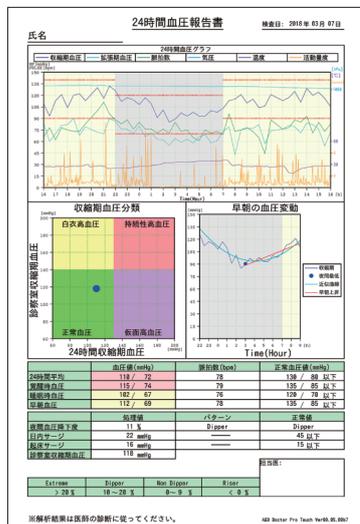

簡易レポート

24時間血圧グラフ、収縮期血圧分類、早朝血圧変動などA4サイズ1枚に印刷できるレポート形式です。

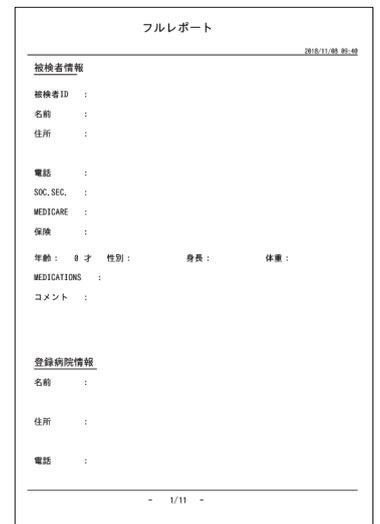

フルレポート

血圧リストデータ、すべてのグラフ表示を印刷するレポート形式です。

## 仕様

販売名	携帯型自動血圧計TM-244のオプション品
名称	解析ターミナル
品番	TM-2486
認証番号	229AHBZX00007000
外形寸法	203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm (突起部を除く)
質量	約1.0kg
電源	本体 入力：12V 〓 600mA 専用ACアダプタ 入力：100V～ 50-60Hz 15VA 出力：12V 〓 1A
電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅡ機器
表示	バックライト付きTFTカラー液晶表示 (7インチサイズ、800×480 dot)
本体メモリ	約500データ (記録可能なデータ数は目安です。データ種類により変化します。) ※ 本体メモリへの保存ファイル形式は血圧データのみとなります。 ① CSVファイル：数値データファイル ② DATファイル：解析ソフト「TM-2430-15」ファイル形式
USBメモリ出力ファイル	付属のUSBメモリに各種ファイルを出力します。 ① CSVファイル：数値データファイル ② DATファイル：解析ソフト「TM-2430-15」ファイル形式 ③ 環境ファイル：envフォルダに、環境データ付き血圧値と活動量データのCSVファイル形式 ④ PDFファイル：各種出力レポートのファイル形式
通信機能	シリアル通信：EIA RS-232C規格準拠 USB通信：USB 1.1規格準拠
動作環境	温度：+10～+40℃ 湿度：30～85%RH (結露なきこと)
輸送/保存環境	温度：-20～+60℃ 湿度：10～95%RH (結露なきこと)
使用/保存気圧範囲	700～1060 hPa
作動モード	非連続作動：最長作動時間及び最短休止時間に、特に指定は無い
電磁環境適合性 (EMC) 適合規格	本製品は、EMC規格 (IEC60601-1-2:2007) に適合しています。
耐用期間	設置後5年 当社データによる自己認証。(正規の保守点検などの推奨された環境で使用した場合のデータです。使用状況により差異が生じることがあります。)
JANコード	4981046160766
標準価格 (税抜)	¥280,000

本機の日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のMiniWnnを使用しています

## 標準構成

本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書

## オプション品 ●印は標準付属品



● ACアダプタ  
商品コード：AX-TB252  
JANコード：4981046713450  
標準価格：¥6,000 (税抜)



● USBフラッシュメモリ 4G  
商品コード：AS-GHUF2G  
JANコード：4981046713443  
オープン価格

## 関連製品



携帯型血圧計 TM-2441

## 定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。  
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

## ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129  
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815  
製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ  
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。  
\*TM2486-ADJC-01-PR1-19204GP