

見やすい使いやすい  
医療用 自動血圧計

# Vital Note

医療機器承認番号 21700BZZ00294000

ダブル表示だから、見やすい! 使いやすい!

測定値は、大きく見やすい視認性に優れた蛍光表示(LED)  
各種の機能設定は、一目で確認できて使いやすい液晶画面表示(LCD)

外来・検診に



TM-2580

¥180,000 (税抜)

病棟に



TM-2581

¥240,000 (税抜)

## 視認性を高めたW表示・血圧計

- ★ 見やすく、判りやすいダブル表示
- ★ 新・血圧モジュールの採用で信頼性アップ
- ★ 広範な通信メディア、システムに対応できる拡張性
- ★ 充実した便利な付加機能  
マニュアル・平均測定モード、体動サイン、脈同期音、脈波レベル表示
- ★ 約1.5 kgの軽量ボディ、スマートなコンパクトスタイル

## AVG測定

- 複数回測定、平均の値を表示

## 監視・アラーム

- 最高血圧、脈拍数の各アラーム上・下限が設定でき監視
- アラームの発生時には、アラームランプが点滅または点灯、該当の測定値表示の点滅、アラーム音の鳴動
- アラームの優先度によりアラームランプは、中レベルであれば点滅、低レベルは点灯



## 血圧

- 加圧値設定は、被検者に最適な圧力まで自動加圧または、140 mmHg～220 mmHgまで20 mmHg刻みの随時設定
- マニュアル測定モードは、聴診器を用いた聴診法により血圧を測定
- 平均測定モードは、自動的に血圧を複数回測定し、その平均値を表示
- 血圧測定中の脈検知に同期してブザー音が鳴動

## 表示

- 最高血圧値、最低血圧値、脈拍数は、見やすく大きなLED表示、各種の機能設定は、確認しやすいよう液晶画面にまとめて表示
- 測定値を気にする方への配慮から、測定値を表示しないブランク表示
- 測定中に体動を検知した場合に「♡」を点灯
- 過去の測定値を最大10件分呼出表示できる前回値表示
- 測定中の脈検知毎に脈波の大きさに応じたレベルを表示


## 拡張オプション

### 外来



TM-2581 + TM2570-02

### 検診

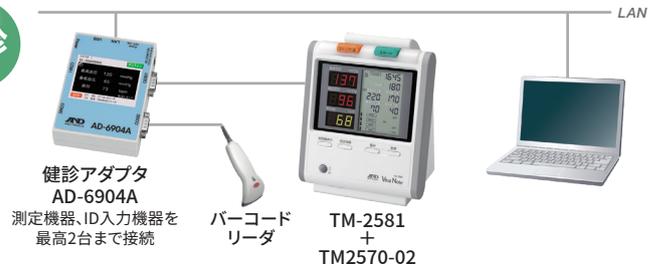

健診アダプタ AD-6904A  
測定機器、ID入力機器を最高2台まで接続  
バーコードリーダ  
TM-2581 + TM2570-02

## 仕様

型名	TM-2580	TM-2581
品名	バイタルノート	
血圧測定方式	オシロメトリック方式	
圧力検出方法	静電容量型圧力センサ	
圧力測定範囲	0 mmHg～300 mmHg	
圧力精度	±3 mmHg	
測定範囲	最高血圧:40 mmHg～270 mmHg、最低血圧:20 mmHg～200 mmHg、脈拍:30～250拍/分	
血圧インターバル測定	—	測定間隔:OFF、1、3、5、10、15、20、30、60、90、120分 *1分間隔測定は最長12分間継続し、その後5分間隔
表示方法	LED:7セグメント、液晶ディスプレイ	
メモリデータ数	10データ	
電源	AC100 V (50 Hz-60 Hz)	
消費電力	25 VA	
外形寸法	177 (W) × 211 (H) × 136 (D) mm	
本体質量	約1.5 kg	
監視機能	—	最高血圧、脈拍数の上・下限アラーム時:測定値の点滅、アラーム音の鳴動、アラームランプの点滅、点灯
標準付属品	本体、MEラテックスフリーカフアダルト12 cm、エアホース(2 m、1.5 m各1本)、ACアダプタ、取扱説明書、添付文書、保証書	
販売名	患者監視装置	
承認番号	21700BZZ00294000	
一般の名称	多項目モニタ	
JMDNコード	33586002	
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
JANコード	4981046700054	4981046700047
商品コード	TM2580	TM2581
標準価格(税抜)	¥180,000	¥240,000

## オプション・別売品

**MEラテックスフリーカフ**  
アダルト 12 cm  
TM-CF301A  
¥8,000 (税抜)  
JANコード: 4981046712668  
適応腕周範囲: 20 cm～33 cm

ラージ 15 cm  
TM-CF401A  
¥9,900 (税抜)  
JANコード: 4981046712675  
適応腕周範囲: 30 cm～41 cm

スモール 9 cm  
TM-CF201A  
¥9,900 (税抜)  
JANコード: 4981046712651  
適応腕周範囲: 14 cm～22 cm

**エアホース (コネクタ付)**  
1.5 m  
TM9131BL-150  
¥4,000 (税抜)  
JANコード: 4981046710268

2 m  
TM9131BL-200  
¥4,000 (税抜)  
JANコード: 4981046710251

**架台**  
TM-ST100B  
¥60,000 (税抜)  
JANコード: 4981046163972

**RSユニット**  
TM2570-02  
¥60,000 (税抜)  
JANコード: 4981046700115

**キャリングケース CC-100**  
TM-OP100  
¥65,000 (税抜)  
JANコード: 4981046712156

### 定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

### ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

**0120-707-188**

受付時間:月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

**AND 株式会社 エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者:株式会社エー・アンド・デイ 〒364-8585埼玉県北本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。  
※ 本カタログは事業者向けです。 \*TM2580-ADJC-04-PR4-21400GP