

生体情報モニタ

TM-2590

Discover Precision

A&D
A&D Medical

Vital Sensor *S*

Simple

Smart

Slim

Simple
Smart
Slim



AND 株式会社 エーアンドデー

Vital Sensor S

生体情報モニタ TM-2590「バイタルセンサS」は、3つの“S”をコンセプトに誕生しました。

パラメータの基本性能を強化。豊富なオプションにて様々な環境でお使いいただける生体情報モニタです。

Simple 操作はシンプル

Smart 機能は賢く

Slim 薄型・軽量コンパクト



Simple



3パラメータをより使いやすく凝縮

- 心電図 (ECG)、呼吸 (Resp)
- 非観血圧 (NIBP)
- 動脈血酸素飽和度 (SpO2)・・・SpO2センサオプション
- 体温 (Temp)・・・サーミスタプローブオプション

360°視認性の良いパイロットランプ

アラーム、心拍・脈拍同期

ダイレクトファンクション

よく使用するスイッチは、機器上部へ配置



タッチパネルディスプレイ

人の感性に直結

見やすいLEDバックライト



Smart


医療従事者をサポートするユニークな機能を搭載
充実したオプション

A&D独自の血圧測定アルゴリズム 測定エラーの少ない、独自アルゴリズム

RPT=REPUTE搭載

(REal time PULse TriggEr レピュート)

急激な脈変動を検知し、血圧測定を開始する

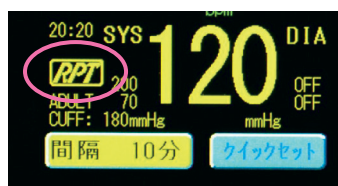

血圧セーフティ表示機能

血圧値は測定後一定時間 (OFF、5、10、30、60分より選択)
経過すると、古いデータとして、スリット表示に変わります。




血圧測定終了時




一定時間経過後

RPP: Rate Pressure Product表示機能

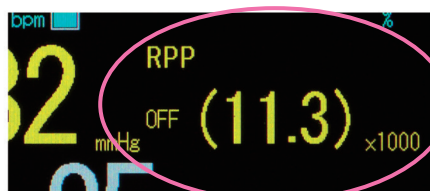

RPP
= 最高血圧値
× 脈拍数

SI: Shock Index表示機能

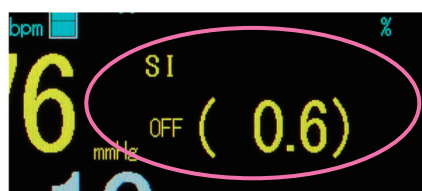

SI
(ショックインデックス)
= 心拍数 (脈拍数)
/ 収縮期血圧

※ MAP (平均血圧)、RPP、SIは、機能設定により
選択表示と成ります。

バッテリー駆動 2時間以上※

※ 条件: 血圧測定間隔5分時、輝度設定[2]、
新品バッテリー、25 °C



バッテリーユニットS
TM-2590-12
(オプション)


血圧変化追従測定終了音

インターバル測定時には、前回値と比較して、
変化が大きい場合は、音程変化でお知らせ!

前回測定値		今回測定値		測定終了音
SYS	DIA	SYS	DIA	
134	80	150	93	ピン・ポーン↑ ♪ ↗
		131	81	ピン・ポーン→ ♪ →
		110	74	ピン・ポーン↓ ♪ ↘

レイアウトフリー

架台、ワンタッチ取付金具、
ストレッチャ金具など、本体の
セッティングが多彩

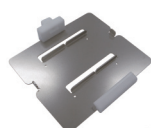

ワンタッチ取付金具S
TM-STA003



TM-2590/2125 ストレッチャ金具
TM-STA005








ポール取付金具S TM2590用
TM-STA006



架台
TM-ST100B

充実したディスプレイパターン

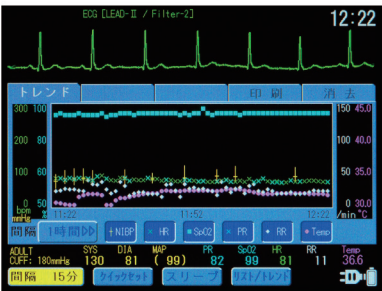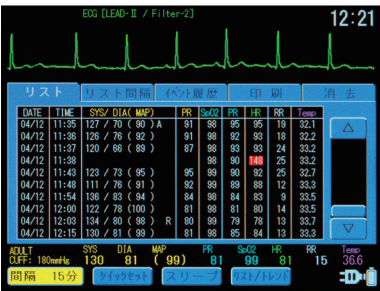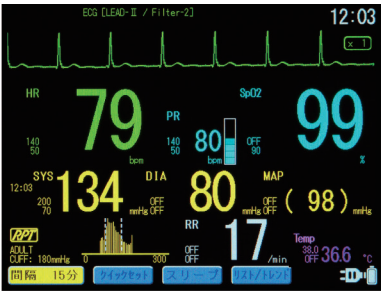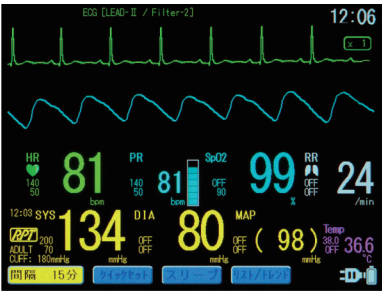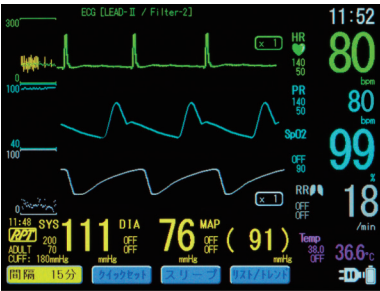

システムアップ

リモートモニタ **VitalStation S6** TM-2126との組合せにより、遠隔でのモニタリングが可能となります。
通信距離は見通し約30 m (但し、施設の状況により異なります。)



無線ユニットはオプションです

Slim

薄型・軽量コンパクト

6.5 inchディスプレイを搭載しながらも重量は1.9 kg。
奥行きも95 mmとスリムに。



6.5インチ



オプション／別売品 ●は標準付属品



プリンタユニットS
商品コード TM2590-01
JANコード 4981046713085
¥80,000 (税抜)



バッテリーユニットS
商品コード TM2590-12
JANコード 4981046713092
¥35,000 (税抜)



ユニットS内部交換用バッテリー
商品コード AX-CGR-B/271
JANコード 4981046713214
¥28,000 (税抜)



● ACアダプタ
商品コード AX-TB246
JANコード 4981046713016
¥30,000 (税抜)



● 電源コード
商品コード AX-KO1108
JANコード 4981046712002
¥1,000 (税抜)



架台
商品コード TM-ST100B
JANコード 4981046712699
¥60,000 (税抜)



MEラテックスフリーカフ
チャイルド 7cm
商品コード TM-CF101A
JANコード 4981046713733
¥9,900 (税抜)


MEラテックスフリーカフ
スモール 9cm
商品コード TM-CF201A
JANコード 4981046712651
¥9,900 (税抜)

● MEラテックスフリーカフ
アダルト 12cm
商品コード TM-CF301A
JANコード 4981046712668
¥8,000 (税抜)

MEラテックスフリーカフ
ラージ 15cm
商品コード TM-CF401A
JANコード 4981046712675
¥9,900 (税抜)



カフ布 アダルト
商品コード TM-CF301A-01
JANコード 4981046713412
¥4,500 (税抜)

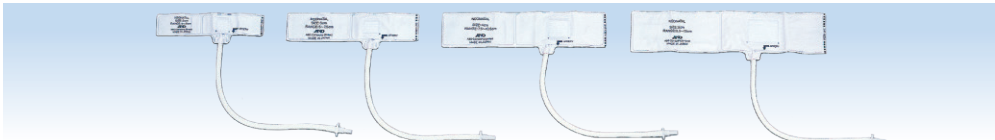

ディスボカフ 新生児用 2cm幅
商品コード TM9155
JANコード 4981046710091
適応腕周範囲: 4cm~5cm 入数: 10枚
¥10,000 (税抜)

ディスボカフ 新生児用 3cm幅
商品コード TM9156
JANコード 4981046710084
適応腕周範囲: 5cm~7.5cm 入数: 10枚
¥10,000 (税抜)

ディスボカフ 新生児用 4cm幅
商品コード TM9157
JANコード 4981046710077
適応腕周範囲: 7.5cm~10.5cm 入数: 10枚
¥10,000 (税抜)

ディスボカフ 新生児用 5cm幅
商品コード TM9158
JANコード 4981046710060
適応腕周範囲: 8.5cm~13cm 入数: 10枚
¥10,000 (税抜)



● エアホース (1.5 m)
商品コード TM9131BL-150
JANコード 4981046710268
¥4,000 (税抜)



● エアホース (2.0 m)
商品コード TM9131BL-200
JANコード 4981046710251
¥4,000 (税抜)



エアホース (3.5 m)
商品コード TM9131BL-350
JANコード 4981046713702
¥4,200 (税抜)



エアホース 新生児用 2 m
商品コード TM9131UN-200
JANコード 4981046710190
¥5,000 (税抜)

エアホース 新生児用 3.5 m
商品コード TM9131UN-350
JANコード 4981046710183
¥6,000 (税抜)




● ECGケーブルS
商品コード AX-KO3503
JANコード 4981046713047
¥22,000 (税抜)



● 3極ECGリード線 Sクリップ
商品コード AX-KO3504
JANコード 4981046713054
¥18,000 (税抜)



3極ECGリード線 Sピン
商品コード AX-KO3505
JANコード 4981046713061
¥18,000 (税抜)

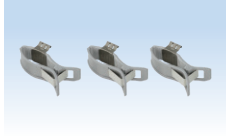

ハートクリップ 3個入り
商品コード AX-HC-03A
JANコード 4981046712378
¥10,000 (税抜)



3Mモニタリング電極 2228 (50枚入り)
商品コード AX-ES2228
JANコード 4981046713276
¥6,000 (税抜)



サーミスタ温度プローブ (体表用)
商品コード AS-409J
JANコード 4571374320064
¥45,000 (税抜)



サーミスタ温度プローブ
(成人直腸用)
商品コード AS-401J
JANコード 4571374320019
¥30,000 (税抜)



サーミスタ温度プローブ
(小児直腸用)
商品コード AS-402J
JANコード 4571374320040
¥40,000 (税抜)



リモートスイッチ (デンタルスイッチ)
商品コード AX-KO2841
JANコード 4981046712170
¥8,000 (税抜)



デュラセンサ DS-100A
商品コード AX-SPDS-100A
JANコード 4981046710619
¥75,000 (税抜)



● SpO2延長ケーブル 3.3 m
商品コード AX-SPDOC-10
JANコード 4981046710626
¥20,000 (税抜)



マックスファスト
商品コード AX-MAX-FAST
JANコード 4981046711296
¥235,200 (税抜)



ネルコアオキシセンサIII D-20
商品コード AX-OXIMAXD-20
JANコード 4981046712620
¥158,400 (税抜)



ネルコアオキシセンサIII D-25
商品コード AX-OXIMAXD-25
JANコード 4981046712613
¥158,400 (税抜)


ネルコアオキシセンサIII D-25L
商品コード AX-OXIMAXD-25L
JANコード 4981046711289
¥158,400 (税抜)




ネルコアオキシセンサIII I-20
商品コード AX-OXIMAXI-20
JANコード 4981046712644
¥158,400 (税抜)



ネルコアオキシセンサIII N-25
商品コード AX-OXIMAXN-25
JANコード 4981046712637
¥158,400 (税抜)

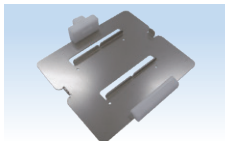

ワンタッチ取付金具S
商品コード TM-STA003
JANコード 4981046713252
¥20,000 (税抜)

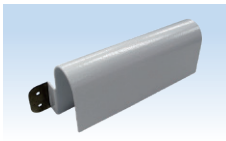

TM-2590/2125 ストレッチャ金具S
商品コード TM-STA005
JANコード 4981046713399
¥15,000 (税抜)



ボール取付金具S TM2590用
商品コード TM-STA006
JANコード 4981046713597
¥20,000 (税抜)



プリンタ用紙 (白紙) 5巻入り
商品コード AX-PP132-S
JANコード 4981046711364
¥3,000 (税抜)



外部IFボード (TELE)
商品コード TM2590-03
JANコード 4981046713238
¥22,000 (税抜)



外部IFボード (RS232C)
商品コード TM2590-02
JANコード 4981046713221
¥20,000 (税抜)



通信ボードケーブル 2 m
商品コード AX-KO3077-2000
JANコード 4981046712064
¥8,000 (税抜)



無線ユニット
商品コード TM2140-10
JANコード 4981046700436
¥130,000 (税抜)

仕様

品名	バイタルセンサS TM-2590
型名	TM-2590
販売名	バイタルセンサS TM-2590
承認番号	22300BZX00135000
類別	機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般的名称	多項目モニタ
JMDNコード	33586002
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	4981046701129
商品コード	TM2590
表示装置	バックライト付 TFTカラー液晶(6.5インチ) タッチパネル式
測定方式	オシロメトリック方式
外形寸法	プリンタ無 : 200 (W) × 165 (H) × 95 (D) mm (突出部含まず) プリンタ有(オプション) : 244 (W) × 165 (H) × 95 (D) mm (突出部含まず)
質量	プリンタ無 : 約1.9 kg (オプションバッテリーは含みません) プリンタ有 : 約2.0 kg (オプションバッテリー、プリンタ用紙は含みません)
電源	AC100 V 50 Hz-60 Hz
消費電力	65 VA
付属品	安定台、ACアダプタ、電源コード、ECGケーブルS、3極ECGリード線S(クリップ)、 SpO ₂ 延長ケーブル、MEラテックスフリーカフアダルト12 cm、 エアホース(1.5 m、2.0 m 各1本)、取扱説明書、添付文書
電源に対する保護の形式	クラス I (ACアダプタ使用時) 内部電源機器(バッテリー使用時)
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
標準価格(税抜)	¥695,000

測定項目

心電図(ECG)、呼吸(Resp)、非観血圧(NIBP)、
動脈血酸素飽和度(SpO₂)、体温(Temp)

関連商品



リモートモニタ
バイタルステーションS6

商品コード: TM-2126-JC16
JANコード: 4981046304757
標準価格(税抜): ¥450,000
認証番号: 301AHBZX00018000



※UM-102

血圧点検セットA

商品コード: TM-OP103
JANコード: 4981046700481
標準価格(税抜): ¥50,000
※UM-102は別途購入が必要です

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
製造販売業者: 株式会社エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※TM2590-ADJC-09-PR9-20701GP