

デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

 取引・証明用
 検定付

 精度等級
 3級

ベッドに“はかり”をプラス、寝たままで安全に体重を測定
 変化量を確実にモニタリングします



※ サイドガード、マットレス、集中ロックはオプション



透析患者や寝たきり患者の体重変化量をリアルタイムに測定、
 介助者に負担をかけず、確実に体重モニタリングが出来る検定付き体重計です。

- 体重変化量、現在体重、治療前体重、アラーム設定が一目で確認できる同時表示
- 外部出力端子 (RS-232C) を標準装備、LAN接続オプションでシステム連携可能
- 手元リモコン操作で背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さ調整※

※ 3モータ電動ベッドのみ

表示部

見やすい表示

治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認できます。LEDは識別しやすく2色で色分け表示します。



アラーム機能

体重変化量が設定値を越えた場合、ブザー音と体重変化量の表示点滅でお知らせします。(消音スイッチ付)

出力端子(RS-232C)を標準装備

測定データの集計や管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力を持ち、またLAN接続オプションで複数ベッドによる透析業務支援システムと連携が可能です。

体重測定

体重変化量

体重変化量の目量は100 g。アラームの設定で変化を見逃さずに患者の状態をモニタリング可能です。

停電でも安心 測定値保持機能

体重変化の測定中に電源が切れる状態になった際（移動や停電等）、電源が復帰した場合は自動的に現在体重値と治療前体重値で復帰いたします。

ベッド機構部

3モーター電動ベッド WAKシリーズ

2モーター電動ベッド WAK2シリーズ





手元のリモコン操作で、背上げ・脚上げ・膝上げ・ベッド本体の高さ調節が可能です。



手元リモコン
わかりやすい表示のスイッチ。



リナック社製モーター
日常生活防水機能を備えた低振動・低騒音のアクチュエーターです。

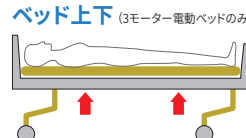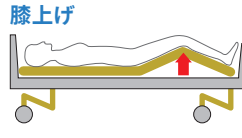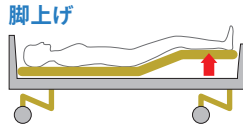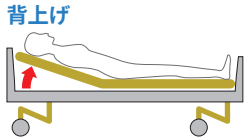

3モーター電動ベッド WAKシリーズ

2モーター電動ベッド WAK2シリーズ

透析業務を強力にサポート

省スペースな幅狭ベッド、低コストな2モーターベッドや木製ボード。フットケアの行いやすい低フットボードなど、豊富なラインナップとシステム連携などのオプションで透析業務を強力にサポートします。

おすすめオプション

キャスター集中ロック

キャスターはワンタッチレバーにより4輪をワンタッチでロックすることが可能です。



システム連携可能なLAN接続 (工場オプション)

「スタート」、「ストップボタン」で透析前・後の体重を区別して送信することができます。複数台のベッドのシステム連携が可能です。

- ・LAN接続オプションUFT-WAK用 AD-WAK-01
- ・コネクタ取付金具セットWAK-810用 AD-WAK-02



機種別機能一覧表

型 名	モータ	ボード種類	G	A			B	C	D	E	F	H	I	質 量	標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
			ベッド幅	全幅(サイドガード受けが下記の場合)			ボード幅	全 高	全 長	寝台部高さ (ベッド部～床面)	足元側高さ (ボード～床面)	背上げ角度	脚上げ角度				
				差込式	格納式	折りたたみ式											
WAK-810-N	3 モータ	樹脂	760	—	888	906	800	827～1100	2217	447～720	827～1100	0°～78°	0°～45°	149.1	¥1,600,000	UFT-WAK-810-N	4981046701075
WAK-810-K		木製					839	815～1088	2282		815～1088			148.6	¥1,500,000	UFT-WAK-810-K	4981046701112
WAK-810-K2		樹脂												615～888	151.1	¥1,550,000	UFT-WAK-810-K2
WAK-710-N			672	794	—	846	800	827～1100	2217		827～1100			150.6	¥1,650,000	UFT-WAK-710-N	4981046701174
WAK-710-K							839	815～1088	2282		815～1088			150.6	¥1,550,000	UFT-WAK-710-K	4981046701181
WAK-710-K2							木製							615～888	150.6	¥1,600,000	UFT-WAK-710-K2
WAK2-810-N	2 モータ	樹脂	760	—	888	906	800	855	2217	475	855	0°～78°	0°～45°	128.9	¥1,500,000	UFT-WAK2-810-N	4981046701204
WAK2-810-K		木製					839	843	2282		843			128.4	¥1,400,000	UFT-WAK2-810-K	4981046701211
WAK2-810-K2		樹脂												643	128.4	¥1,450,000	UFT-WAK2-810-K2
WAK2-710-N			672	794	—	846	800	855	2217		855			130.9	¥1,550,000	UFT-WAK2-710-N	4981046701235
WAK2-710-K							839	843	2282		843			130.4	¥1,450,000	UFT-WAK2-710-K	4981046701242
WAK2-710-K2							木製							643	130.4	¥1,500,000	UFT-WAK2-710-K2

※ ボードの種類：




樹脂ボード



木製ボード・高



木製ボード・低

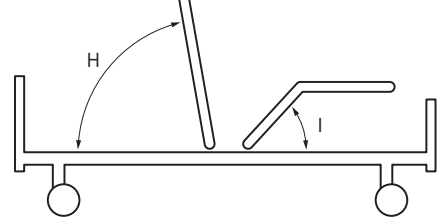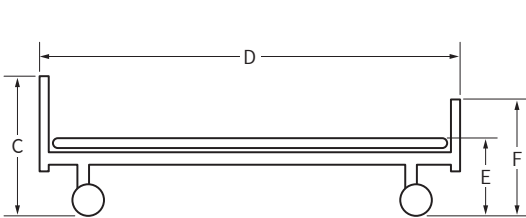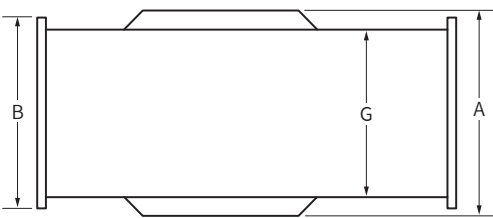

デジタル スケールベッド WAKシリーズ・主な仕様


測定範囲	体重変化量	－9.9 kg ～ ＋9.9 kg (最小表示100 g)
	透析前体重	2.0 kg ～ ＋150.0 kg (最小表示100 g)
	現在体重	2.0 kg ～ ＋150.0 kg (最小表示100 g)
アラーム	設定範囲	OFF及び0.1 kg ～ 9.9 kg (最小表示100 g)
	出力	LED表示点滅及びブザー音
電源		AC100 V、消費電力100 W (最大)

オプション

キャスター集中ロック
(工場オプション) TCR-010
¥100,000 (税抜)
商品コード UFT-TCR-010
JANコード 4981046713108




格納式サイドガードホルダー 5×2
(工場オプション) SGF-050
¥30,000 (税抜)
商品コード UFT-SGF-050
JANコード 4981046713115

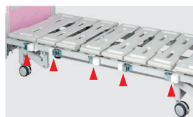

マットレス
UTM-80190
¥48,000 (税抜)
商品コード UFT-UTM-80190
JANコード 4981046712804




低反発マットレス
UTM-80190T
¥75,000 (税抜)
商品コード UFT-UTM-80190T
JANコード 4981046713290

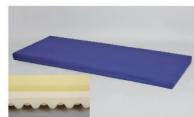

防水マットレス
UTM-80190B
¥70,000 (税抜)
商品コード UFT-UTM-80190B
JANコード 4981046713283



防水低反発マットレス
UTM-80190BT
¥95,000 (税抜)
商品コード UFT-UTM-80190BT
JANコード 4981046713306

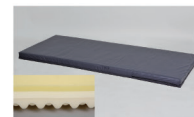

折り畳み式サイドガード2台/組
SGM-232J
¥90,000 (税抜)
商品コード UFT-SGM-232J
JANコード 4981046712811



サイドガードEタイプ 1本
SGJ-980
¥20,000 (税抜)
商品コード UFT-SGJ-980
JANコード 4981046713832



油圧式サイドテーブル
PB-4090
¥60,000 (税抜)
商品コード UFT-PB-4090
JANコード 4981046713337



油圧式オーバーテーブル
PB2-445120
¥90,000 (税抜)
商品コード UFT-PB2-445120
JANコード 4981046713313



固定式記録台(ベッド装着用)
MKS-3080
¥40,000 (税抜)
商品コード UFT-MKS-3080
JANコード 4981046713191



LAN接続オプション(工場オプション)

※ LAN接続オプションには下記2点が必要になります。

LAN接続オプションUFT-WAK用

¥80,000 (税抜)
商品コード AD-WAK-01
JANコード 4981046131162

コネクタ取付金具セットWAK-810用

¥40,000 (税抜)
商品コード AD-WAK-02

システム接続図



従来では各ベッドにPCが必要だったシリアル通信オプションに比べ
LAN接続により、簡単に複数のベッドの体重管理が可能になりました。

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803 m/s ² ~9.807 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799 m/s ² ~9.804 m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796 m/s ² ~9.801 m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.794 m/s ² ~9.799 m/s ²
⑤	鹿児島県 (薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789 m/s ² ~9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造元

株式会社タチエスH&P 青梅事業所
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-8

販売元

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00