

類 別：機械器具 76 医療用吸入器 管理医療機器
一般的名称：家庭用超音波吸入器 (JMDNコード 71020000)
販売名：超音波温熱吸入器 UN-135


* **【禁忌・禁止】**

＜使用方法＞

- ヒーター部は高温になっていますので、お取り扱いの際は充分ご注意ください。[火傷する恐れがあります。]

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名前

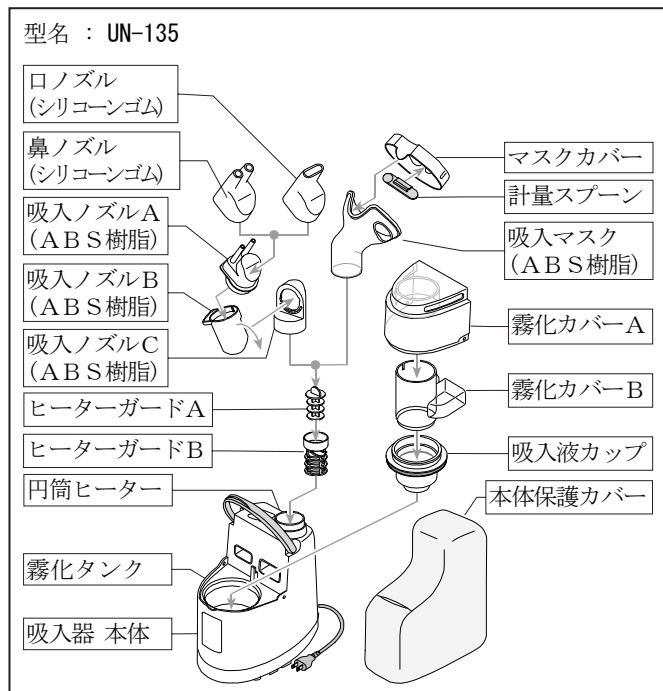

標準付属品

- 取扱説明書 1冊
添付文書 1枚

(2) 本体寸法及び重量

寸法：111(幅)×286(高さ)×188(奥行き) mm
質量：約1.1 kg

(3) 電氣的定格

定格電圧：AC100V 50/60Hz
* 定格電力：65 W
電撃保護：クラスII機器 B形装着部
水浸入に対する保護：IP21

(4) 作動・動作原理

本製品は、圧電セラミックスの振動により発生させた超音波を利用し、吸入液を平均粒子径5 μ mの霧にします。この霧を送風ファンにより吸入マスクまで送ります。このとき円筒ヒーターにより霧は温められます。

(5) 品目仕様等

定格時間：短時間定格 5分間
噴霧量 強：約 1.8 mL/分
普通：約 1.2 mL/分
噴霧粒子径：約 5 μ m
霧温度：約 43 $^{\circ}$ C

【使用目的又は効果】

鼻腔と咽喉の加湿、加温による不快感の改善。一般家庭で使用すること。

【使用方法等】

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

(1) ご使用前に

- ① ヒーターガード、吸入液カップ、霧化カバー、吸入ノズル、吸入マスク、ロノズル、鼻ノズルを水道水ですすいでください。

(2) 霧化タンクに水道水を入れます。

- ① 霧化タンクに水道水を線の下まで入れます。

(3) 吸入液カップをセットします。

- ① 吸入液カップに水道水をピンク色の線まで入れ、霧化タンクにセットします。
- ② 約1%の食塩水を使用する場合、付属の計量スプーンですり切り一杯の食塩(0.32g)を吸入液カップに入れます。

(4) 本体を用意します。

- ① 噴出口にヒーターガード、吸入マスクまたは、ノズルを取り付けます。
- ② 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

(5) 吸入を始めます。

- ① 電源スイッチを押し、予熱の15秒間待ちます。
- ② 口・鼻を吸入マスクまたは、ノズルに近づけます。
- ③ 霧化量スイッチを押し、噴霧量を選択します。

(6) 使い終わったら

- ① コンセントから電源プラグを抜きます。
- ② 霧化タンクの水、吸入液カップに残っている吸入液を捨てます。
- ③ 本体が十分に冷えたら、吸入マスクまたは、ノズル、ヒーターガードを外し、吸入マスクまたは、ノズル、ヒーターガード、吸入液カップ、霧化カバーを水洗いして、本体に付いた水滴をよく乾いた布で拭き取ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

*【使用上の注意】

<使用方法>（次の患者には慎重に適用すること）

- 喘息などの治療中の方は必ず医師に相談の上ご使用ください。[体調不良を起こす恐れがあります。]
- 身体に異常（例えば、鼻粘膜の炎症や口腔内の炎症）がある場合は、必ず医師に相談の上ご使用ください。[体調不良をおこす恐れがあります。]

<重要な基本的注意>

- 吸入液には常にあたらしい水道水、または1%の食塩水を使用してください。[カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。]
- 薬液は使用しないでください。[故障や健康を害する原因になります。]
- 吸入液の量は、入れすぎたり、少なすぎたりしないでください。[あふれたり、霧の出が悪くなる原因になります。]
- 吸入液カップ底部の振動膜をつぶしたり傷つけたりしないでください。[霧の量が減ったり、霧が出なくなることがあります。]
- 約1%の食塩水を作るときは、食塩の分量を間違えないでください。[効力が失われるばかりではなく、健康を害する原因になります。]
- コンタクトレンズ用の食塩水は使用しないでください。[故障や健康を害する原因になります。]
- 寒冷地などで、吸入液、霧化タンクに入れる水道水が冷たい場合は、室温になじませるため、しばらく放置してから使用してください。[霧化量が減少する原因になります。]
- 霧化タンクには絶対に食塩を入れないでください。[故障の原因になります。]
- 霧化タンクの底部（白色の部分）を押したり傷つけたりしないでください。[故障の原因になります。]
- 吸入は1回5分以内とし、続けて使用する場合は2回までとしてください。[それ以上の使用は、低温火傷をする恐れがあります。]
- 極端に高温になったり、焦げ臭い匂いがしたり、動かなくなった場合は、コンセントから電源プラグを抜き、速やかに使用を中止してください。[故障・感電・火災の恐れがあります。]
- 停電のときは速やかに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。[故障や感電する恐れがあります。]
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。[故障や感電する恐れがあります。]
- 使用後はコンセントから電源プラグを抜いて、ヒーターが冷めてから保管してください。[火傷や火災の原因になります。]
- しばらく使用しても効果が表れない場合には、医師又は専門家にご相談ください。[体調不良をおこす恐れがあります。]

- 使用中に身体に異常を感じたときは、速やかに使用を中止してください。[体調不良をおこす恐れがあります。]
- 事故を防ぐため、お子様や身体の不自由な人が本製品を使用する場合は、必ず助けとなる人が付き添ってください。[怪我・火傷・事故・故障や感電する恐れがあります。]
- 強い電磁波を発生する機器を近づけないでください。[誤動作する恐れがあります。]
- AC100V以外の電源では使用しないでください。[故障や誤作動・火災の原因になります。]

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

- 水のかからない場所。直射日光があたらない場所。
- ほこり、塩分、イオウ、化学薬品等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所。
- 使用後は、必ず吸入液カップ、霧化タンク内に残った水を捨て、水滴を拭き取ってください。[故障や健康を害する原因になります。]
- 使用後は本製品を清掃し、乾燥させてから保管してください。[故障する恐れがあります。]

(2) 耐用期間

- 正規の保守点検を行った場合…………… 5年間
(自己認証(自社データ)による)

*【保守・点検に係わる事項】

<使用者による保守点検事項>

- しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず正常にかつ安全に作動すること（電源が入る、霧化するなど）を確認し、よく清掃してからご使用ください。[カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。]
- 汚れはぬるま湯か石けん水を含ませた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤を用いて清掃しないでください。
- お手入れのときは、使用后15分以上放置し、ヒーターが完全に冷めたことを確認してください。[火傷の原因になります。]
- 本体を水で丸洗いしないでください。[故障や感電する恐れがあります。]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
住所 : 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話 : 048-593-1434

お問い合わせ先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
お客様相談センター
電話 : 0120-514-016

1WMPD4002807E

取扱説明書を必ずご参照ください。