

\*\* 2006年 9月25日改訂 (第3版)

\* 2005年 2月 8日

承認番号 : 21600BZY00400000

類 別 : 機械器具 76 医療用吸入器 管理医療機器

一般的名称 : 家庭用超音波吸入器 (JMDNコード 71020000)

超音波温熱吸入器ホットシャワー3 UN-133A

**【警告】**

- 喘息などの治療中の方は、必ず医師に相談の上ご使用ください。
- 改造や修理は、修理技術者以外に行わないでください。保証の対象外になるばかりか、本器を損傷したり火災の原因になります。

**EMC 適合**

本製品は EMC 規格 JIS06061-1-2 : 2002 に適合しています。

**【使用目的、効能又は効果】**

鼻腔と咽喉の加湿・洗浄により不快感を改善します。

**【品目仕様等】**

霧化量 : 1.8cc/分  
霧化粒径 : 約 5 ミクロン  
霧温度 : 約 43°C

**【操作方法・使用方法等】**

(1)ご使用前に

- ①ヒーターガード、カートリッジカバー、吸入液カップ、吸入マスクを水道水ですすいでください。

(2)霧化タンクに水を入れます。

- ①カートリッジからカートリッジカバーを外し、吸入液カップを取り出します。

- ②水を吸入液カップのピンクの帯の間まで入れます。

- ③その水を霧化タンクに入れます。


(3)吸入液カップをセットします。

- ①吸入液を吸入液カップのピンクの帯の間まで入れます。

- ②吸入液の入った吸入液カップを霧化タンクにセットし、カートリッジカバーを付けます。

**【形状・構造及び原理等】**

(1)各部の名前

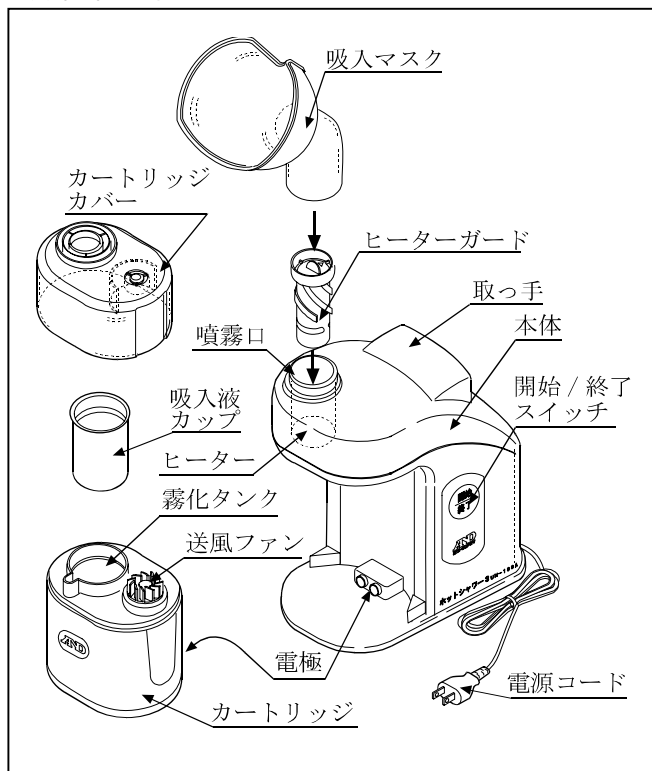

**標準付属品**

- 取扱説明書(保証書付き) 1冊
- 添付文書 1枚

(2)本体寸法及び重量





寸法 : 100(幅) × 266(高さ) × 166(奥行き)mm  
質量 : 1.5kg

(3)電氣的定格

電源 : AC100V 50Hz/60Hz  
定格電力 : 170W  
定格時間 : 短時間定格 5 分間

(4)作動・動作原理


本製品は、圧電セラミックスの振動により発生させた超音波を利用し、吸入液を平均粒径5 $\mu$ mの霧にします。この霧を送風ファンにより吸入マスクまで送ります。このとき円筒形アルミヒーターにより霧は約43°Cに温められます。

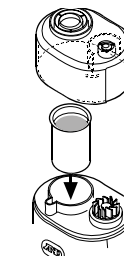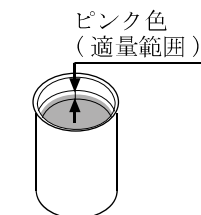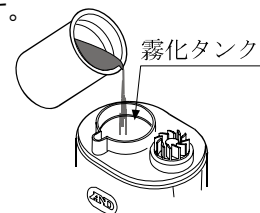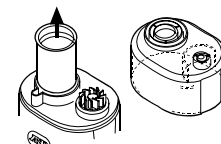

取扱説明書を必ず参照してください。


(4) 本体を用意します。

① 本体噴霧口にヒーターガード、吸入マスクを取り付けます。

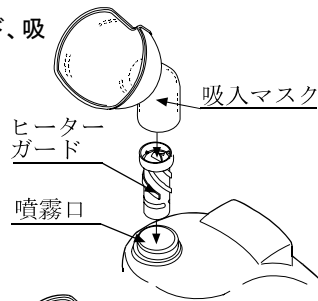


② カートリッジを取り付けます。

③ 電源コードのプラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

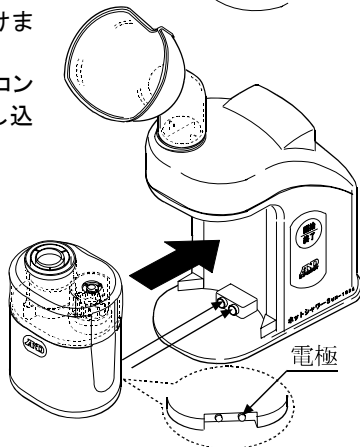

(5) 吸入を始めます。

① 開始/終了スイッチを押します。

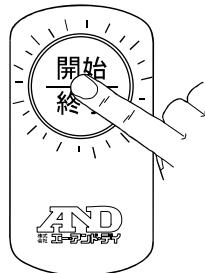

② 口・鼻を吸入マスクに近づけます。



(6) 使い終わったら

① コンセントから電源コードを抜きます。

② カートリッジを外し、霧化タンクの水、吸入液カップに残っている吸入液を捨てます。

③ 本体が十分に冷えたら、吸入マスク、ヒーターガードを外し、噴霧口、吸入マスク、ヒーターガードに付いた水滴を良く乾いた布で拭き取ります。

#### 【使用上の注意】

- ・ 吸入液には水、生理食塩水をお使いください。
- ・ 薬液は使用しないでください。
- ・ 吸入液の量は、入れすぎたり、少なすぎたりしないようにしてください。溢れたり霧の出が悪くなる原因になります。
- ・ 使用中に身体に異常を感じたときは、使用を速やかに中止してください。
- ・ 吸入は1回5分以内で、続けて使用する場合は2回までとし、それ以上使用するときは、機器を5分以上休ませてから使用してください。
- ・ 口、鼻が熱いと感じられたら、吸入マスクからさらに口、鼻を離して吸入してください。
- ・ 吸入以外でのご使用は絶対におやめください。

- ・ 使用後は電源コードを抜いて、ヒーターが冷めてから保管してください。火傷や、火災の原因になります。
- ・ 本体を水で丸洗いしないでください。故障や感電する恐れがあります。
- ・ ヒーター部は高温になっていますので、お取り扱いの際は充分ご注意ください。
- ・ 極端に高温になったり、焦げ臭い匂いがしたり、動かなくなった場合は、電源コードを抜き速やかに使用を中止してください。
- ・ 事故を防ぐため、子供や身体の不自由な人が本器を使用する場合は、必ず助けとなる人が付き添ってください。また、保管する際は、本器を子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 直射日光が長時間あたる場所では使用しないでください。
- ・ ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。
- ・ 傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。
- ・ 携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤動作する恐れがあります。
- ・ 他の医療用具や器具と接続しないでください。事故の恐れがあります。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(1) 貯蔵方法

- ・ 傾斜、振動、衝撃などのない場所に保管してください。
- ・ 直射日光が長時間当たる場所には保管しないでください。
- ・ ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所に保管してください。

(2) 1回あたりの使用期限  
5分間

(3) 有効期間・使用期限

製造日から正規の保守点検を行った場合、5年間とする。  
(当社データによる。)

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・ 変形や変色の原因になりますので、シンナー等の強力な洗浄剤で本器を清掃しないでください。水を柔らかい布で湿らせて軽く汚れを拭き取ってください。
- ・ ヒーター一面を清掃する時は、十分に冷やしてから行ってください。

#### 【包装】

1台/箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者

名称 : 株式会社イー・アンド・デイ

住所 : 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

電話 : 0120-514-016

製造業者

名称 : 愛安德電子(深圳)有限公司

A&D ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD.

中華人民共和国

1WMPD4000787B