

類別: 機械器具 76 医療用吸入器
管理医療機器 一般的名称: 家庭用超音波吸入器 (JMDNコード 71020000)

超音波温熱吸入器 ホットシャワー3 UN-133B

【警告】


●喘息などの治療中の方は、必ず医師に相談の上ご使用ください。

【禁忌・禁止】

- 改造や修理は、修理技術者以外には行わないでください。保障の対象外になるばかりか、本製品を損傷したり火災の原因になります。
- ヒーター部は高温になっていますので、お取り扱いの際は充分ご注意ください。守らないと火傷する恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

(1)各部の名前

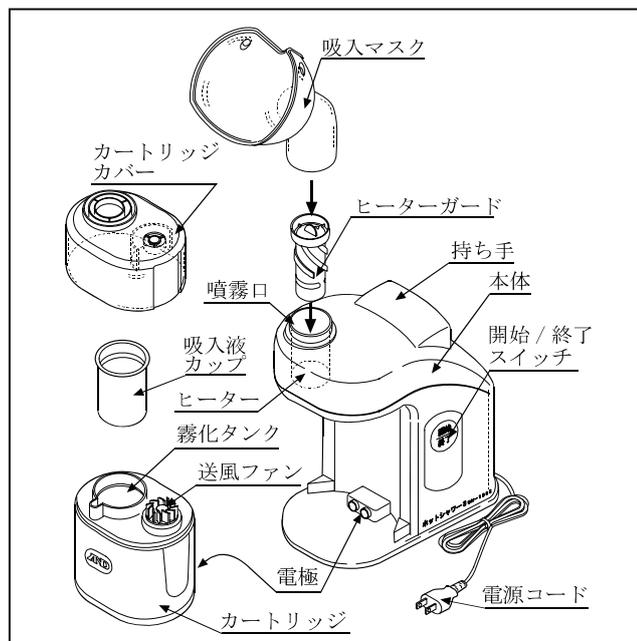

- 本体.....1台
- カートリッジ.....1台
- 計量スプーン.....1個
- *取扱説明書.....1冊
- *添付文書.....1枚

(2)本体寸法及び重量

外形寸法: 100mm(幅) × 266mm(高さ) × 166mm(奥行き)
重量: 約 1.5kg

(3)電氣的定格

定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 定格電力 : 90W
 定格時間 : 短時間定格 5分間
 感電保護形式 : クラスⅡ □
 水浸入に対する保護 : 本体 IP21 カートリッジ IP43

(4)作動・作動原理

本製品は、圧電セラミックスの振動により発生させた超音波を利用し、吸入液を平均粒子径 5 μ m の霧にします。この霧を送風ファンにより吸入マスクまで送ります。このとき円筒形アルミヒーターにより霧は約 43℃ に温められます。

EMC 適合

本製品は EMC 規格電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和 37 年通商産業省令第 85 号) 第 2 項の規定に基づく基準 J55014-1 の要求事項に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用すること。

【品目仕様等】

- (1)噴霧量 : 約 1.8mL/分
- (2)噴霧粒子径 : 約 5 μ m
- (3)噴霧粒子温度: 約 43℃

【操作方法・使用方法等】

(1)ご使用前に

- ①ヒーターガード、カートリッジカバー、吸入液カップ、吸入マスクを水道水ですすいでください。

(2)霧化タンクに水を入れます。

- ①カートリッジからカートリッジカバーを外し、吸入液カップを取り出します。
- ②水を吸入液カップのピンクの帯の間まで入れます。
- ③その水を霧化タンクに入れます。

(3)吸入液カップをセットします。

- ①吸入液を吸入液カップのピンクの帯の間まで入れます。
- ②吸入液の入った吸入液カップを霧化タンクにセットし、カートリッジカバーを取り付けます。

(4)本体を用意します。

- ①本体噴霧口にヒーターガード、吸入マスクを取り付けます。
- ②カートリッジを取り付けます。
- ③電源コードのプラグをコンセントにしっかり差し込みます。

(5)吸入を始めます。

- ①開始/終了スイッチを押します。
- ②口・鼻を吸入マスクに近づけます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(6)使い終わったら

- ①コンセントから電源コードを抜きます。
- ②カートリッジを外し、霧化タンクの水、吸入液カップに残っている吸入液を捨てます。
- ③本体が十分に冷えたら、吸入マスク、ヒーターガードを外し、噴霧口、吸入マスク、ヒーターガードに付いた水滴をよく乾いた布でふき取ります。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

本添付文書 1 ページ赤枠内【禁忌・禁止】の項参照。

- ・吸入液には常にあたらしい水道水、または生理食塩水を使用し、薬液は使用しないでください。守らないとカビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。
- ・吸入液の量は、入れすぎたり、少なすぎたりしないでください。あふれたり、霧の出が悪くなる原因になります。
- ・吸入以外でのご使用は、絶対おやめください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・身体に異常（例えば、鼻粘膜の炎症や口腔内の炎症）がある場合は、必ず医師に相談の上ご使用ください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- ・使用中に身体に異常を感じたときは、使用を速やかに中止してください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- ・吸入は 1 回 5 分以内とし、続けて使用する場合は 2 回までとしてください。それ以上の使用は、低温火傷をする恐れがあります。
- ・口、鼻が熱いと感じられたら、吸入マスクから口、鼻を離して吸入してください。低温火傷をする恐れがあります。
- ・極端に高温になったり、焦げ臭い匂いがしたり、動かなくなった場合は、コンセントから電源コードを抜き、速やかに使用を中止してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・使用後はコンセントから電源コードを抜いて、ヒーターが冷めてから保管してください。火傷や火災の原因になります。
- ・濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・本体及びカートリッジを水で丸洗いしないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・使用後は本製品を清掃し、乾燥させてから保管してください。守らないと故障する恐れがあります。
- ・傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。守らないと故障する恐れがあります。
- ・携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。守らないと誤動作する恐れがあります。
- ・事故を防ぐため、子供や身体の不自由な人が本製品を使用する場合は、必ず助けとなる人が付き添ってください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・保管する際は、本製品を子供の手の届かないところに保管してください。守らないと子供が怪我する恐れがあります。
- ・直射日光が長時間あたる場所では使用しないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・他の医療機器や器具と接続しないでください。守らないと事故の恐れがあります。

- ・しばらく使用しても効果が表れない場合には、医師又は専門家に相談ください。守らないと体調不良をおこす恐れがあります。
- ・すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・各スイッチ、タイマなどが、正常に動作するか確認してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・しばらく使用しなかった本製品を使用するときは、本製品が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・停電の時は直ちに電源を切り電源コードをコンセントから外してください。守らないと故障や感電する恐れがあります。
- ・コード類を取り外す場合は、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。守らないと故障や感電する恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

* (1)貯蔵方法

- ・傾斜、振動、衝撃などのない場所。
- ・直射日光があたらない場所。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所。

(2)一回あたりの使用期間.....5 分間

(3)有効期間・使用期限

製造日から正規の保守点検を行った場合.....5 年間

【包装】

1 台/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

(1)製造販売業者

名称：株式会社エー・アンド・デイ

住所：〒364-8585

埼玉県北本市朝日 1 丁目 243 番

電話：0120-514-016

* (2)製造業者

名称：愛安德電子（深圳）有限公司

A&D ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD

中華人民共和国