

器具器械 76 医療用吸入器
エー・アンド・デイ 超音波ネブライザー UN-231

【警告】


- 喘息などの治療中の方は、必ず医師に相談の上ご使用ください。
- 事故を防ぐため、子供や身体の不自由な人が本器を使用する場合は、必ず助けとなる人が付き添ってください。
- 吸入以外でのご使用は絶対におやめください。
- 使用中に身体に異常が認められた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 使用後は水分を残さず十分に乾燥させて保管し、長期保管後はよく清掃してからご使用ください。
- 子供のいたずらによる事故を防ぐため、本器は子供の手の届かない所に保管してください。
- 改造や修理は、修理技術者以外に行わないでください。保証の対象外になるばかりか、本器を損傷したり火災の原因になります。

【禁忌・禁止】

本器は精密機械ですので、丁寧に扱ってください。
強い衝撃を与えると故障の原因となります。

【組成・性状・構造等】

各部の名前

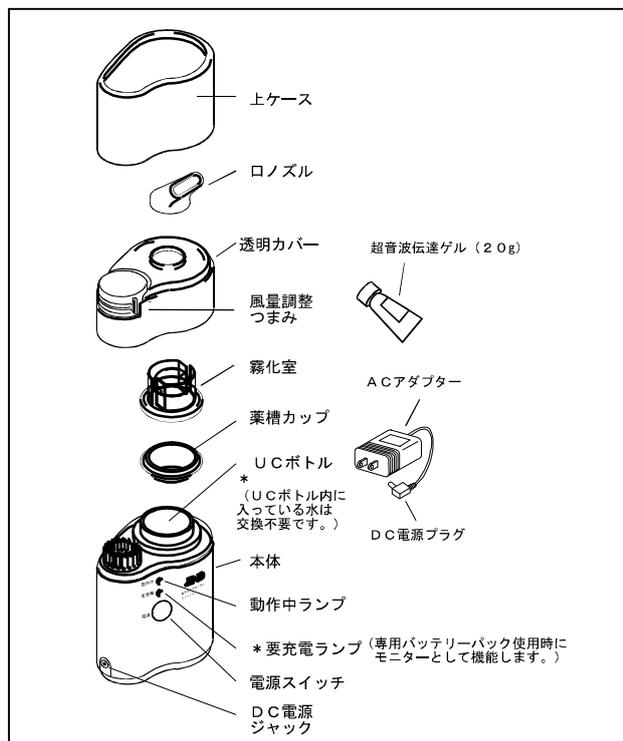

標準付属品

取扱説明書	1 冊	超音波伝達ジェル	20g
専用 AC アダプタ	1 個	ソフトケース	1 個
薬槽カップ	3 個		

【性能、使用目的、効果、効能】

本装置は、超音波霧化方式の超音波吸入器です。
超音波で霧化された水、蒸留水または生理食塩水等の微粒子を吸入することによる口腔、鼻腔内の粘膜を湿潤及び加湿と投薬を行い喘息、アレルギー性鼻炎、その他の呼吸器疾患の吸入薬剤(医師の処方による)を投与できます。

定格	:AC100V 50Hz/60Hz 15W、
超音波発振周波数	:2.45MHz
噴霧能力	:約 0.5ml/分 以上 (薬液の温度及び量により変化します)
噴霧粒子径	:約 4.8μm
計量カップ容量	:8ml(最大)
寸法	:幅 80×奥行 60×高さ 150mm
重量	:約 260g(本体のみ)
タイマー	:約 10 分
保存温湿度	:5℃～40℃、85%RH


【操作方法又は使用方法等】

(1) 電源チェック

専用 AC アダプタを本器からははずした状態にしてください。


(2) 超音波伝達ジェルをセット

付属の超音波伝達ジェルを約 0.6g UC ボトル内に入れてください。

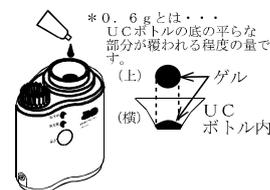

(3) 薬液をセット

- ①薬槽カップを UC ボトルの上に戻す。
- ②薬液または水、生理食塩水を最大約 8ml 薬槽カップに入れる。
- ③霧化室を透明カバーにセットし本体にはめ込む。

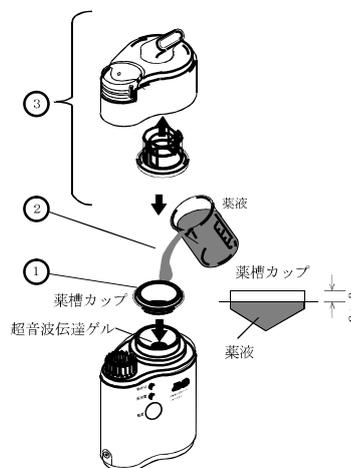

取扱説明書を必ず参照ください。


(4) 本器を持つ(あるいは台の上に置く)

本器を手で持って使用するか、あるいはテーブル等の平らな台の上に置いて使用してください。高さを調整する必要がある場合は、上ブタを本器の底に取付けてください。

(5) 電源に接続する


電源スイッチを一度押すと電源が入り、再度押すと電源が切れます。

電源を入れると薬液の霧が出始め、10分間連続し自動的に電源が切れ噴霧が終了します。

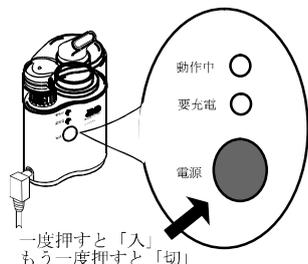

(6) 風量を調節

下図を参考に噴霧の風量を必要に応じて調整してください

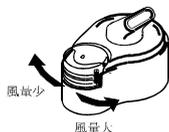

(7) 呼吸開始

下図のように呼吸に合わせて口から吸って口から吐ってください。吸入は一回最長で電源を入れてから約10分間行えます。10分後自動的に停止します。



(8) 吸入終了

電源を切り噴霧を止めます。電源は電源を入れてから約10分後に自動的に切れますが、10分以内で電源を切る場合は本器の電源スイッチを押して電源を切ってください。

【使用上の注意】

- 吸入液には水、生理食塩水または医師により処方された薬液をお使いください。
- 薬液使用の場合は、必ず医師の指導に従ってください。
- 吸入液の量は、入れすぎたり、少なすぎないようにしてください。霧の出が悪くなる原因になります。
- 噴霧中に、ロノズルの先端から中を覗きこまないでください。目を痛める恐れがあります。
- 薬液を薬槽に入れる際は電源を切ってください。
- 超音波伝達ゲルを入れないで動作させますと故障の原因となります。
- 使用中に身体に異常を感じたときは、使用を速やかに中止してください。
- 連続使用は最長で一回30分間とし、最低30分間本器を休ませてから再度ご使用ください。

【作動・動作原理】

本装置は、圧電セラミックスの共振時に生じる超音波霧化作用を使用し薬液、水又は生理食塩水を平均粒径約4.8 μ mの霧として発生させ、この霧を送風ファンにてノズル出口へ送出する。

【取扱い上の注意】

- 本体を水で丸洗いしないでください。故障や感電する恐れがあります。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後又は、しばらくご使用されなかった時は薬槽カップ、透明カバー、霧化室、ロノズル、風量つまみはよく水洗いした後、煮沸消毒を5から10分間するか、消毒液(ヒビテン、オスノバン等)を用いて消毒してください。
- 変形や変色の原因になりますので、シンナー等の強力な洗浄剤で本器を清掃しないで下さい。中性洗剤または水を柔らかい布で湿らせて軽く汚れを拭き取ってください。

【製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造業者名:株式会社エー・アンド・デイ

住所:東京都豊島区東池袋3-23-14

お問い合わせ先:

株式会社エー・アンド・デイ 鴻巣工場 FE部

住所:〒365-0027 埼玉県鴻巣市上谷1771

電話:0120-514-016

WM:PD4000577