

類 別：機械器具 16 体温計 管理医療機器
 一般的名称：電子体温計 (JMDNコード 14032010)
エー・アンド・デイ 電子体温計 UT-201


【禁忌・禁止】

(体温計を適正にご使用頂くための注意事項です。)

- ・測定結果の自己判断、治療はしないでください。医師の指示に従ってください。
- ・電池や電池蓋は子供の手の届かないところにおいてください。

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名前 UT-201BLE

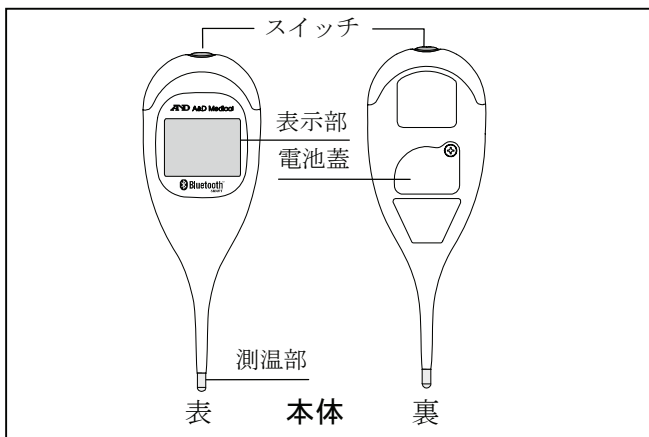

標準付属品

- 取扱説明書 (保証書付き) 1冊
- 添付文書 1枚
- モニター用リチウムボタン電池 1個

(2) 本体寸法及び重量

寸法 : 40(幅)×117(高さ)×15(奥行き)mm
 質量 : 約 25 g (電池含む)

(3) 電氣的定格

電源 : DC3V (CR2032 リチウム電池 1個)
 電撃保護 : 内部電源機器 B F 形

(4) 作動・動作原理

測温部の温度はサーミスタに伝わり、温度に応じて抵抗値が変化します。その抵抗値を測定して温度に変換します。本機は、予測式 (実測移行式) 電子体温計です。

EMC適合 本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2 : 2007 に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。

【品目仕様等】

- 種類 : 測温部一体形、一部防浸形
- 測温方式 : 予測式 (実測移行式)
- 測温範囲 : 温度 32℃～42℃
- 最大許容誤差 : ±0.1℃ (32.0～42.0℃)
- 機能 : 前回測定値記憶、無線通信
- 使用温湿度 : +10～+40℃、15～85%RH
- 保存温湿度 : -20～+60℃、15～95%RH
- 測定範囲外告知 : 32.0℃未満のとき「L」を表示
42.0℃以上のとき「H」を表示

JIS適合 本製品は電子体温計規格 JIST1140 : 2005 に適合しています。

【操作方法・使用方法等】

1. 室温 10～40℃でご使用ください。
2. スイッチ を押すと、前回測定値が表示されます。
3. **L** が表示されるまで待ってください。
4. 体温計の先端を腋の下にしっかりと押し当ててください。
5. 腋の下を閉じてください。
6. 予測検温が開始し、予測マークが回転し、カウントダウンインジケータが減っていきます。(約 30 秒)
7. 予測検温が終わると予測マークが固定点灯し、LED が点滅、ブザーが鳴ります。約 15 秒間予測値が表示されます。
8. 体温計をそのまま装着し続けると実測検温モードに移り、実測マークが点滅します。
9. 実測検温が終了すると実測マークが点灯し、LED が点滅、ブザーが鳴ります。
10. スイッチ を押して電源を切ります。

※ より厳密な基礎体温を測定するには実測検温をおすすめします。

※ UT-201BLE は、BLE 対応の通信端末とあらかじめペアリングをする必要があります。

【使用上の注意】

- ・室温 10～40℃でご使用ください。
- ・安静にして測定してください。
- ・運動または入浴後は数十分してから測定してください。
- ・体温計を正しく腋の下に押し当ててください。また、衣類の上から測定すると、測定誤差の原因になります。
- ・本機は万が一電源を切り忘れても約 1 分後に自動的に電源が切れる、「オートパワーオフ」機能を備えています。
- ・表示部に電池残量マークが点滅した場合は、電池を新しいものに取替えてください。
- ・直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。空気中に、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ場所で使用しないでください。
- ・携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤作動する可能性があります。
- ・体温測定以外の目的では使用しないでください。分解や修理・改造を行わないでください。発火や故障、事故を起こすことがあります。
- ・他の医療用具や機器と接続しないでください。事故の恐れがあります。
- ・電池の \oplus \ominus 極を正しく入れてください。
- ・くり返し測定するときは時間をおくなど体温計の先端 (測温部) を冷ましてから測定してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(1) 貯蔵方法

- ・高温・高湿・直射日光は避けてください。
- ・ほこりの多い所での保管は避けてください。
- ・長期間 (約 1 ヶ月) 使用しない場合は、乾電池を取り出してください。

(2) 耐用期間

5年とする。

取扱説明書を必ず参照してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること（電源が入る、ディスプレイが表示されるなど）を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れていたり、濡れたりしていないかを確認してください。清掃は乾いた柔らかい布で行ってください。水または中性洗剤を染み込ませた布を使う場合は、硬く絞ってお使いください。シンナー、ベンジン等のアルコール溶剤を使用しないでください。
先端（測温部）を消毒する際は、布等に消毒用エタノール（76.9～81.4v/v%）を浸し、拭き取ってください。

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】**製造販売業者**

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
住所 : 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話 : 0120-514-016

製造業者

名称 : 愛安德電子（深圳）有限公司
A&D ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD.
中華人民共和国

1WMPD4002899