

4ND Digital Blood Pressure Monitor Model UA-651Plus

취급설명서

1. 감사합니다.

최첨단임상과 최최의 기술로 제작된 A&D 혈압계를 구매하여 주셔서 감사합니다. 사용하기 편리하고 정확성이 검증된 본 제품을 한층 더 여러분의 혈압 관리에 도움을 줄 것입니다.

- 제품을 사용하기 전에 본 취급 설명서를 충분히 검토하시기 바랍니다.

2. 서두

- 본 기기는 의료기기에 대한 유럽의 93/42 EEC 규정을 따르며, CE0123 마크 인증을 받았습니다. (0123: 관련 참조번호)
- 본 기기는 성인용으로 제작되었으며 신생아나 유아에게는 사용되어서는 안 됩니다.
- 이 기기는 가정용 헬스케어 기기입니다.
- 본 기기는 진단을 위하여 사용자의 혈압 및 맥박을 측정하도록 제작되었습니다.

3. 주의 사항


- 본 기기의 구성에는 정밀부품이 사용되었습니다. 극단적 온도, 습도, 적시 광선, 충격 또는 먼지는 피해야 합니다.
- 마스크 부드러운 천이나 물 또는 중성세제에 착신 천 등으로 기기를 닦아 주십시오. 기거나 커패를 청소하기 위하여 알코올, 벤젠, 희석제 또는 다른 독한 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 커패를 무리하게 찢지 마시고 에어호스가 꼬인 채로 오랫동안 방치하지 마십시오. 이러한 관리방법은 부품의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 본 기기와 커패는 방수가 되지 않습니다. 비에 노출되거나 물이나 물방울에 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 텔레비전, 전자 레인지, 휴대전화, X-ray 또는 강한 전자기파를 사용하여, 측정 오류가 발생할 수 있습니다.
- 기기를 사용하지 전에, 기기 상태가 깨끗한지 확인하여 주십시오.
- 사용된 제품 및 부품, 전선지 등을 버릴시 때에는 일반 가정폐기물처럼 취급하지 마시고, 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여 주십시오.
- AC 어댑터를 사용할 경우, AC 어댑터의 사양을 준수하고 실온, 습기, 전기 콘센트에서 분리 할 수 있는지 확인하십시오.
- 임의로 기기를 사용하지 마십시오. 사고나 기기손상을 야기할 수 있습니다.
- 혈압 측정을 하기 위해서, 일시적으로 동맥 혈액의 흐름이 멈출 만큼 커패를 압박하여야 합니다. 이를 통해 팔에 지혈, 통증, 붉은 점 등 이 발생할 수 있습니다. 이 상태는 측정이 연속적으로 반복될 때 특히 나타나며 시간이 흐르며 따라 장시간으로 돌을니다.
- 에어호스 인한 염류아 또는 아동의 목줄림 사망, 상해가 발생할 수 있도록 주의하십시오.
- 측정중에 에어호스가 꼬이지 않도록 하여 주십시오. 연속적인 커패 압박이 발생하여 상해를 일으킬 위험이 있습니다.
- 장은 혈압측정은 혈행에 해로운 수 있습니다. 반복적인 측정으로 인해 혈액 순환의 장기적인 장애를 초래하지 않는지 점검하십시오.
- 유압장치제를 받은 적이 있는 사용자는, 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.
- 아이들이 직접 기기를 사용하지 하거나, 아이들의 손이 닿는 곳에 기기를 놓지 않아주십시오.
- 저온 부동층을 위하여 사용 금지, 저온의 위험이 있습니다.
- 휴대용 기기, 휴대전화, 무선 전화, 휴대용무선기 등이나 그들의 기지국에서 혈압계에 영향을 미칠 수 있으므로, 이 기기들과 혈압계는 최소 3.3 미터의 거리를 두고 보관해야 합니다.

급 기

기기의 적절한 사용을 위하여 다음 주의사항을 준수하여 주십시오.

- 다른 의료용 전기기기를 부착한 팔에 커패를 감지 않아 주십시오.
- 기기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 리튬 배터리를 사용하지 위하여 필에 실패 순환 장애를 가진 사용자는 기기 사용 전 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- 측정 결과에 스스로 판단하고 자가치료를 시작하지 마십시오.
- 결과의 정확와 치료는 항상 의사와 상의하십시오.
- 상한된 팔에 커패를 착용하지 마십시오.
- 신장액 수액을 주입하거나 수혈을 받고 팔에 커패를 착용하지 마십시오. 부종이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 마취 가스 등의 가연성 기스가 존재하는 장소에서 기기를 사용하지 마십시오. 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 고압산소실 또는 산소 탱크와 같은 고농도 산소 환경에서 기기를 사용하지 마십시오. 화재나 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

4. 각 부분의 명칭과 표시

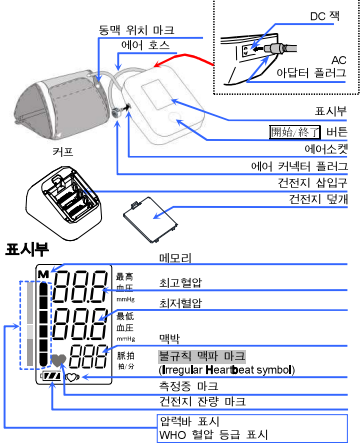

5. 기 호

기기 표시부에 나타나는 기호

기호	기능 및 의미	대응 방법
♥	현재 측정이 진행 중임을 표시	맥박이 감지 되었을 때 깜박가면, 측정중에는 움직이지 마십시오.
♥	불규칙 맥박 마크는 불규칙 맥박이 감지되었을 때 나타납니다. 떨림 혹은 혼동림과 같은 진동이 감지되면 나타나는 경우도 있습니다.	---
M	메모리에서 저장된 이전 측정값	---
전선지 동향 표시	측정중 순환의 방향 표시	---
전선지 동향 표시	전선지 동향이 적을 때 깜박입니다.	전선지 전채를 새것으로 교체하여 주십시오.
Err	측정중 움직임으로 인해 혈압측정에 실패한 경우	재측정 하십시오. 측정중에는 움직이지 마십시오.
Err	최고혈압과 최저혈압의 차이가 10 mmHg 이하인 경우	---
Err	가압시 압력이 증가하지 않는 경우	---
Err	커패가 빠르게 착용되지 않은 경우	커패를 올바르게 착용한 후 재측정 하십시오.
Err	맥박 감지 장애	맥박이 정확히 감지되지 않은 경우
Err	기타 내부적 에러	전선지를 기기로부터 분리하고 [초기화] 버튼을 누르십시오. 그 다음 전선지를 재 삽입 해도 작동하지 않을 경우, A&D 지정업소에 문의하여 주십시오.

기기 외장박스에 인쇄된 기호

기호	기능 및 의미
開始/停止	대기 및 시작 버튼
最高血圧	최고혈압(mmHg)
最低血圧	최저혈압(mmHg)
脈拍	맥박(분당)
電圧	전선지 설치 안내
---	직류
人	Type BF: 본체, 커패와 튜브는 전기적 쇼크를 예방하도록 설계됨
20mmHg	제조년
SN	시리얼 넘버
메뉴얼 참조	---
DC 전원의 극성	---
IP	방수방진 기호
전조하게 유지	---

6. 사용전 준비

6.1. 전선지 삽입 및 교환 방법

- 전선지 덮개를 밀어서 내립니다.
- 사용한 전선지를 전선지 삽입구로부터 분리합니다.
- 새 전선지를 그림과 같이 (+), (-) 표에 맞추어 넣고 전선지 커패를 밀어 올리며 닫습니다.
- 전선지는 R6P, L6B 또는 AA 전선지를 사용하십시오.

주의 사항

- 만약 기기가 정상적으로 작동하지 않을 시에는 전선지의 방향이 올바른지 확인하여 주십시오.
- 포시부의 (전량부족마크)가 깜박이면 모든 전선지를 새것으로 교체하여 주십시오. 낡은 전선지나 새 전선지를 혼용하여 사용하면 전선지 수명이 단축되거나 고장의 원인이 됩니다. 기기를 종료한 후 약 2초이상 지난 후에 전선지를 교체하여 주십시오.
- 전선지가 완전히 소모되었을 경우 (전량부족마크)가 나타나지 않습니다.
- 전선지 수명은 주위 기온에 따라 변화하며, 낮은 기온에서는 전선지 수명이 단축될 수 있습니다. 일반전선지, 신평 R6P 전선지는 1년 2회 측정 시 약 3개월간 사용할 수 있습니다.
- 지정된 전선지만을 사용하십시오. 부족함으로 들어 있는 테스트용 전선지의 경우, 전선지 수명이 짧을 수도 있습니다.
- 기기를 장시간 사용하지 않는 경우에는 전선지를 기기로부터 분리하여 주십시오. 전선지 약이 새어 나와 고장의 원인이 됩니다.

6.2. 에어 호스 연결

에어 커넥터 플러그를 에어 호스에 연결합니다.

6.3. AC 어댑터 연결

- DC 측에 AC 어댑터 플러그를 삽입합니다. 그리고 나서, 콘센트에 어댑터를 꽂습니다. **AC 어댑터는 반드시 판매되고 있습니다.**
- AC 어댑터를 전기 콘센트에서 분리할 때, AC 어댑터의 머리부분을 잡은 채 분리하여 주십시오.
- AC 어댑터 플러그를 혈압계에서 분리할 때, AC 어댑터 플러그의 머리부분을 잡은 채 혈압계에서 분리하여 주십시오.

6.4. 적절한 커패의 선택

정확한 측정을 위해서는 적절한 커패의 사용이 중요합니다. 만약 커패 사이즈가 맞지 않으면 팔길이가 부정확하게 나올 수 있습니다.

- 팔목 사이에는 커패에 안들어와 있습니다.
- 커패는 소모품입니다. 낡아지면 새로 구입하여 주십시오.

팔목 사이즈	추천 커패 사이즈	카드로그 번호
31cm - 45cm	대형 성인용 커패 (Large adult cuff)	AXP-LADN4K2K103
22cm - 32cm	성인용 커패 (Adult cuff)	AXP-AUFN4K2K103

팔목 사이즈 > 팔 둘레 길이
참고: UA-651Plus는 소형 커패(Small Cuff)를 사용할 수 없습니다.


커패에 인쇄된 기호 해석

기호	기능 및 의미	대응방법
●	동맥 위치 마크	●마크가 팔의 동맥위치나, 넷째 손가락 라인에 위치할 수 있도록 커패를 착용하여 주십시오.
REF	카드로그 번호	---
LOT	Lot 번호	---

6.5. 커패의 적용

- 그림과 같이 팔꿈치에서 1-2cm 윗부분에 커패를 착용합니다. 두꺼운 옷은 실패한 맥박과 혈압 측정에 방해될 수 있으므로 피부에 직접 착용하십시오.
- 견이 돌린 소매가 팔을 강하게 압박하면 측정이 정확하지 않을 수 있으므로 주의하여 주십시오.

참고: 측정중에 팔에 강한 압박을 느끼는 것은 정상적인 현상입니다. (놓리자 마십시오)

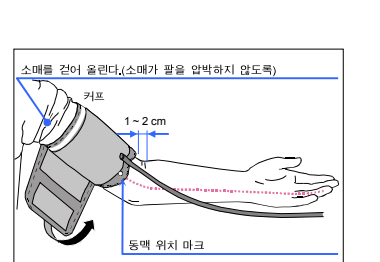

7. 혈압측정

7.1. 혈압측정

- 팔목에 커패를 착용하고(가급적 팔꿈치) 측정중에는 정숙하십시오.
- [초기화/종료] 버튼을 누르십시오. 표시부에 모든 내용이 표시 됩니다. 초자연이 잠시 깜박이며 표시됩니다. 그리고 화면이 측정 시작을 위해 오른쪽 그림과 같이 바뀝니다. 커패의 가압이 시작되면 팔에 강한 압박이 느껴지며 그림과 같이 압력 값이 표시 됩니다. 압력 배 표시 기 능에 의해 측정 중 압력의 진행 정도를 알 수 있습니다.

- 참고: 가압 중에 [초기화/종료] 버튼을 누르면 현재까지 가압을 중지할 수 있습니다.
- 가압이 완료되면 자동적으로 검압이 시작되고 ♥(측정중 마크)가 깜박이면서 측정중임을 나타냅니다. 일단 맥박이 감지되면 마크는 맥박에 맞추어 깜박입니다.

- 참고: 만일 기기에 적절한 가압이 시작되면 ♥(측정중 마크)가 깜박이면서 측정중임을 나타냅니다. 일단 맥박이 감지되면 마크는 맥박에 맞추어 깜박입니다.
- 측정이 완료되면 최고 혈압, 최저 혈압, 맥박이 표시되고 커패에 남아있는 공기는 완전히 배출됩니다.

- [초기화/종료] 버튼을 눌러 기기를 끄니다.

참고: UA-651SL은 본 자동 펌프 기능이 있습니다. 동일일이 재측정을 행하는 경우에는, 적어도 10 분 정도 간격을 두고 측정하시기 바랍니다.

7.2. 예상 최고혈압 설정

만약 체온이 반복적으로 일어나면, 다음을 따라 주십시오. 최고 혈압이 230 mmHg 이상으로 예상되는 경우에는 이 방법을 적용하십시오.

- 커패를 착용합니다.(가급적 팔꿈치).
- [초기화/종료] 버튼을 누릅니다.
- 숫자 "0"이 깜박일 때, 자신의 예상 최고혈압보다 약 30-40 mmHg 높은 수치가 나올 때까지 [초기화/종료] 버튼을 계속 누르십시오.
- 화면은 수직에 도달하면 [초기화/종료] 버튼을 계속 누르고, 한 **7.1 측정 종료**와 같은 방법으로 혈압 측정을 수행합니다.

7.3. 정확한 측정을 위하여

- 편안한 자세로 앉아서 테이블 위에 팔을 올려 놓습니다. 다리를 꼬지 않고 등을 곧게 합니다.
- 편안한 자세로 앉습니다. 손바닥이 위를 향하게 하여, 팔을 테이블 위에 올려놓고 커패의 높이를 눈높이와 일치시킵니다.
- 커패의 중심부를 심장높이와 같게 위치시킵니다.
- 적절한 운동이나 목욕 직후에는 측정을 하지 마십시오. 측정 전 20-30 분 정도 휴식을 취하십시오.
- 혈압은 끊임없이 변동합니다. 어떠한 행동을 하든지, 무엇을 먹고 마시는지에 따라서도 혈압에 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 본 기기는 불규칙맥에 근거하여 측정을 합니다. 따라서 맥이 매우 약하거나 불규칙한 심박을 지닌 경우에는 혈압 측정이 어려울 수도 있습니다.
- 본 기기가 이상한 것을 경우에는 측정이 중단되고 여러 기호가 표시됩니다. **6. 기호**를 참조하십시오.
- 본 기기는 성인용입니다. 소아에게 사용할 경우, 의사와 상의하십시오.
- 혈압 측정은 혈압 값은 시간에 영향을 주십시오.

8. 메모리에 대하여

본 기기는 자동적으로 30 개의 혈압값과 맥박을 저장합니다. 메모리에 저장된 데이터는 오래된 데이터에서 최신 데이터 순으로 각각 번호를 할당하여 저장됩니다. 가장 오래된 데이터는 "no 1"로 보여집니다. 메모리에 저장된 이전 데이터를 보고 있을 때 표시부 좌측 상단에 **M**마크가 나타납니다.

8.1. 데이터 불러오기

- 표시부에 아무런 표시가 없는 상태에서 1 초 이상 [초기화/종료] 버튼을 누르면, 평균 데이터가 나타날 수 있습니다.
 - 평균 데이터가 나타난 [초기화/종료] 버튼에서 손을 뗍니다.
 - 데이터버튼과 저장된 데이터가 최근 데이터부터 자동으로 나타납니다.
 - 모든 데이터가 나타난 후, 자동으로 표시부가 꺼집니다.
- 참고: 만일 데이터를 불러오는 동안 [초기화/종료] 버튼을 누르면, 기기가 종료됩니다.

8.2. 데이터 삭제

- 표시부에 아무런 표시가 없는 상태에서 6 초 이상 "CLR" 마크가 나타나면, 표시부에서 손 떼기.
- 데이터 삭제를 전환 시, "CLR" 표시중일 때 [초기화/종료] 버튼을 눌러 "CLR"을 선택합니다.
- 메모리 마크(M)가 깜박기며 데이터가 삭제됩니다.
- 기기가 자동으로 종료됩니다.


9. 불규칙 맥박(Irregular Heartbeat)란

UA-651Plus는 불규칙 맥박이 감지되었을 때에도 혈압과 맥박을 측정합니다. 불규칙 맥박만 측정 도중 평균 심박에 15% 이상 차이가 나는 것을 의미합니다. 따라서 측정중에는 움직이지 말고 정숙하는 것이 중요합니다.

참고: <>마크가 자주 표시되면 의사와 상담하십시오.

10. 압력 배 표시

측정 중 압력의 진행 정도를 알 수 있습니다.

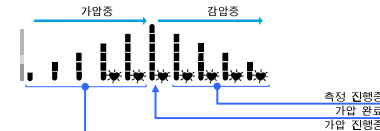

11. 혈압이란 무엇인가? 혈압이란?

혈압이란 혈액에 의하여 동맥에 가해진 힘을 의미 합니다. 최고 혈압은 심장이 수축하였을 때 일어나고 최저혈압은 심장이 확장하였을 때 일어납니다. 혈압은 mmHg 단위로 표시되며, 보통 아침에 공복 상태에서 안정을 취하고 측정한 혈압을 기준으로 합니다.

12. WHO 혈압 등급 표시

각각의 압력 배는 WHO 혈압 등급에서 어느 영역에 위치하는지 알려줍니다.

- 압력 배는 WHO 등급에 맞추어 현재 데이터를 기준으로 표시합니다.

WHO 혈압분류기준	중증 고혈압	중등 고혈압	정상 고혈압	낮은 정상	정상 혈압	저장 혈압
------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

13. 고장이라 생각되면

문제	문제 원인	대처 방법
전원을 켜도 아무런 표시가 없다	전선지가 소모하지 않았습니까?	모든 전선지를 새것으로 교체하여 주십시오.
압력이 올라가 지 않는다.	전선지의 방향이 바르게 되어 있습니까?	전선지를 +/-표에 맞게 다시 넣으십시오.
압력이 올라가 지 않는다.	(전량부족마크)가 깜박이고 있지 않습니까?	전선지를 모두 새것으로 교체하십시오.
측정되지 않는다.	커패를 빠르게 착용하였습니까?	커패를 빠르게 다시 착용하십시오.
측정되지 않는다.	측정중 안정을 취하였습니까?	측정중에는 말하거나 움직이지 말고 안정을 취하십시오.
그 외의 현상	커패가 올바르게 놓여 있습니까?	올바른 자세로 많이 커패의 높이를 심장의 위치에 맞추십시오.
	맥박이 불규칙하거나 매우 약한부분은 측정할 수 없는 경우가 있습니다.	맥박이 불규칙하거나 매우 약한부분은 측정할 수 없는 경우가 있습니다.
	병원에서 의 측정결과가 다릅니다.	측정중에 말하거나 움직이지 말고 안정을 취하십시오. 가장 큰 측정의 경우 외부적 영향으로 인한 혈압상 변동을 감소시킬 수 있습니다.
		전선지를 다시 빠르게 삽입한 후 처음부터 다시 측정하여 주십시오.

주요 위에 언급된 문제 해결 방법을 통해서도 문제를 해결할 수 없을 시에는 A&D 지정 서비스 센터에 문의 하십시오. 임의로 분해하여 부수적인 수리, 개조를 행한 경우에는 보증기간이라 할지라도 유상수리하오니 주의 바랍니다.

14. 유지 보수

본체를 함부로 열지 마십시오. 본 기기에 사용된 복잡하고 정교한 전 자부품과 에어유닛이 손상될 수 있습니다. 만약 본 취급설명서에 설명되어있는 해결 방법을 통해서도 문제를 해결할 수 없을 때에는 A&D 지정 서비스 센터에 문의 하십시오. A&D는 지정 서비스센터에 만 부품 및 기술검사를 제공하고 있습니다.

본 기기는 정기적인 사용할 수 있게 설계, 제조되었습니다만 적절한 기 능 및 정확성을 보충하기 위해 일반적으로 약 2년마다 점검 받을 것 을 권장합니다. 점검 시에는 A&D 지정 업소에 문의 하십시오.

15. 사양

모델명	UA-651Plus	오실로메트릭 방식
측정방법	음력 측정법	
측정범위	압 력 : 0 ~ 299 mmHg	
	맥 박 : 60 ~ 279 mmHg	
	최저혈압 : 40 ~ 200 mmHg	
	맥 박 : 40 ~ 180 회 / 분	
	맥 박 : 23 mmHg	
	맥 박 : 15 %	
	4 x 1.5V 전지 (R6P, L6B 또는 AA) 또는 AC / 아댑터 (R6P, L6B 또는 AA)	
	IEC 60601-1-2:2014	
	최고 측정값 30 회	
	+10°C ~ +40°C / 15%RH ~ 85%RH / 800hPa ~ 1060hPa	
	-20°C ~ +60°C / 10%RH ~ 95%RH	
	약 96 [H] x 68 [H] x 130 [D] mm	
	약 940 g (전선지 미포함 중등)	
	본체 : IP20	

별도 구매용 액세서리

커피	카드로그 번호	커피 사이즈	팔뚝 사이즈
	AXP-LADN4K2K103	대형 성인용 커피	31 cm ~ 45 cm
	AXP-AUFN4K2K103	성인용 커피	22 cm ~ 32 cm

참고: 사양은 사진과 일치 없이 변경될 수 있습니다.