

かんたん操作


# 血圧計のつかいかた

## UA-767PC 取扱説明書

(保証書付き)



《上腕用》

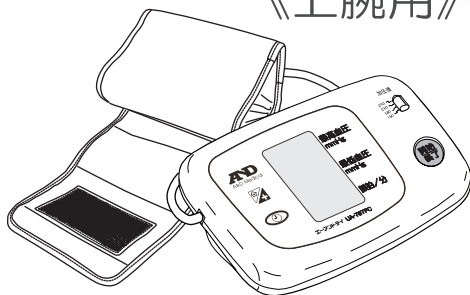

上腕の太さ：22～32 cm



- この度はお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 裏表紙が保証書になっていますので紛失ないように保管してください。

# 使いかた - かんたん操作 -

1

## 電源を準備する


(☞ 5～8 ページ)

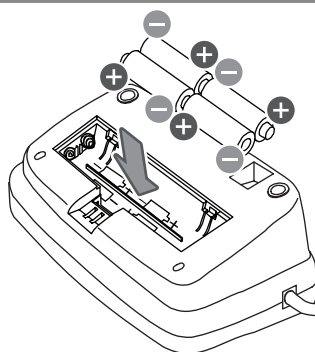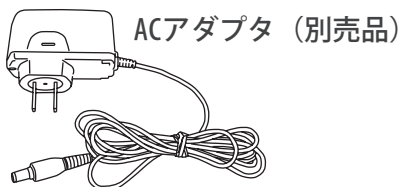

2

## カフを正しく巻く

(☞ 13～14 ページ)

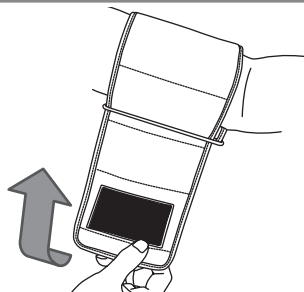


3

## 測定をする

開始/終了スイッチを  
1回押してください。


(☞ 15～20 ページ)

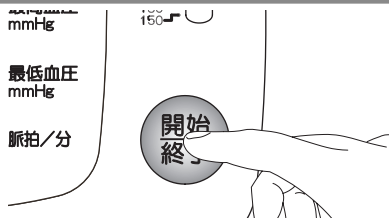

4

## 測定結果を確認する

(☞ 24～26 ページ)

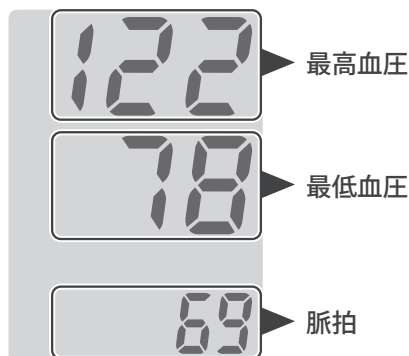

測定結果

## ご使用になるまえに

### 安全上のご注意

#### <必ずお守りください> …… ii

- 一般的な注意事項 …… iii
- ACアダプタ（別売品）の取り扱いについて …… v
- 電池の取り扱いについて …… vi
- 点検・修理について …… vii

#### 血圧測定の前まえに …… viii

#### 確認しましょう …… 1

そろっていますか? …… 1

#### 各部のなまえと表示 …… 3

血圧計本体 …… 3

カフ・液晶表示部 …… 4

#### 電源を準備しましょう …… 5

電池を入れる …… 5

電池を交換する …… 7

ACアダプタ（別売品）を  
使用する …… 8

#### 設定をしましょう …… 9

日付と時刻をあわせる …… 9

## 使いかた

#### カフを巻きましょう …… 13

カフを巻く …… 13

#### 測定をしましょう …… 15

血圧を測定する …… 15

手動加圧で測定する …… 19

#### 便利な機能 …… 21

メモリ機能について …… 21

#### お手入れについて …… 23

お手入れと保管 …… 23

## 血圧まめ知識

#### 血圧について …… 24

血圧とは …… 24

高血圧の症状とは …… 25

脈とは …… 26

## 困ったときは

#### 血圧 Q&A …… 27

どうしてかな?と思ったら …… 27

#### 修理を依頼するまえに …… 28

エラー表示がでたときは …… 28

故障かな?と思ったら …… 29

## 仕様・保証について

#### 仕様について …… 31

仕様 …… 31

#### 保証規定

#### 保証書

# 安全上のご注意 <必ずお守りください>

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



**注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害（\*1）を負うことが想定されるか、または物的損害（\*2）の発生が想定される内容を示します。

- \*1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
- \*2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



**禁止**

⊘ は、**禁止**（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**強制**

● は、指示する行為の**強制**（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**注意**

△ は、**注意**を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## ● 一般的な注意事項

### 注意



禁止

**測定結果をもとに、自己判断で治療しない**

薬剤の服用および治療については医師の指示に従ってください。

※ 守らないと、病気が悪化することがあります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**

※ 守らないと、ケガ・事故の原因になります。

**点滴・輸血中の人には使用しない**

※ 守らないと、体調不良を起こすことがあります

**長時間、繰り返して測定をしない**

※ 守らないと、ケガ・誤測定の原因になります。

**血圧測定以外の目的で使用しない**

※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

**可燃性・支燃性ガスを使用する環境では使用しない**

※ 守らないと、火災・故障の原因になります。

**カフを腕に巻かない状態で加圧しない**

※ 守らないと、故障・誤動作の原因になります。

**衝撃を加えたり、落下させない**

※ 守らないと、故障の原因になります。

**強い静電気や電磁波に近づけない**

※ 守らないと、故障・誤動作の原因になります。



## ● 一般的な注意事項（つづき）

### 注意



禁止

**測定中に携帯電話を使用しない**

※ 守らないと、誤動作の原因になります。

**専用のカフ以外は使用しない**

※ 守らないと、誤測定・誤動作の原因になります。



分解禁止

**分解・修理・改造はしない**

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。



強制

**ペースメーカーなど（体内埋め込み型医用電気機器）を使用している人は、必ず医師とよく相談のうえ、影響のないことを確認してから使用する**

※ 守らないと、病気が悪化することがあります。

**腕部に重度の血行障害のある人は、必ず医師とよく相談の上、影響のないことを確認してから使用する**

※ 守らないと、体調不良を起こすことがあります。

**この取扱説明書をよく読み、理解してから使用する**

※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

**加圧値が 280mmHg をこえそうなときは、ただちに測定を中止する**

※ 守らないと、圧迫により腕に一過性の内出血を起こすことがあります。

**手動加圧をするときは、この取扱説明書（☞ 19～20 ページ）を参照し、正しく使用する**

※ 守らないと、圧迫により腕に一過性の内出血を起こすことがあります。

## ● ACアダプタ（別売品）の取り扱いについて

### 注意



禁止

**タコ足配線で使用しない**

※ 守らないと、火災・感電・誤動作の原因になります。



強制

**コンセントから AC アダプタを抜くときは、AC アダプタ本体を持って抜く**

**血圧計からアダプタプラグを抜くときは、アダプタプラグを持って抜いてください。**

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。

**長時間使用しないときは、必ずコンセントから AC アダプタを抜く**

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。



発火注意

**専用の AC アダプタ（TB-233）以外は使用しない**

※ 守らないと、火災・感電・故障の原因になります。

**AC100V 以外の電源では使用しない**

※ 守らないと、火災・誤動作の原因になります。

**AC アダプタのコードを束にしない**

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。

**AC アダプタのコードの上に物を置かない**

※ 守らないと、火災・感電の原因になります。



感電注意

**ぬれた手で、AC アダプタをコンセントから抜き差ししない**

※ 守らないと、感電・ケガの原因になります。

## ● 電池の取り扱いについて

### ⚠ 注意



禁止

**単3形マンガン（またはアルカリ）乾電池以外は使用しない**

※ 守らないと、故障の原因になります。

**新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない**

※ 守らないと、故障の原因になります。

**電池の⊕ ⊖を間違えて使用しない**

※ 守らないと、故障の原因になります。



強制

**万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す**

**必ず医師の治療を受けてください。**

※ 守らないと、失明など障害の原因になります。

**万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す**

※ 守らないと、ケガなどの原因になります。

**電池は、使い切ったら4本同時に新しいものと交換する**

※ 守らないと、故障の原因になります。

**長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておく**

※ 守らないと、故障の原因になります。

**使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従い処分する**

※ 守らないと、火災・事故の原因になります。



## ● 点検・修理について

### 注意



異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、点検・修理を  
依頼する

強制

※ 守らないと、事故・故障の原因になります。

# 血圧測定の前

## ◎ ご家庭での血圧測定の重要性

高血圧は症状が出ないため放置する人が多く、糖尿病や肥満、高脂血症などと合併して心臓病や脳卒中になり、どうきや息切れなどの症状ができるようになってから身体の異常に気づくため、病状がかなり進行してしまっている場合があるようです。

また、1年に1回の健康診断では、緊張から血圧値が高めに出ることが多く、1回の測定だけで高血圧かどうかの判断はできません。

病気の早期発見や合併症の発症を抑えるためにも、普段から家庭で血圧を測定し、記録しておくことが大切です。

早朝の血圧や日内変動などを含め、通常の血圧値を知り、生活習慣の改善や治療に役立てましょう。

## ◎ 血圧は常に変動しています

血圧は心臓の動きに合わせて一拍ごとに変動する大変デリケートなものです。1日のうちご自分では気付かないうちに、いろいろな状況に応じて30～50mmHgの変動をすることがあります。

また、寒い時期は、体温の発散を防ぐために血管が収縮するため血圧が上昇しやすく、夏期は逆に血圧が低くなる傾向があるようです。

こうした外的要因のほかに、ストレスや感情の起伏といった精神的なものが原因で大きく変化することがあります。つまり、測るときの状況で測定値に大きな差が出てしまうわけです。

そこで、測定による誤りをできる限り防ぎ、正しい測定値を求めるためには、本人による継続的な測定が、たいへん重要になるわけです。

<血圧を変動させる主な要因>


- |          |             |
|----------|-------------|
| 1. 運動    | 5. 飲酒、喫煙    |
| 2. 興奮や緊張 | 6. 睡眠不足     |
| 3. 食事    | 7. 温度や環境の変化 |
| 4. 入浴    | 8. 肥満       |

測定のコツは、毎日同じ時間に、5分程度安静にしてから正しい姿勢で測定することです。

また、日常の血圧変動を知るには、定期的に起床時、食事前や就寝前など1日のうち何回か測定しましょう。

これらの血圧情報は医師の診断時に大変役に立ちます。

血圧値の判断は医師にご相談ください。

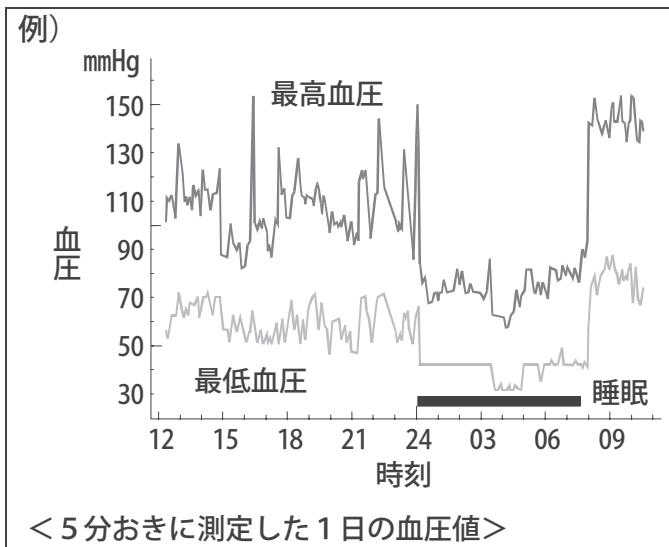

●病院で 140/90mmHg 以上、家庭で 135/85mmHg 以上\*の方は  
高血圧とされています。

\* 日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2004 年度版

## ● 病院と家庭で測定した値が違う場合があります

医師や看護師に血圧を測ってもらおうと、一時的に緊張して家庭で測るよりも 20 ～ 30mmHg 高くなる場合があります。  
自宅での自分の平常値を知ることが大切です。

## ● 血圧は正しい姿勢で測定してください

正しい血圧を測定するために次のことを心掛けてください。

- 背筋を伸ばして、姿勢よく座ってください。
- カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。
- リラックスして、安静にしてください。
- 身体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。






# 確認しましょう

## そろっていますか？

最初に、次のものがそろっているか確認してください。  
万一、不足のものがありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様  
相談センター (☎ 0120-514-016) までご連絡ください。


1

### 血圧計本体

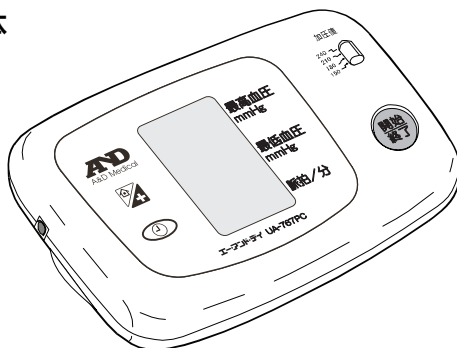

2

### カフ（上腕の太さ：22～32cm）

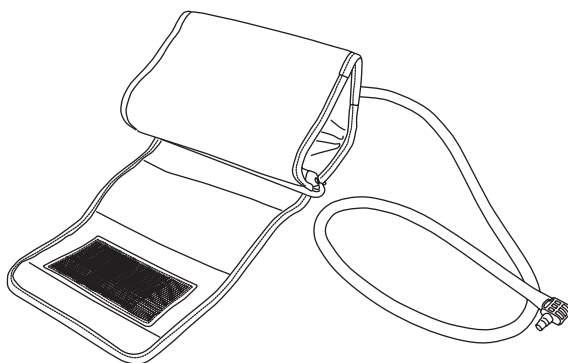

📢 お知らせ


● カフは消耗品です。



## そろっていますか？（つづき）


3

お試し用  
単3形アルカリ乾電池  
（4本）

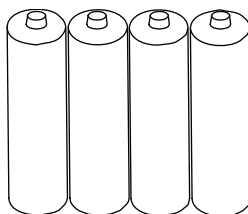

4

収納ケース

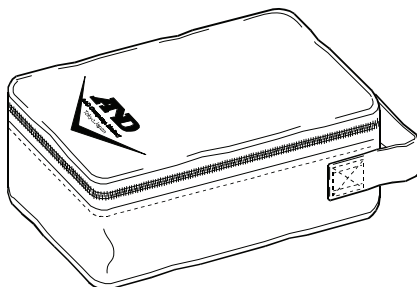

5


取扱説明書（保証書付き）・添付文書






# 各部のなまえと表示

## 血圧計本体

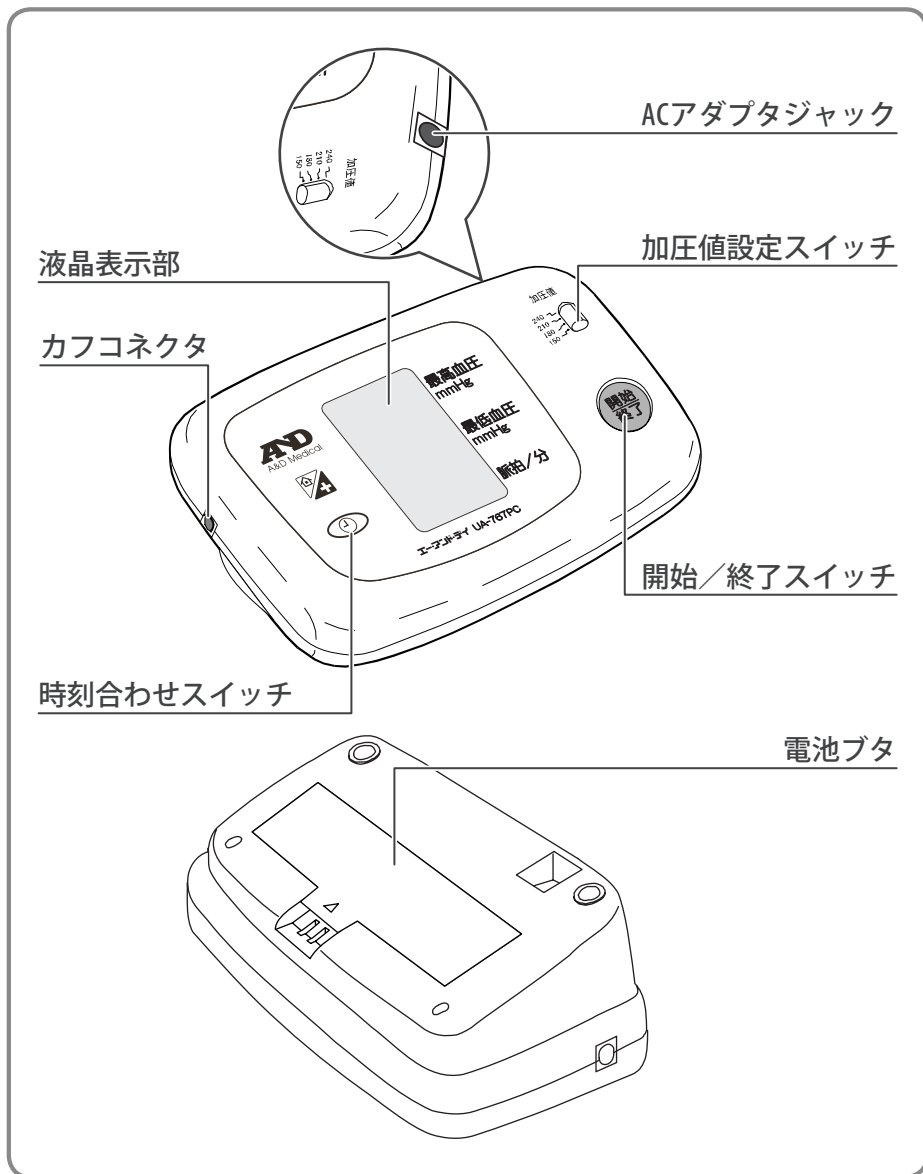


## カフ・液晶表示部

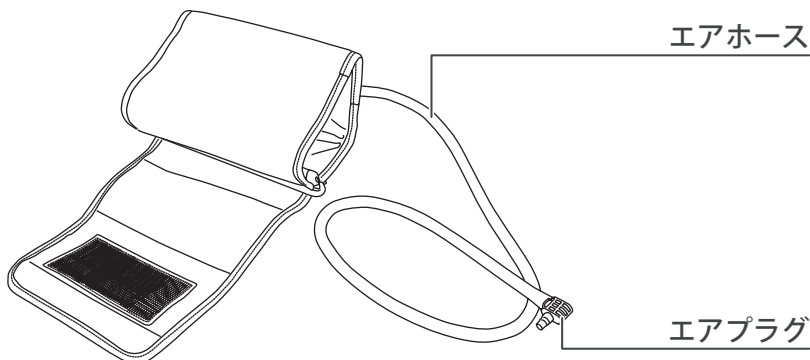

### お知らせ

- 空気漏れの原因となるため、エアホース、エアプラグの抜き差しはしないでください。

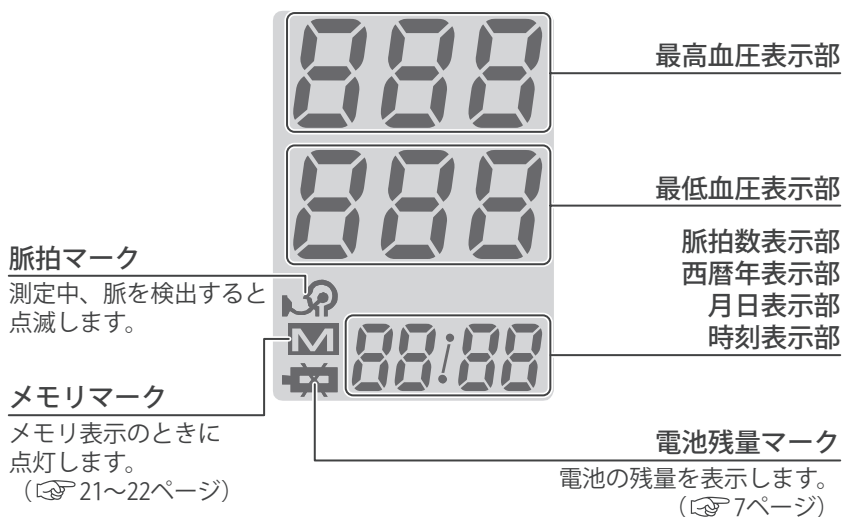





# 電源を準備しましょう

## 電池を入れる


### お知らせ

- 単3形マンガン乾電池で約200回測定できます。  
(室温 23°C、180mmHg 加圧の場合)
- 電池の寿命は、周囲の温度により変わります。冬場など、気温の低いときには短くなります。
- 本製品に付属の電池はお試し用のため、上記の寿命より短い場合があります。
- 単3形マンガン（またはアルカリ）乾電池は、お近くの販売店でお買い求めください。

1

血圧計本体を裏返す

本体裏側

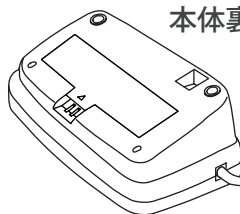


2

電池ボタンを開ける

電池ボタンのツメを矢印の方向に引き上げ、開けてください。

電池ボタン

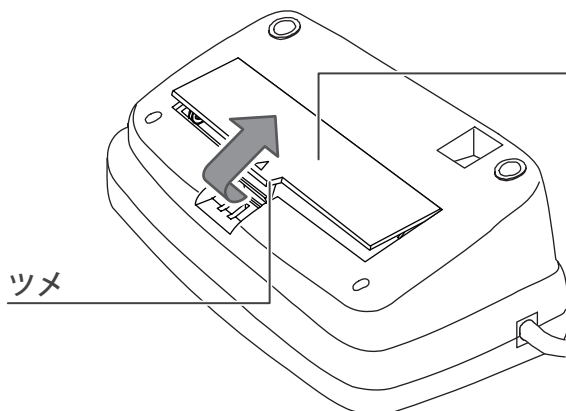

ツメ




## 電池を入れる (つづき)

3

### 電池 (4本) を入れる


プラス (+)・マイナス (-) を間違えないように入れてください。

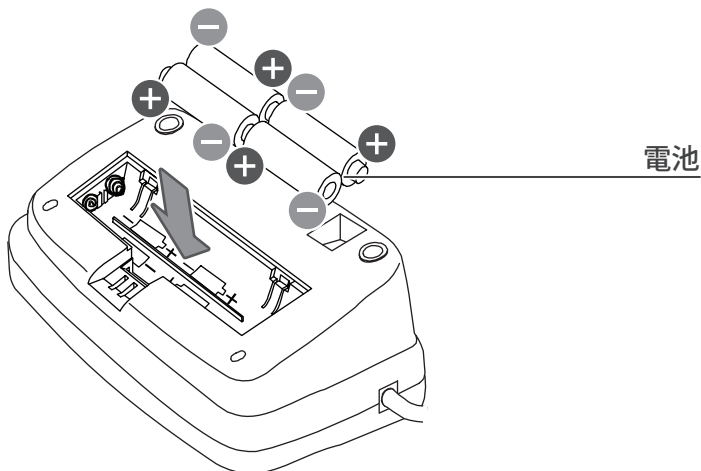

4

### 電池ボタンを閉める


電池ボタンを矢印の方向にすべらせて押さえ、「カチッ」と音がするまで閉めてください。

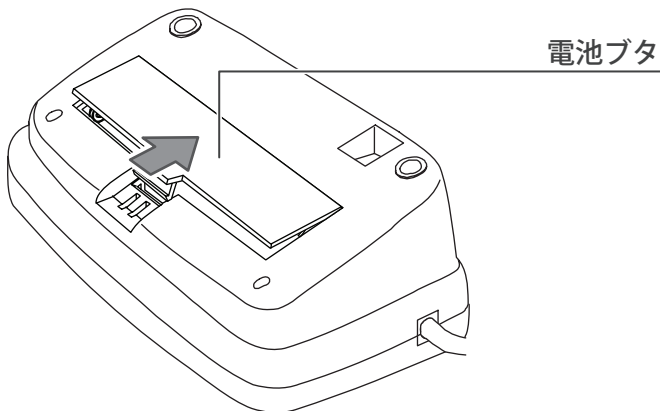



## 電池を交換する

電池の交換は、液晶表示部の電池残量マークを目安にしてください。

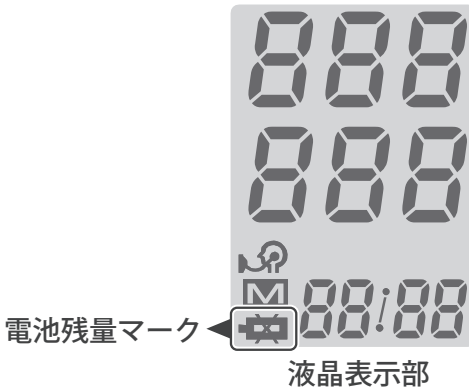

### 電池残量マーク

### 電池の状態



表示が点灯する場合は、新しい電池と交換してください。  
(☞ 5～6 ページ)

表示なし

完全に消耗しています。新しい電池と交換してください。  
(☞ 5～6 ページ)

### お知らせ

- 電池は4本同時に、4本とも同じメーカーの同じ種類のものと交換してください。
- 電池の交換は30秒以内で行ってください。  
30秒をこえると、メモリした測定値が消去（リセット）されます。


## ACアダプタ（別売品）を使用する

専用のACアダプタ（別売品）を使用すると、コンセントから電源を取ることができます。

### お知らせ


- ACアダプタのみで使用している場合、ACアダプタをコンセントから抜くと、メモリした測定値が消去（リセット）されます。  
ACアダプタと電池を併用してください。
- 電池と併用している場合でも、電源のついていないACアダプタのプラグがACアダプタジャックに差し込まれていると、メモリした測定値が消去（リセット）されます。  
ACアダプタをコンセントから抜くまえに、ACアダプタのプラグをACアダプタジャックから抜くようにしてください。

### 1 ACアダプタを コンセントに差し込む

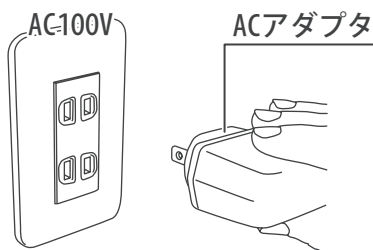

### 2 プラグをACアダプタジャックに差し込む

ACアダプタのプラグを、本体側面のACアダプタジャックに差し込んでください。

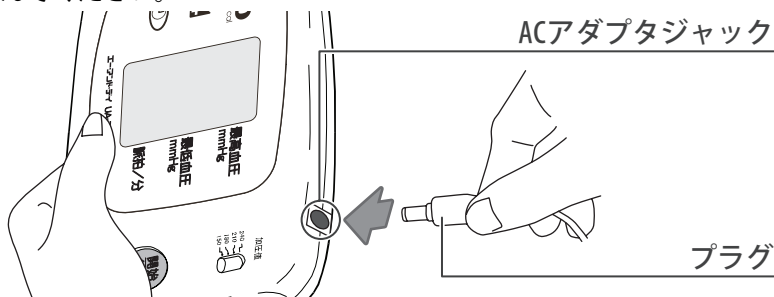



# 設定をしましょう

## 日付と時刻をあわせる


### お知らせ

- 初めてお使いになるときや、電池の交換時、または AC アダプタ（別売品）使用時に、電源が接続されていない状態が約 30 秒間つづくと、設定した日時が消去（リセット）されます。  
設定した日時が消去（リセット）された場合は、もう一度設定してください。
- 各設定中は後戻りできません。  
設定を間違えたときは、最初からやりなおしてください。
- 設定を途中で終了したいときは、開始／終了スイッチを押してください。
- スイッチを操作しない状態が約 30 秒間つづくと、自動的に日時設定が終了します。
- 血圧の測定中は、日時設定を変更できません。

1

### 時刻合わせスイッチを押す

"西暦年" の表示が点滅して、日時設定が可能になります。

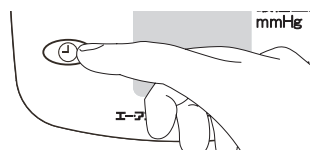

時刻合わせスイッチを押す




"西暦年" が点滅

2


### 開始／終了スイッチを押して、"西暦年" をあわせる

1 回押すと 1 年ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

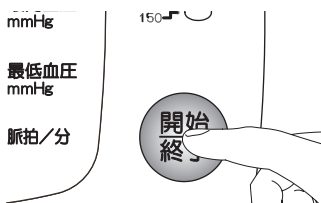


## 日付と時刻をあわせる (つづき)


- 3** "西暦年"をあわせたら、時刻合わせスイッチを押す  
"月/日"の"月"表示が点滅します。

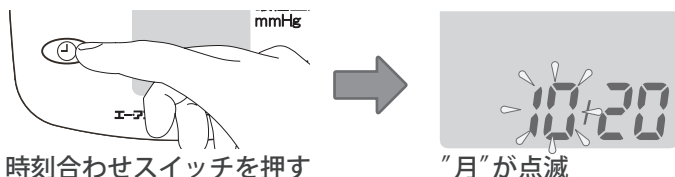


- 4** 開始/終了スイッチを押して、"月"をあわせる  
1回押すと1ヶ月ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

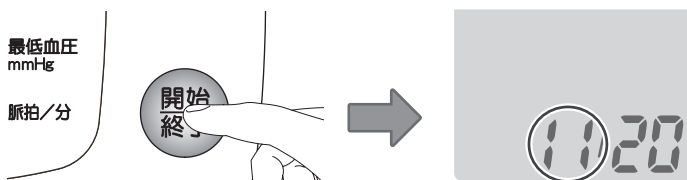

- 5** "月"をあわせたら、時刻合わせスイッチを押す  
"月/日"の"日"表示が点滅します。

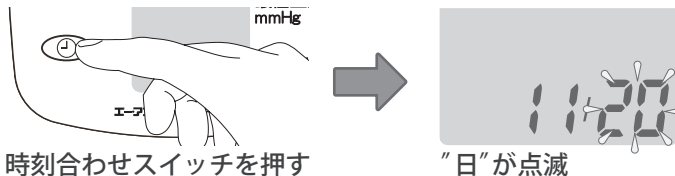



- 6** 開始/終了スイッチを押して、"日"をあわせる  
1回押すと1日ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

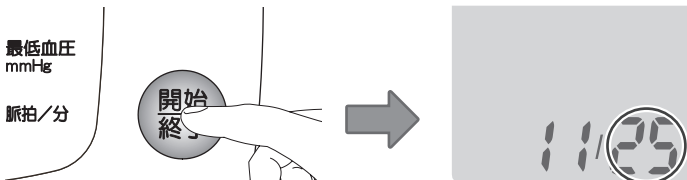



7

”日”をあわせたら、時刻合わせスイッチを押す  
”時：分”の”時”表示が点滅します。

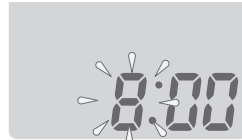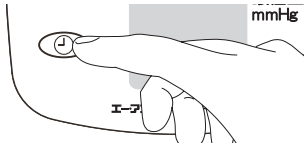


時刻合わせスイッチを押す

”時”が点滅

8

開始／終了スイッチを押して、”時”をあわせる  
1回押すと1時間進み、押しつづけると早送りされます。


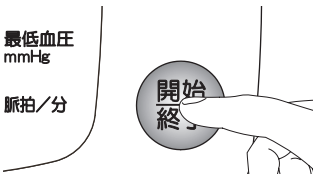


最低血圧  
mmHg

脈拍/分

9

”時”をあわせたら、時刻合わせスイッチを押す  
”時：分”の”分”表示が点滅します。

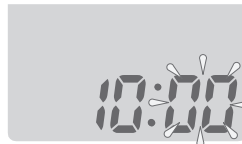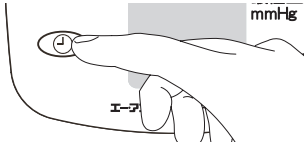


時刻合わせスイッチを押す

”分”が点滅

10

開始／終了スイッチを押して、”分”をあわせる  
1回押すと1分ずつ進み、押しつづけると早送りされます。

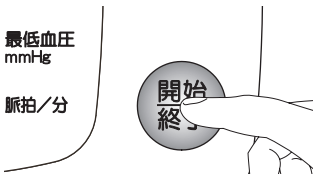


最低血圧  
mmHg

脈拍/分

## 日付と時刻をあわせる (つづき)

11

"分"をあわせたら、時刻合わせスイッチを押す  
日時設定が終了します。

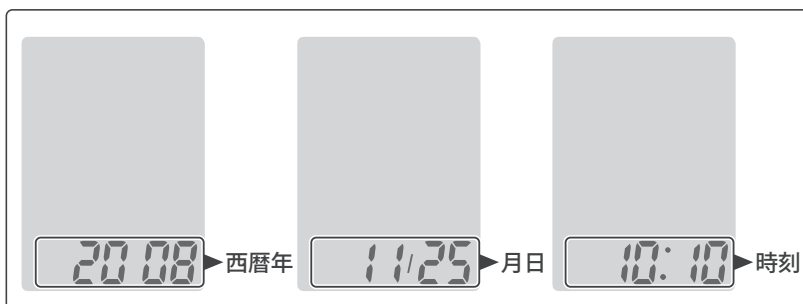





# カフを巻きましょう

## カフを巻く


### お知らせ

- 素肌に直接巻いてください。
- 厚手の着衣は脱いでから巻いてください。
- 左腕に巻くことができないときは、右腕に巻いてください。

### 左腕に巻く

#### 1 カフを筒状に広げて腕をとおす


カフに腕をとおし、上腕まで引き上げてください。

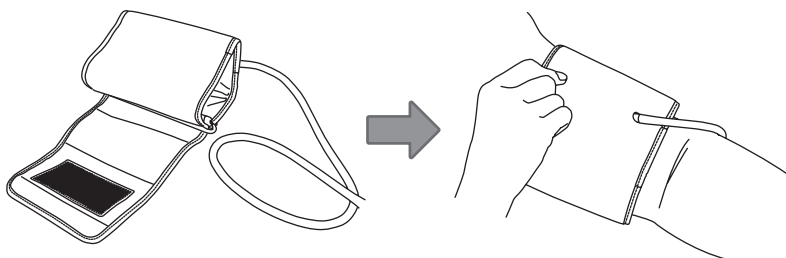

#### 2 手のひらを上に向け、カフの位置をあわせる

手のひらを上に向け、カフの位置をひじの関節から2～3cm 上側にあわせてください。


また、カフのマーカが小指の延長線上にくるようにしてください。

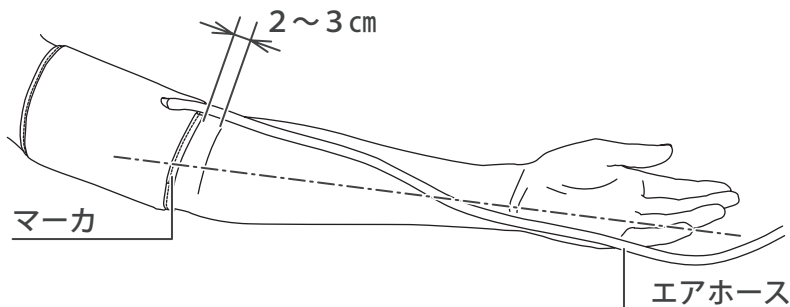

## カフを巻く (つづき)

### 3 カフを巻きつける


カフの端を手前に引きながら、上腕に巻きつけてください。

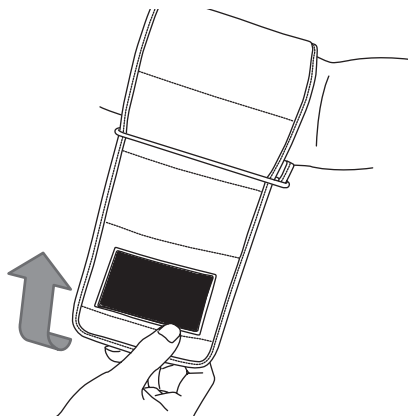

### 4 面ファスナーでとめる

カフと上腕の間に、指が1～2本入る隙間ができるように巻いてください。


面ファスナー

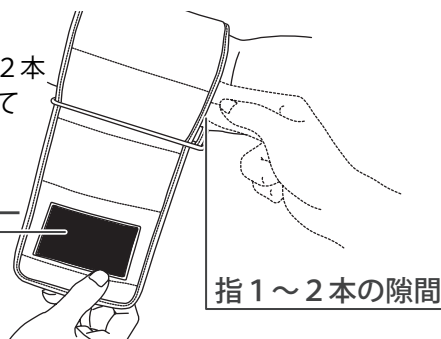

### 右腕に巻くときは・・・

カフのマーカが小指の延長線上にくるようにしてください。

マーカ

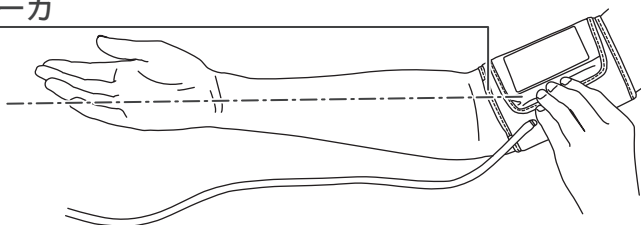



# 測定をしましょう


## 血圧を測定する

### 1 カフを正しく巻く

(☞ 13～14 ページ)

### 2 エアプラグを確認する


エアプラグがカフコネクタにしっかりと差し込まれているか確認してください。

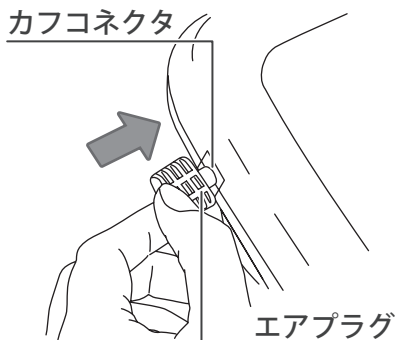


### 3 正しい姿勢で座る

背筋を伸ばし、体の力を抜いてください。

(☞ x ページ)

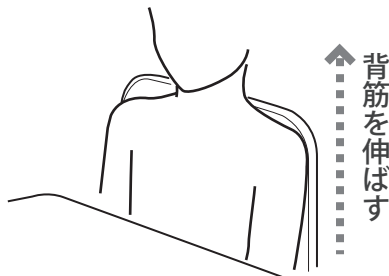


### 4 腕をテーブルや台にのせ、 手のひらを上にして かるく開く

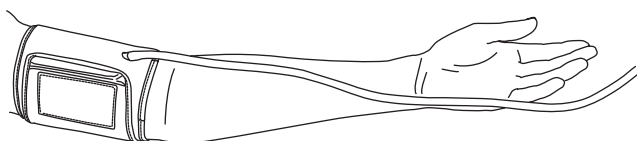

## 血圧を測定する（つづき）

### 5 カフの中心が心臓の高さになるようにする


テーブルやイスの高さを調節したり、ひじの下にクッションなどを入れて調節してください。

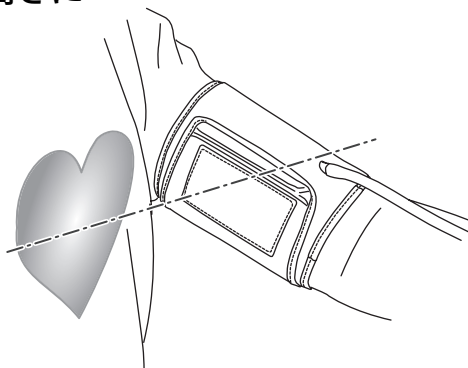

### 6 加圧値を設定する

下の表を目安に、自分の予想最高血圧より30～40mmHg 高く設定してください。

#### 加圧値

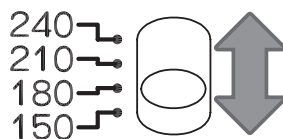

加圧値	予想される最高血圧
150mmHg	～ 120mmHg
180mmHg	120mmHg ～ 150mmHg
210mmHg	150mmHg ～ 180mmHg
240mmHg	180mmHg ～ 210mmHg

#### お知らせ


- 高血圧気味の方は、一段上の加圧値に設定してください。
- 加圧値を低く設定した場合、自動的に再加圧が行われます。




7

開始／終了スイッチを押す


電源が入り、確認表示が表示されます。

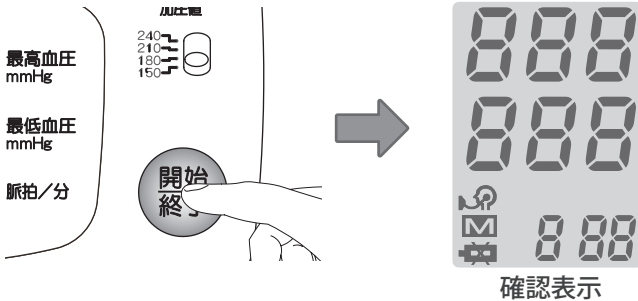

つぎに加圧がはじまり、測定が行われます。

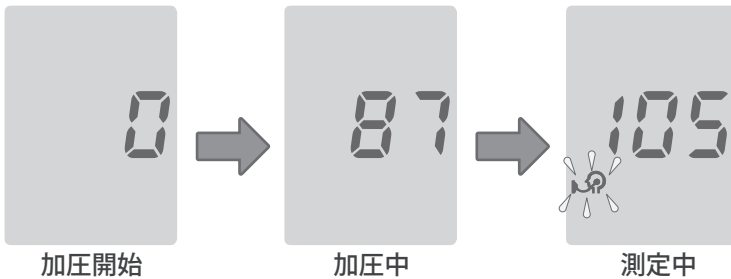

お知らせ

- 脈を検出すると、マークが脈にあわせて点滅し、「ピッ・ピッ・ピッ」とブザー音が鳴ります。

- 測定中に加圧の不足を検出すると、最高2回まで自動的に再加圧が行われます。

測定を中止したい場合、開始／終了スイッチを押してください。


電源が切れ、カフの空気が抜けます

## 血圧を測定する（つづき）

8

### 測定結果を確認する

測定が終了すると、測定結果が表示され、カフに残った空気が抜けます。

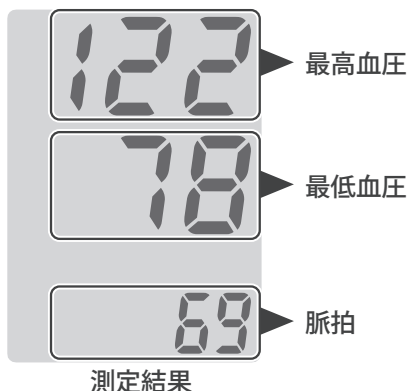


### お知らせ

- 測定が終了すると、「ピーッ」とブザー音が鳴ってお知らせします。

9

### 電源を切る

開始／終了スイッチを押して電源を切ってください。

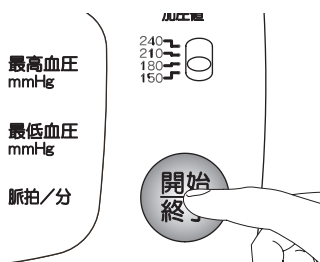

- 電源を切り忘れた場合でも、スイッチを操作しない状態が約1分間つづくと、自動的に電源が切れます。  
(オートパワーオフ機能)




# 手動加圧で測定する

自動加圧で適切な加圧ができない場合は、手動加圧で測定してください。

## 1 開始／終了スイッチを押しつづける


メモリ表示画面になるまで押しつづけてください。

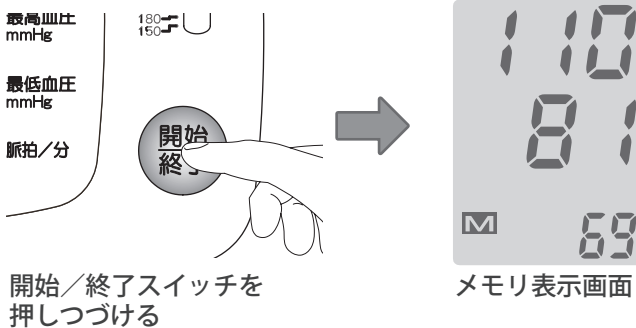

開始／終了スイッチを  
押しつづける

## 2 いったん開始／終了スイッチを押すのをやめ、またすぐに（メモリ表示画面が表示中に）開始／終了スイッチを押しつづける

加圧が始まります。

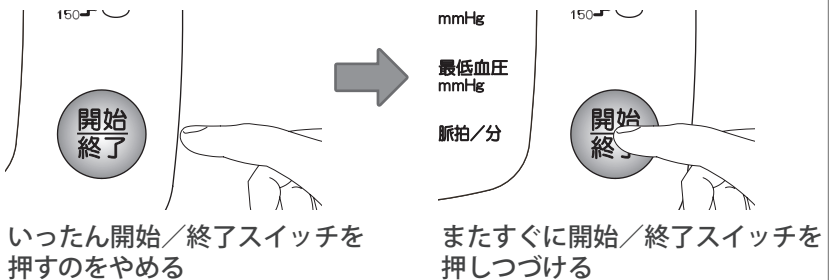

いったん開始／終了スイッチを  
押すのをやめる

またすぐに開始／終了スイッチを  
押しつづける

### お知らせ

- 加圧値が 300mmHg をこえると、自動的に測定を開始します。

## 手動加圧で測定する（つづき）


3

### 開始／終了スイッチを押しつづける

予想される最高血圧より 30～40mmHg 高い値になるまで、開始／終了スイッチを押しつづけてください。



予想される最高血圧値より  
30～40mmHg高い値

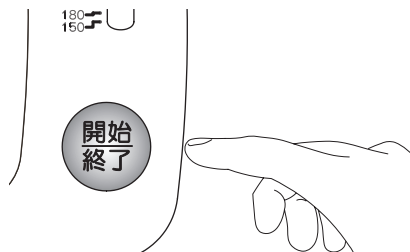

開始／終了スイッチを  
押すのをやめる

### お知らせ

- 加圧値が 320mmHg 以上になると、自動的に急速排気します。





# 便利な機能

## メモリ機能について

この血圧計は、280 回分の測定値を自動的に記憶するメモリ機能をもっています。

測定が 280 回をこえると、一番古い測定値から自動的に消去され、新しい測定値を記憶します。

### お知らせ

- 測定終了後、時刻合わせスイッチを押すと、その測定値は記憶されません。

### メモリを表示するには …

1


#### 時刻表示画面になっていることを確認する

液晶表示部に現在の時刻が表示されていることを確認します。

2

#### 開始／終了スイッチを押しつづける

メモリ表示画面に変わり、もっとも新しい測定値から順に表示(約3秒間)されます。

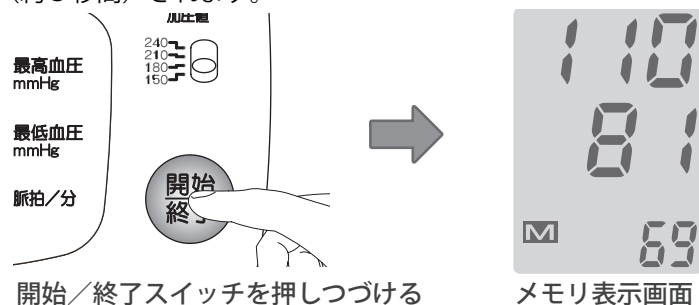

### お知らせ

- 血圧測定中は、メモリを表示できません。
- 一番古いメモリを表示し終わると、時刻表示画面に戻ります。
- メモリの表示中に開始／終了スイッチを押すと、表示を中断して測定を開始することができます。
- 測定値が記憶されていない場合は、数値表示がすべて0を表示します。

## メモリ機能について (つづき)

メモリを消去するには・・・

1


時刻表示画面になっていることを確認する

液晶表示部に現在の時刻が表示されていることを確認します。

2

時刻合わせスイッチを押しつづける

「ピーツ」とブザー音がして画面表示が消えます。

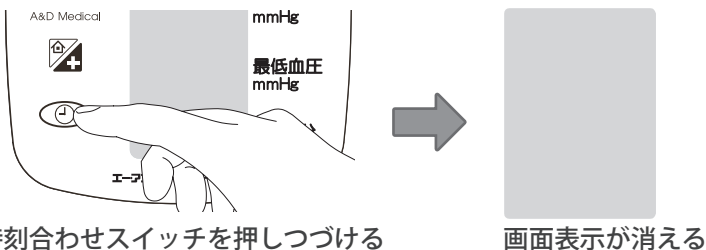

「ピーツ」とブザー音がして、**M**マークが点滅します。



その後、時刻表示画面に戻り、すべてのメモリが消去されます。

お知らせ

- 記憶されているメモリがすべて消去されます。
- 消去したいメモリを選択することはできません。



# お手入れについて

## お手入れと保管

血圧計が汚れたときは、次の手順で水や中性洗剤をしみこませた布で拭いてください。

汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きをしてください。

### お手入れの注意

- ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- カフは、洗濯したり、ぬらしたりしないでください。

### 保管の注意

- 高温・多湿、直射日光、ホコリの多い場所は避けてください。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、電池を取り出してください。
- カフおよびエアホースを無理に折り曲げないでください。



# 血圧について

## 血圧とは


血液は、心臓のポンプ作用によって左心房から動脈内に送りだされ、大動脈 → 細動脈 → 毛細血管を循環して静脈血となって右心房に戻ってきます。

一般的に血圧と呼んでいるのは、動脈内を流れる血液のもつ機械的な圧力です。心臓が収縮し、その圧力によって血液が送り出されたときの血圧が最も高く最高血圧となり、逆に心臓が拡張して大静脈から血液が返ってきたときの血圧が最も低く最低血圧となります。

通常血圧測定は、上腕を測定部位として行います。

## 血圧分類の基準

血圧分類の基準は、世界保健機構（WHO）と国際高血圧学会（ISH）が制定しています。

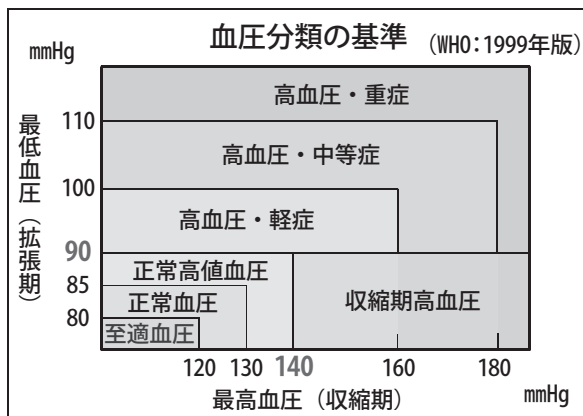

(1999年改訂 WHO/ISH血圧分類による)

- 病院で 140/90mmHg 以上、家庭で 135/85mmHg 以上 \* の方は高血圧とされています。

\* 日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2004 年度版



## 高血圧の症状とは

初期の高血圧症では、頭痛・肩こり・めまい・耳なり・動悸・息切れなどが起こりがちです。また、しびれや眼底出血が起こることもあります。

頭痛は、とくに起床時に、強い後頭部の頭重感があります。ときには、吐き気を伴います。なお、こうした症状は血圧の急激な上昇によって現れることが多いのですが、血圧が高い状態が続くと、あまり自覚症状がなくなってしまうます。

高血圧気味の方は、症状が出ないからといって油断せず、定期的に血圧を測るなどして、健康管理には充分気をつけましょう。

### 高血圧について

なぜ高血圧になるのか、実のところよくわかっていません。

高血圧は、本態性高血圧と二次性高血圧の2つの種類に分けられ、95%以上が本態性高血圧です。

二次性高血圧症は、血圧が高くなる病気によって起こる高血圧症です。腎炎や妊娠中毒、内分泌異常などの影響によります。この場合は、原因となっている病気を治せば血圧も自然に下がります。

一方、本態性高血圧症は、原因がはっきりせず、血圧だけが低い状態のことをいいます。長期にわたるストレスや、塩分の取りすぎ、肥満や遺伝的体質が重なり合って現れるようです。

なかでも遺伝の影響は大きく、両親が高血圧の場合は約60%、片親が高血圧の場合は約30%の確率で子供に高血圧の体質が遺伝するようです。血縁関係者に心当たりのある方は、注意が必要です。

## 脈とは

心臓のポンプ作用によって押し出される血液の拍動が血管に伝わって感じられるのが「脈」です。

この脈は、心臓の上の方にある「洞結節」というところで作られた電気刺激が、心臓内の伝導路を通して心臓全体に伝わり、心臓の筋肉が収縮する作用により血液が送り出されることで発生しています。



# 血圧 Q&A

## どうしてかな？と思ったら・・・



病院で測ったときと、家で測ったときでは測定結果が違うのですが・・・



**A.** 病院では、落ち着いて測定できましたか？

医師や看護師に血圧を測ってもらうと、一時的に緊張して家庭で測るよりも 20～30mmHg 高くなることがあります。



測定値が測るたびに違うのですが・・・



**A.** 毎日同じ時間帯に測定していますか？

正しい血圧管理のために、毎日同じ時間帯に測定してください。



**A.** 血圧はいろいろな要因で変動します

家庭で測定したときでも、次のようなときは測定値が変わることがあります。

- 食後の約 1 時間以内
- お酒、コーヒー、紅茶を飲んだ後
- 喫煙の後
- 入浴の後
- 運動の後
- 排尿、排便の後
- 会話



**A.** つづけて測定して、腕がうっ血していませんか？

腕は圧迫されると、手先に血液が溜まる、うっ血状態になることがあります。うっ血を治すには、腕を高く上げ、手のひらを握ったり開いたりしてください。



# 修理を依頼するまえに


## エラー表示がでたときは

エラー表示	原因	内容・対処のしかた
Err1	測定中に腕や体を動かした	腕や体を動かさないようにして、もう一度測定してください。 (☞ 15～18 ページ)
Err2	測定中に腕や体を動かした	
	加圧が不足していた	加圧値の設定を一段上にして、もう一度測定してください。 また、最高血圧値が 210mmHg をこえている可能性がある場合は、手動加圧で測定してください。 (☞ 19～20 ページ)
Err3	カフを正しく巻いていない	カフを正しく巻きなおして、もう一度測定してください。 (☞ 13～14 ページ)
	カフを血圧計本体にしっかり接続していない	カフを血圧計本体にしっかり接続しなおして、もう一度測定してください。 (☞ 13～14 ページ)
Err9	システムエラー	電池を正しく入れなおして、もう一度測定してください。 (☞ 5～6 ページ)
Err	脈拍が正確に測定できない	カフを正しく巻きなおして、もう一度測定してください。 (☞ 13～14 ページ)





## 故障かな？と思ったら

こんなとき	ここを確認	対処のしかた
開始／終了スイッチを押しても何も表示されない	電池が完全に消耗していませんか？	電池を交換してください。 (☞ 5～7 ページ)
	電池の入れかたは正しいですか？	電池を正しく入れなおしてください。 (☞ 5～6 ページ)
圧力があがらない	エアプラグを血圧計本体にしっかり接続していますか？	エアプラグを血圧計本体にしっかり接続しなおしてください。 (☞ 15 ページ)
	 が点灯していませんか？	電池を交換してください。 (☞ 5～7 ページ)
加圧後、すぐに圧力が下がり、測定状態にならない	カフを正しく巻いていますか？	カフを正しく巻きなおしてください。 (☞ 13～14 ページ)
測定できない または測定値が異常に低い(高い)	カフを正しく巻いていますか？	カフを正しく巻きなおしてください。 (☞ 13～14 ページ)
	測定中、安静にしていたか？	測定中は、話したり動いたりせず、安静にしてください。 (☞ x ページ)
	カフの高さは正しいですか？	正しい姿勢で座り、カフの中心が心臓の高さになるようにしてください。 (☞ 16 ページ)

## 故障かな？と思ったら（つづき）

こんなとき	ここを確認	対処のしかた
測定できない または測定値が 異常に低い(高い)	—	不整脈の方や脈の弱い方は、 測定できないことがあります。
ACアダプタ（別 売品）のプラグを 差し込んででも何も 表示されない	専用の AC アダプタ (TB-233) ですか？	専用の AC アダプタを使用して ください。 (☞ 8 ページ)
	ACアダプタのプラグ を正しく差し込んで いますか？	ACアダプタのプラグを正しく 差し込んでください。 (☞ 8 ページ)
	ACアダプタをコンセ ントに正しく差し込 んでいますか？	コンセントに正しく差し込んで ください。 (☞ 8 ページ)
そのほかの現象	病院での測定値と 異なる	腕や体を動かさないようにして、 もう一度測定してください。 (☞ 15 ~ 18 ページ)
	—	電池を外して正しく入れなおし、 最初から測定をやりなおして ください。

### お知らせ

- 表示された血圧値に関しては、医師にご相談ください。



# 仕様について

## 仕 様

販 売 名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-767
型 名	UA-767PC
測 定 方 式	オシロメトリック方式
測 定 範 囲	圧力：0～280mmHg 脈拍数：40～200拍／分
精 度	圧力：±3mmHg 脈拍数：読み取り数値の±5%
表 示	最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
機 能	メモリ 280回
加 圧	自動加圧方式
減 圧	定降圧自動排気弁方式
排 気	電磁弁による自動急速排気方式
電 撃 保 護	内部電源機器 B 形装着部（電池使用時） クラス II B 形装着部（ACアダプタ（別売品）使用時）
電 源	単3形マンガン（またはアルカリ）乾電池4本（DC6V） AC100V（ACアダプタ（別売品）使用時）
電 池 寿 命	単3形マンガン乾電池4本使用時 約200回 （室温23℃、180mmHg加圧の場合）
外 形 寸 法	幅164（mm）×高さ67（mm）×奥行き111（mm）
本 体 質 量	約310g（電池を除く）
使 用 温 湿 度	+10℃～+40℃、30～85%RH
保 存 温 湿 度	-10℃～+60℃、30～95%RH
付 属 品	お試し用単3形アルカリ乾電池（4本）、 取扱説明書（保証書付き）・添付文書

## 仕様 (つづき)

医療機器 認証番号	219AHBZX00019000
類別	機械器具 18 血圧検査または脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器
製造販売業者	株式会社 エー・アンド・デイ 住所：〒 364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243 電話：0120-514-016（お客様相談センター）

**EMC 適合** 本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2:2001 に適合しています。  
本製品は JIS 規格 JIS T 1115:2005 に適合しています。

※お断り無く仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

# MEMO

A memo template consisting of a dark gray header bar at the top with the word "MEMO" in white, bold, uppercase letters. Below the header is a large white rectangular area with rounded corners, enclosed by a thin gray border. This area contains 18 horizontal dotted lines, evenly spaced, for writing the memo's content.

# MEMO

A large rectangular area with rounded corners, containing 20 horizontal dotted lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a guide for text entry.

# 保証規定

● 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷
- 2 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷
- 3 不適切な修理・改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷
- 4 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
- 5 保証書のご提示がない場合
- 6 保証書にご購入年月日、保証期間、ご購入店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 7 ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換

● 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

● 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**This warranty is valid only Japan.**

※ ご購入店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

# 保証書

このたびは、デジタル血圧計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
この製品が、取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてご購入の販売店または最寄りの弊社・営業所にご持参願います。保証規定に基づき、保証期間内に限り無償で修理・調整いたします。

品名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計
型名	UA-767PC
お客様名	様
ご住所	□□□-□□□□
ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	(必ず販売店にて記入・捺印していただいでください。) 印
保証期間	ご購入日より1年間


**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ** 

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)

製品のお問い合わせはお客様相談センターへ

【受付時間】 月～金（祝日を除く） AM 9：00～12：00  
PM 1：00～5：00

 0120-514-016

〒364-8585

埼玉県北本市朝日 1-243 (株) エー・アンド・デイ FE 課 修理係