



リストバンド型ライフレコーダー クイックガイド

Step1: ライフレコーダーを充電します

1. リストバンド裏面のUSB 蓋を取り外します。
2. リストバンドにUSB ケーブルを接続する。
起動後、充電表示となります。

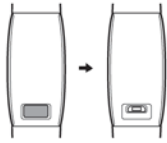

⇒
充電完了

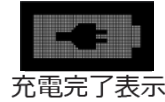

Step2: アプリのダウンロード

1. 「App Store」、「Google play」で「A&D Connect」を検索しアプリをダウンロードします。



※UW-302BLEのAndroid対応アプリは開発中です。近日公開予定

スマートフォンの互換性は
下記のサイトを参照してください。

<http://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/> QRコードはこちら→




Step3: アプリの起動とペアリング

①アプリ起動



②「開始」をタップ

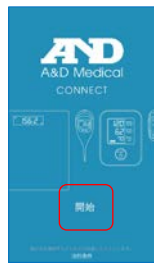

③「機器選択」をタップ



④「UW-302BLE」をタップ




⑤ 下記手順でペアリング操作



⑤アカウント管理に必要な情報を入力します



基本動作

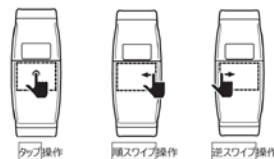

・順(左)スワイプ→表示と移動