




測定結果の確認

アイコンと測定結果が以下の順番で自動的に表示されていきます。

健康機器とのデータ受信が完了していない場合  
[下タップ]操作で、その時表示されているアイコンの測定結果を一定時間表示します。

[タップ]で時計画面に戻る

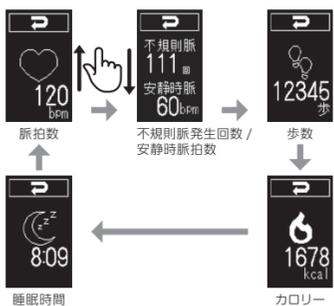

健康機器とのデータ受信が完了している場合



※初期設定されていない場合、測定値は表示されません。


機能

タイマー機能

1 機能画面で[下タップ]操作をしてタイマー画面を表示させ、[下タップ]操作をします。



2 [下タップ]操作でカウントダウンが開始されます。  
※設定した時間が経過すると、本体が振動してお知らせします。

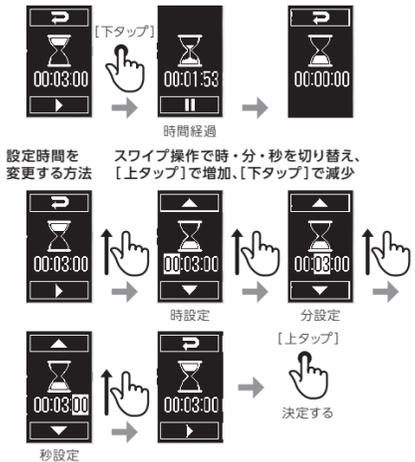

ストップウォッチ機能

1 機能画面で[下タップ]操作をし、[上スワイプ]操作でストップウォッチ画面を表示させます。



2 ストップウォッチ画面で[下タップ]操作をします。  
計測を開始/停止させることができます。



探索機能

1 機能画面で[下タップ]操作をし、[上スワイプ]操作で探索画面を表示させます。



2 探索画面で[下タップ]操作をします。  
探索が開始されます。




※探索機能とは、本製品から受信機器を探す機能です。  
※受信機器側のアプリケーション仕様によっては動作しないことがあります。

記録


1 記録画面で[下タップ]操作をします。  
2 記録する項目を「食事」・「投薬」・「飲酒」・「予備」から[スワイプ]操作で切り替えて[下タップ]で決定します。

設定

設定表示に戻る: [上タップ]

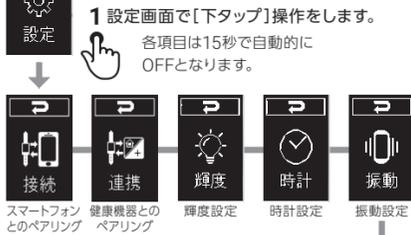

1 設定画面で[下タップ]操作をします。  
各項目は15秒で自動的にOFFとなります。

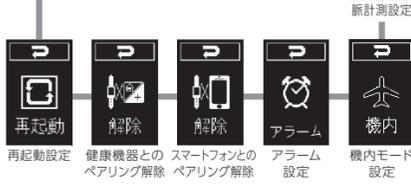


健康機器とのペアリング

1 連携画面で[下タップ]操作をします。



輝度設定

1 輝度調整画面で[下タップ]操作をします。

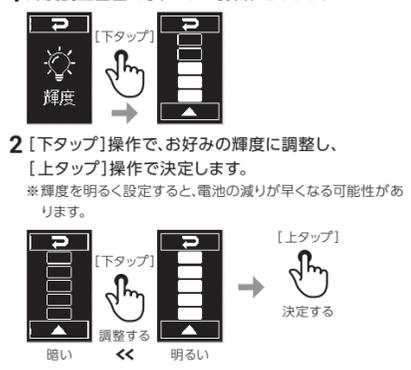


時計表示設定

時計設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で時計表示を選択し、[上タップ]操作で決定します。



振動設定


振動設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で振動のON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。

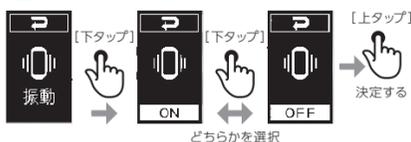

※振動設定をOFFにすると、すべての振動通知機能がOFFとなります。


脈計測設定

1 脈計測設定画面で[下タップ]操作をします。  
2 [下タップ]操作でON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。  
※脈計測設定をOFFにすると、本体裏面の脈拍センサの発光が停止します。

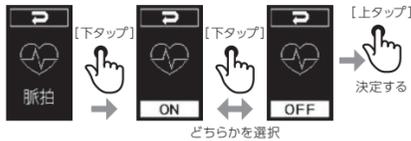


機内モード設定

機内モード設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で機内モードのON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。

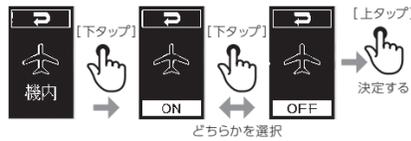

アラーム設定


アラーム設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作でアラームのON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。

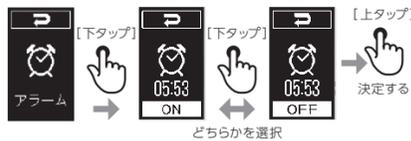

※アラーム時間の変更は、受信機器から行ってください。  
(本体で時間の変更はできません)  
※アラーム設定をOFFにすると、各曜日すべてのアラームがOFFとなります(各曜日でON/OFF設定を行いたい場合は、受信機器から設定を行ってください)


スマートフォンとのペアリング解除

スマートフォンとのペアリング解除画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。  
ペアリング解除が完了すると時計画面が表示されます。

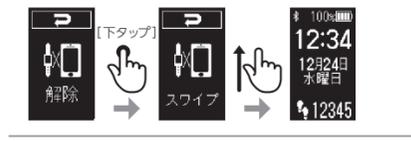

健康機器とのペアリング解除

健康機器とのペアリング解除画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。  
ペアリング解除が完了すると時計画面が表示されます。

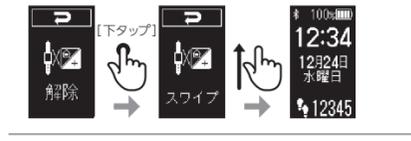

再起動設定

再起動設定画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。  
再起動が完了すると時計画面が表示されます。



機器情報

情報表示に戻る: [上タップ]

情報画面で[下タップ]操作をします。  
各項目は15秒で自動的にOFFとなります。



通知機能

アラーム通知

設定した時間になると、振動と表示でお知らせします。  
[上タップ]でスヌーズを解除します。  
[下タップ]で振動を止め、スヌーズ機能となります。



ウォーク通知

受信機器から設定した時間の範囲で歩行が検知されなかった時に、振動と表示でお知らせします。




目標歩数達成通知

受信機器から設定した目標歩数を達成したときに、振動と表示でお知らせします。



電池残量通知

電池残量が20%を下回った時に、振動と表示でお知らせします。  
速やかに充電を行ってください。

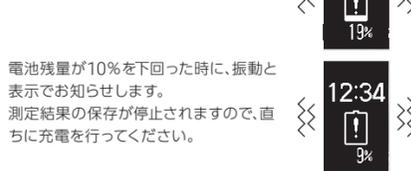

健康機器からのデータ受信

時計表示で[下スワイプ]操作をします。

※接続中表示となり、健康機器の検索を開始します。  
※以下の①～③の場合は[下スワイプ]操作はできません。  
① 健康機器とペアリングが完了していない場合  
② 電池残量が10%未満の場合  
③ 機内モード設定がONの場合



健康機器と接続が成功すると、接続した健康機器のアイコンが表示されます。



※失敗した場合は、もう一度やり直してください。  
測定データの受信が完了すると、測定値が表示されます。



2-4 お手入れについて

お手入れと保管

ライフレコーダーが汚れたときは、水や中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってから拭いてください。その後、乾いたやわらかい布で、から拭きをしてください。

注意

- ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- 水をかけたり、丸洗いをしたりしないでください。
- 高温・多湿・直射日光、ホコリの多い場所は避けてください。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、ケースなどに収納して保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄処分するときは

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になりました場合は家庭ゴミとして捨てず、自治体の定めるリサイクル回収拠点へお持ちください。または、「本製品に対するお問い合わせ先」まで、ご相談ください。本体の分解はしないでください。



3 お問い合わせ等

3-1 修理を依頼する前に

こんなとき	ここを確認	対処のしかた
[下タッチ]操作しても表示されない	電池が完全に消耗していませんか?	充電をしてください(おもて面をご覧ください)
受信機器へデータが送信されない	-	受信機器とペアリングを再度確認してください
健康機器のデータが受信できない	-	健康機器とペアリングを再度確認してください
⚠️が表示された	-	お問い合わせ先へご連絡の上、ご相談ください

※問題が解決しないときには、お問い合わせ先へのご連絡の上、ご相談ください。

3-2 仕様について

製品仕様	
販売名	リストバンド型ライフレコーダー 3
型名	UW-331BLE
表示	時計: 0:00 ~ 23:59 (1分単位) 歩数: 0 ~ 99999歩 (1歩単位)*1 消費カロリー: 0 ~ 9999kcal (1kcal単位)*1 睡眠時間: 0:00 ~ 23:59 (1分単位)*2 脈拍数: 30 ~ 240bpm (1bpm単位) 血圧/脈拍/体温/体重/体脂肪は接続した健康機器の仕様による
通信	Bluetooth® Ver.4.2 Low Energy
電源	リチウムイオン電池 (JHY321223HV) DC3.8V 75mAh
充電方式	専用充電器による充電
充電時間	約75分
連続動作時間	約5日 ※ご利用状況により変動します
メモリ	1分サマリデータ13日分
外形寸法	16.2mm(W)×227mm(L)×11.3mm(H)
動作温度	0 ~ 40°C 15 ~ 85%
保存温度	-15 ~ 60°C 10 ~ 95%
防水	IP57 / IP55
付属品	専用充電器、取扱説明書・保証書

\*1 歩数、消費カロリーは0:00にリセットされます。  
\*2 睡眠時間は12:00にリセットされます。  
※お断りな仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

3-3 保証について

- 保証規定
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
    1. 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷
    2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰せられる故障または損傷
    3. 不適切な修理・改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷
    4. 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
    5. ご使用後の外装面の傷、破損、劣化、外装部品、付属品の交換 ※ご購入店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

本製品に対するお問い合わせは下記のお問い合わせフォームへご入力の上、送信をお願いします。  
<https://www.aandd.co.jp/support/>

