

「リモートモニタ」の付属品

架台 TM-ST100B

【禁忌・禁止】

*使用方法

- ・磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置) を併用しないでください。
[誘導起電力による局所的な発熱または破損の恐れがあります。]

【使用方法等】


1. 使用方法

詳細については取扱説明書を参照してください。

- ① ツマミネジ(2箇所)を架台に差し込みます。
ツマミネジの差し込み位置は、架台の取扱説明書を参照してください。
- ② ツマミネジで製品を固定します。
- ③ 製品を架台に取り付けた後、ガタつきが無いことを確認してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部名称

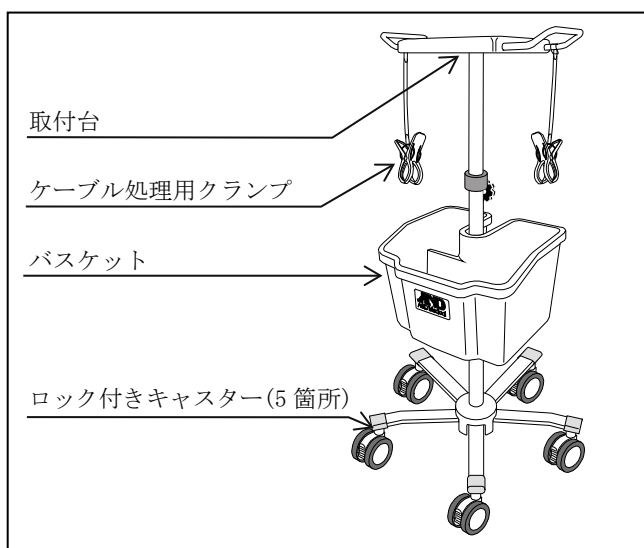

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- (1) 使用前に架台と指定の製品が組立て用ツマミネジで確実に固定されていることを確認してください。
[使用中に製品が落下して事故の原因になります。]
- (2) 架台を改造したり他の用途に使用しないでください。
[事故の原因になります。]
- (3) 架台を移動させる際は、製品の電源プラグを抜き、ケーブル類が移動の際に引っかからないように処理した状態で移動してください。
[転倒の原因になります。]
- (4) 移動以外の時は架台の全てのキャスターをロックしてください。[架台が移動して危険です。]

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温・高湿・直射日光・塩分・硫黄分を多く含む環境・水のかからない場所・振動または衝撃のある場所での保管は避けてください。
- (2) 化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所には保管しないでください。

*2. 構成品

本体	1台
ケーブル処理用クランプ	2個
ツマミネジ+抜け止めワッシャ	2組
取扱説明書	1冊

*3. 本体仕様

外形	: 500 (幅) × 500 (奥行) ×
	700 ~ 1100 (高さ) [mm]
質量	: 約 7.5 kg
安全動作荷重	: 5.0 kg
最大積載量	: 取付台 3.0 kg
	バスケット 2.0 kg

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃・消毒方法

清掃・消毒方法については、取扱説明書を参照してください。

2. 使用者による保守点検事項

(1) 日常点検

架台を正しくお使い頂くために、下記項目の日常点検を実施してください。(始業時の点検を推奨します。)

架台に異常がみられましたら、ME機器相談センターへお問い合わせください。

点検項目	実施内容	頻度
本体	変形、ヒビ割れ、劣化はないか。	始業時
	汚れはないか。	
キャスター	すべてのキャスターは正常に動作するか。	
	すべてのキャスターのロックは、正常にロック/解除できるか。	
バスケット	最大積載量を超えるものを入れていないか。	
高さ調節ネジ	高さ調節ネジを緩めたり締めたりすることができるか。	
	取付台の高さを調節して固定できるか。	
	取付台の高さは適しているか。	
製品取付け	製品を取り付けたときにガタつきはないか。	

(2) 定期点検

架台を安全に正しくお使いいただくために、定期点検を実施してください。(1年ごとの定期点検を推奨します。)

架台に異常がみられましたら、ME機器相談センターへお問い合わせください。

点検項目	実施内容	頻度
本体	変形、ヒビ割れ、劣化はないか。	1年ごと
	汚れはないか。	
キャスター	すべてのキャスターは正常に動作するか。	
	すべてのキャスターのロックは、正常にロック/解除できるか。	
	破損、汚れはないか。	
バスケット	最大積載量を超えるものを入れていないか。	
	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
高さ調節ネジ	高さ調節ネジは締めることができるか。	
	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
ツマミネジ、抜け止めワッシャ	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
ケーブル処理用クランプ	破損、劣化はないか。	
製品取付け	製品を取り付けたときにガタつきはないか。	

3. 業者による保守点検事項

架台を安全に正しくお使いいただくために、定期的な保守点検を実施してください。(1年ごとの保守点検を推奨します。)尚、保守点検は販売店にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
住所 : 〒364-8585 埼玉県 北本市 朝日1-243
電話番号 : 0120-514-016

修理品の受付先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ FE部
〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-19
電話番号 : 0572-707-6644

お問い合わせ先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
ME機器相談センター
電話番号 : 0120-707-188