


販売名： バッテリーユニット TM2570-08

【禁忌・禁止】

- バッテリーユニットを分解、改造しないでください。発熱、発火の原因となります。
- バッテリーユニットを火中に投入したり、過熱しないでください。バッテリーユニットから電解液が噴出したり、バッテリーユニットの破裂、発火の原因となります。
- 本ユニットは、バイタルボックス (TM-2571/TM-2572) 専用です。他機器への流用は行わないでください。
- 病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くで使用しないでください。引火の可能性があります。

【 形状・構造及び原理等 】

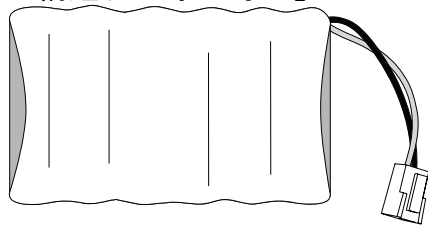

使用バッテリー ... Ni-MH バッテリー

電源定格 7.2V 1100mAh

充電時間 約 15 時間でフル充電

連続使用時間... 約 2 時間

条件： 25℃の環境フル充電の新品バッテリー
 使用カフ血圧測定 10 分間隔プリンタ未使用

1. 標準付属品：

- バッテリーユニット 1 個
- 取扱説明書 1 冊
- 添付文書 1 部

2. 接続可能な機器

- TM-2571/TM-2572
 (医療用具製造承認番号：21700BZZ00279000)



【 使用目的、効能又は効果 】

【使用目的】

オプションのバッテリーユニット(TM-2570-08)をバイタルボックス (TM-2571/M-2572) へ装着することにより、搬送時や電源の無い場所でも測定ができます。

【 操作方法または使用方法等 】

- 本書巻頭の使用上の注意事項を参照し、適切な場所に安全かつ正しい方法で装置本体を設置します。
 - バッテリーには極性があり、向きが決まっています。異なる接続をすると発熱、破裂、発火の原因になります。
- (1) 電源コードをコンセントから外してください。
 - (2) 背面のバッテリーフタのネジ3本を外し、バッテリーフタを外してください。
 - (3) バッテリーのコネクタをバッテリーボックスのコネクタ部に差し込んでください。
 - (4) ケーブルが折れないように所定の向きにバッテリーを収めてください。
 - (5) バッテリーフタのネジで固定してください。

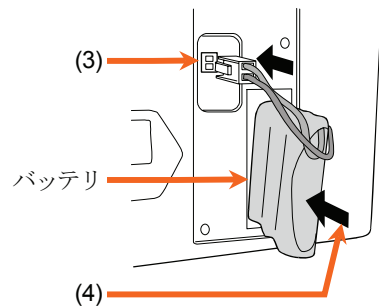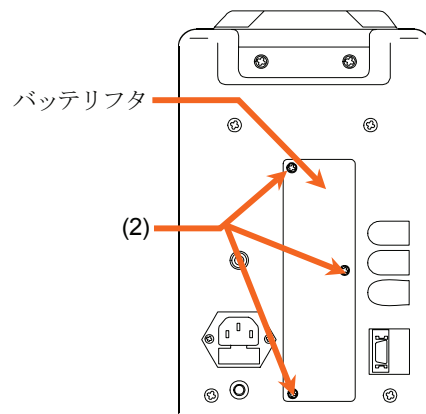

【 使用上の注意 】

- バッテリーユニットを装着、または脱着するときは、必ず血圧計の電源コードをコンセントから抜いて行ってください。コード類を抜く場合は、プラグかコネクタを持って抜いてください。
- 使用可能な時間が短くなったり、使用できなくなったバッテリーユニットは、本体より取り出してください。そのまま本体に装着放置しておくと内部が液漏れで腐食したり、発火することがあります。
- 落下などで変形したバッテリーユニットは使用しないこと。発熱、破裂、発火の原因となります。
- バッテリーに発煙等異常があった場合、使用を中止し、機器に「故障」「使用禁止」等の表示を行ってください。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所。
使用環境条件 温度範囲 : +10 ~ +40°C
湿度範囲 : 30 ~ 85 %RH (結露なきこと)
気圧範囲 : 70 ~ 106 kPa
- 保存環境条件 温度範囲 : -20 ~ +55 °C
湿度範囲 : 95 %RH 以下 (結露なきこと)
気圧範囲 : 70 ~ 106 kPa

【保守・点検に係わる事項】

[注意事項]

- 容量が少なくなったバッテリーは、充電しても使用時間が短い場合があります。
- バッテリーは完全放電/充電を繰り返すことにより活性化する場合があります。
バッテリーの容量が残っている状態で充電を繰り返すと、バッテリー容量が低下し作動時間が短くなってきます。
定期的に完全に使い切って（完全放電）から充電を行ってください。
作動時間が短くなった場合でも、完全放電/充電を繰り返すことによりバッテリー容量が回復する場合があります。
- 能力の低下したバッテリーをそのままお使いになると、液漏れにより機器内部が不足したり、発火する恐れがあります。寿命の短くなったバッテリーは速やかに新しいものと交換し、適切な方法で廃棄処理あるいはリサイクル処理をしてください。
- 機器に水をかけたり、水につけての清掃は絶対行わないでください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤を用いて清掃しないでください。

【 包装 】

本体／付属部品：紙製ダンボール梱包 1個／箱

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
住所 : 〒364-8585 埼玉県 北本市 朝日1-243
電話番号 : 048-593-1434

お問い合わせ先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
ME機器相談センター
電話番号 : 0120-707-188

修理品の発送先

名称 : 〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-19
株式会社エー・アンド・デイ
ME事業本部 FE課
電話番号 : 0572-21-6644

製造業者

名称 : 研精工業株式会社 つくば工場