

類別: 機械器具 21 内臓機能検査用器具 管理医療機器
一般の名称: 多項目モニタ(JMDNコード 33586002) 特定保守管理医療機器
「バイタルセンサS TM-2590」の付属品
バッテリーユニット TM2590-12

* 【警告】

バッテリーから漏液、異臭がするときは火気に近づけないこと。
[漏液した電解液に引火し、破裂・発火する原因になるため。]

* 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. バッテリーユニットを濡らさないこと[ショートにより、発熱、発煙、発火、破裂することがあります。]
2. コネクタの端子部には触れないこと[ショートにより、発熱、発煙、発火、破裂することがあります。また、汚損による導通不良を起こすことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

TM2590-12は、バイタルセンサS(TM-2590シリーズ)及び、リモートモニタS6(TM-2126)のバッテリーユニットです。

1. 各部名称

型名: TM2590-12

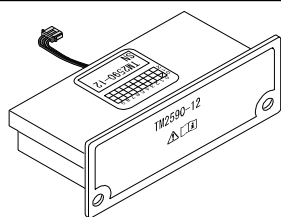

2. 標準付属品

TM2590-12 取付け用ネジ M3x6 2本
添付文書 1部

* 3. 外形寸法及び質量

外形 : 111.5(W) x 50(H) x 49(D) [mm]
質量 : 約 156 g

4. 品目仕様等

* (1) 定格仕様

種類 : リチウムイオン二次電池
定格電圧 : 7.4 V
公称容量 : 2500 mAh (新品時の容量)
動作時間(TM-2590) : 120分以上
(新品バッテリー満充電、血圧測定間隔5分、印字無、輝度設定[2]、周囲温度25℃時)
動作時間(TM-2126) : 240分以上
(新品バッテリー満充電、印字無、輝度設定[2]、周囲温度25℃時)

* (2) 使用/保存環境条件

- 1) 使用環境 周囲温度 : +10 ~ +40℃
相対湿度 : 30 ~ 85%RH (結露なきこと)
周囲気圧 : 70~106kPa
- 2) 保存環境 周囲温度 : -20 ~ +60℃
相対湿度 : 95%RH以下 (結露なきこと)
周囲気圧 : 70~106kPa
- 3) 推奨保存環境 温度範囲 (1年以内) : -20 ~ +20℃
温度範囲 (3ヶ月以内) : -20 ~ +40℃
温度範囲 (1ヶ月以内) : -20 ~ +50℃

【使用目的又は効果】

本品を、組み合わせて使用する医療機器に装着することにより、搬送時や電源の無い場所でも本体を移動することが可能となります。

【使用方法等】

* 1. 組み合わせて使用する医療機器

本品を装着可能な機器は以下の通りです。詳細につきましては弊社営業までお問い合わせください。

【接続可能な医療機器】

型名	承認/認証番号
TM-2590	22300BZX00135000
TM-2126	301A9BZX00018000

2. 使用方法

本品の取付け方および使用方法等は、組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書をご覧ください。

【使用上の注意】

＜禁忌・禁止＞

1. バッテリーユニットの分解
[発熱、発火、破裂するおそれがあり、発生したガスにより喉などを刺激することがあります。]
2. バッテリーユニットの火中投入
[絶縁材の溶解、安全機構の損傷や電解液への引火により、発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。]
3. バッテリーユニットの水中投入
[発熱、発火、破裂することがあり、電気分解による酸素及び水素の発生や、封口部分が嚙食し漏液する原因になります。]
4. バッテリーユニットの加熱
[発熱、発火、破裂することがあります。ストーブのそばなどの高温の場所(80℃以上)で使用したり、放置しないでください。]
5. 衝撃・加圧
[バッテリーユニットに針を刺したり、ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。発熱、発煙、発火、破裂することがあります。]

組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

＜重要な基本的注意＞

間違った取扱いでは本品の性能を著しく劣化させ、場合によっては破損させる恐れがあります。下記事項を注意した上で取り扱ってください。

- (1) 本品の取付け、及び取り外しは、必ず組み合わせて使用する医療機器の電源を遮断してから行ってください。
- (2) 本品の取付け、及び取り外しは、組み合わせて使用する医療機器本体に無理な力がかかからないように注意してください。本体が破損することがあります。
- (3) 本品の使用上の基本的注意事項は、組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を併せてご覧ください。

【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

1ヶ月以上保管する場合は、本体から取り外してください。本体の待機電力によりバッテリーが消耗します。推奨保存環境を守って保管して下さい。

2. 耐用期間

1年〔自己認証（データ）による〕

ただし、これは正規の保守点検などの推奨された環境で使用した場合となります。機器の使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を参照して実施してください。

2. 業者による保守点検事項

本品を正しくお使い頂くために、定期的な保守点検を実施してください。詳細は組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を参照して実施してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
住所 : 〒364-8585 埼玉県 北本市 朝日 1-243
電話番号 : 048-593-1434

お問い合わせ先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ
ME機器相談センター
電話番号 : 0120-707-188

修理品の受付先

名称 : 株式会社エー・アンド・デイ FE部
住所 : 〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-19
電話番号 : 0572-21-6644

組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を必ずご参照ください。