

1. はじめに

このたびは、エー・アンド・デイの体重計 PA6042 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、AD-PR580-009 の取り付け方法について記述したものです。

本器をご理解いただき、十分にご活用いただくためにご使用前に本書をよくお読みになり、いつでも見られるところに大切に保管してください。

2. 開梱

ご使用前に付属品がそろっていること、本体と各付属品に損傷がないことを確認してください。


万一、損傷や内容物に不足がある場合には、お買い求めいただいた販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

取り付け板金.....	1
M3×6mm ネジ.....	2
専用ケーブル K03937.....	1


3. 取り付け方法

手順：


1. AD6042 の表示器から LAN ケーブルを抜いてください。
2. AD6042 の表示器裏側から M4 ネジ 2 本を外して表示器を取り外してください。

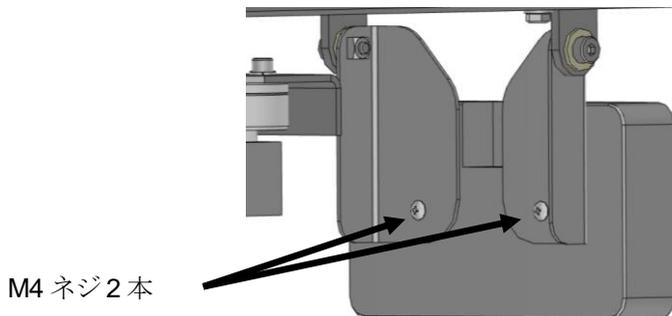


3. 付属の板金を挟んで、表示器を再び M4 のネジで取り付けてください

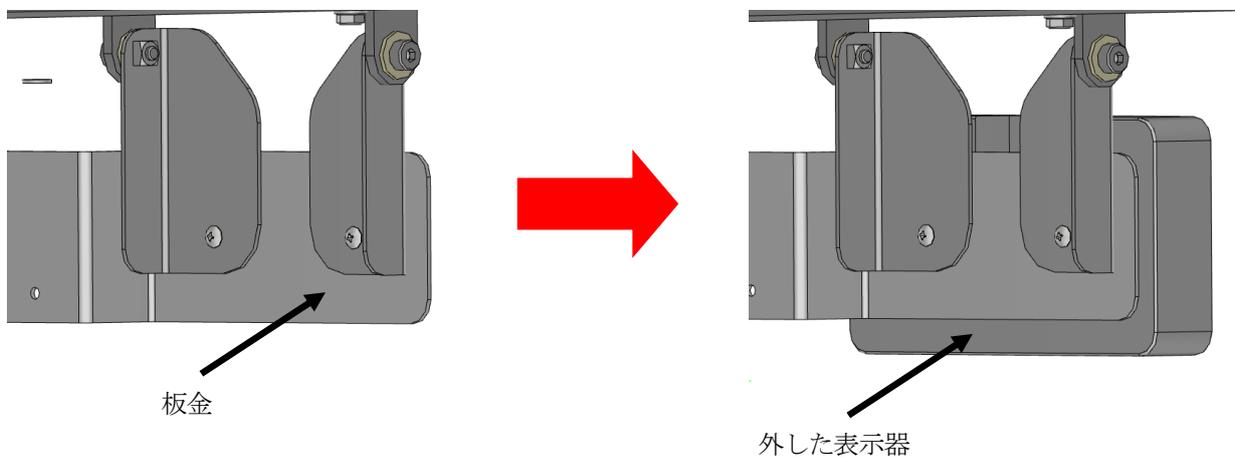

4. 壁の部分にプリンタ AD-PR580 を M3 ネジ 2 本で取り付けてください。正面から見ると下図のようになります。

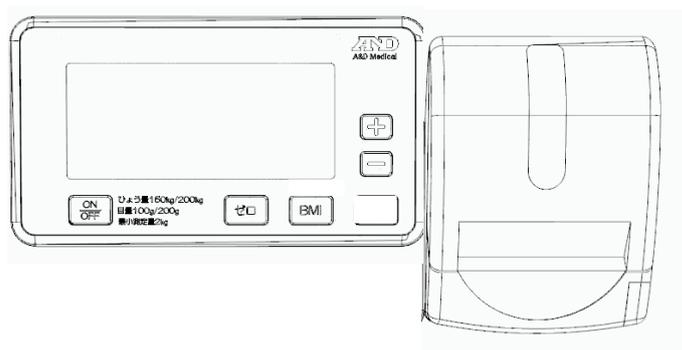


5. 付属の通信ケーブル 1K03937 をプリンタと表示器の通信コネクタに取り付けます。

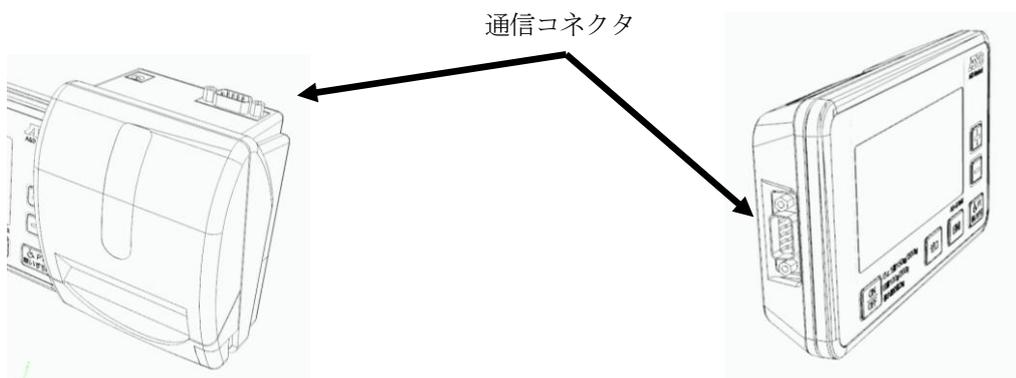

3.1. ACアダプタをお使いの場合

AD-PR580 付属のアダプタを、アダプタジャックにさしてお使いください。

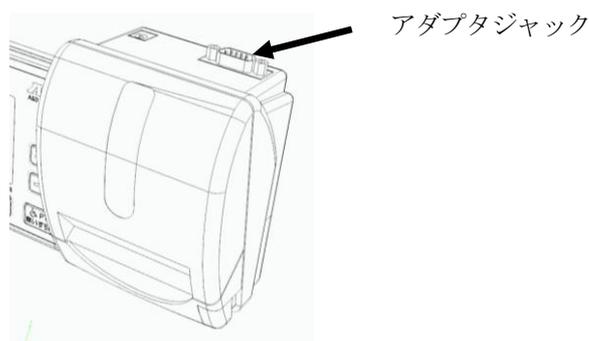

3.2. 乾電池で駆動させる場合

1. 乾電池で駆動させる場合は、本体背面に隠されている、延長ケーブルをアダプタジャックにさしてください。
2. 乾電池は当社推奨のニッケル水素充電電池 AS-BK-2MGC 6本をお使いください。

⚠ 注意



- 乾電池はニッケル水素タイプをお使いください。(当社推奨 AS-BK-2MGC) 一般的なアルカリ単二乾電池を使うと印字が薄くなります。