


ご使用前にご確認ください

- ✓ 電源ケーブルをコンセントから抜いてください。(※充電中はリフト動作いたしません。)
- ✓ バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
- ✓ 付属のリモコン操作で、リフトが上下することを確認してください。
- ✓ 非常停止ボタンを押すとリフト昇降が停止することを確認してください。
- ✓ ストレッチャーシートに、破れや縫い目の“ほつれ”などが無いことを確認してください。
- ✓ リフト動作範囲内に、突起物など引っかかる物が無いことを確認してください。
- ✓ 全てのLANケーブルの接続がされていることを確認してください。
- ✓ 表示器にプリンタ用の電源ケーブルを差し込まないでください。

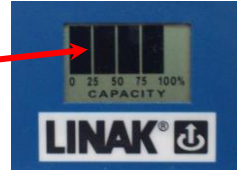

充電状態が確認できます。
4つの■で満充電です。



測定時は脚を開いてください



測定時



ペダルを踏んでハンドルを閉じ
“そくてい”位置にしてください。
脚が開いた状態になります。
※キャスターロックをする事！

移動時






キャスターロックを解除、
ペダルを踏んでハンドルを
操作し“いどう”位置にし
てください。
脚が閉じた状態になります。

※脚を開かずにリフト操作をすると転倒の恐れがあります。

※移動時はストレッチャーシートを畳んで所定の位置に確実に収納してください。

測定時の手順

1. 非常停止ボタンが解除されていることを確認してください。
2. 表示器の電源スイッチを“ON”にしてください。
3. 患者の身長に応じてシートを敷いてください。
4. ストレッチャーシートの4ヶ所の穴につり輪のフック部をひっかけます。
5. リモコンを上下させて患者をベッドから5~10cm浮かした状態まで上昇させます。
※ストレッチャーバーやシートに周囲のものが触れていないことを確認してください。
6. 測定後は、患者の状態を確認しながら、ゆっくりと下げてください。

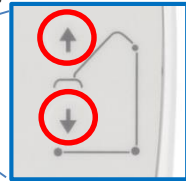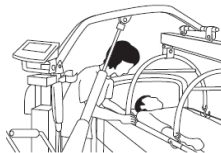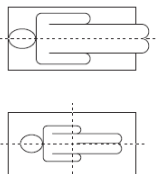

※連続ではかるときは18分以上間を空けてください。

SmartLift Scale 2

リフトが動かないとき、

スイッチを押したときランプが点灯して動かないときは、バッテリーの残量がわずかになっています。



図のように「にぎり」を回して患者を安全に降ろしすぐに充電してください。




非常停止について

緊急時は非常停止ボタンを押すとリフトの動作が停止します。




誤って押したときは、以下の方法で解除してください。

非常停止ボタンに記載されている矢印→の方向にボタンを回してください。（時計方向）

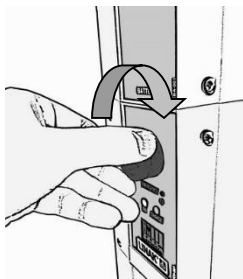

手を離すと非常停止ボタンが手前にて解除されます。

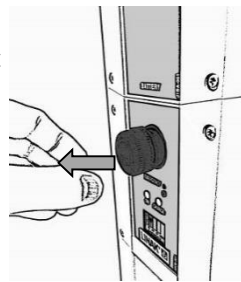

保管時の注意事項

1. 保管時は非常停止ボタンを押した状態にしてください。（バッテリーの消費が抑えられます。）
2. 脚をたたんで、人通りの少ない場所に保管してください。
3. 左右のリングフックを結合すると、小さく収納できます。
4. シーツ、ストレッチャーバーは所定の場所に収納し、フックで固定してください。転倒の恐れがあります。
5. 電源コードをコンセントに接続し、充電状態にしてください。コンセントに接続できない場所で保管される場合は、バッテリーを本体から外して保管いただき、必ず1ヶ月に1度は本体に取り付けて充電してください。（※バッテリーが完全放電すると交換が必要になります。）



ME 機器に関するお問い合わせ
エー・アンド・デイ ME 機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:00