


AD-6107R バリアフリースケール (手すり付) 取扱説明書 追加文書

このたびはエー・アンド・デイのバリアフリースケール (手すり付) AD-6107Rをお買い求めいただき誠にありがとうございます。取扱説明書に誤りがありましたため、正しい内容を記載いたします。ご確認ください。

10.2.3 2又通信ケーブル AX-K06653 の接続

オプションの専用2又接続ケーブルAX-K06653と接続ケーブル(AX-K03937又はAX-K01371-200)を組み合わせて以下のように接続すると、PCなどの機器と当社専用プリンタと同時に通信できます。ファンクションは以下の設定にして、チャンネル2を(PCなど)入力にしてください。

ファンクション	チャンネル1プリンタ	チャンネル2 PC など
F30-1	入力 ×	入力 ○
F31-2	出力 ○	出力 ○

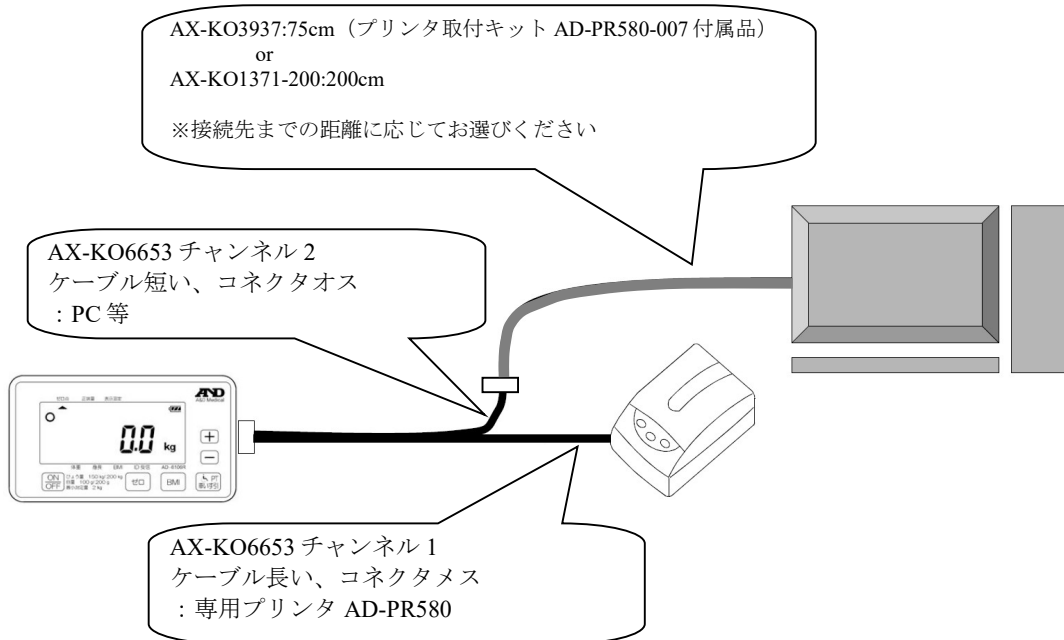

また、通信に関する設定はそれぞれのチャンネルごとに行えます。

チャンネル	ファンクション項目
チャンネル1	F05 ~ F11
チャンネル2	F15 ~ F21