


【セット内容】

本製品 AX-PA4003048 には以下のものが梱包されています。

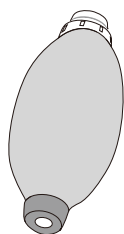

送気球



本紙

【送気球のお手入れについて】

送気球が加圧できない場合、中のフィルターにほこりが詰まっている可能性があります。半年に1回を目安に、送気球を取り外し、中のフィルターを清掃してください。

1. 送気球の取り外し

送気球の根元を持ち、反時計回りに回して外します。


2. キャップフィルターの清掃

柔らかめの歯ブラシ等を使用し、キャップフィルターのほこりを優しく払い落してください。

3. 送気球の取り付け

送気球を元の位置に取り付けます。送気球は根元を持ち時計回りに回して取り付けます。

※送気球が回らなくなるまで回してください。

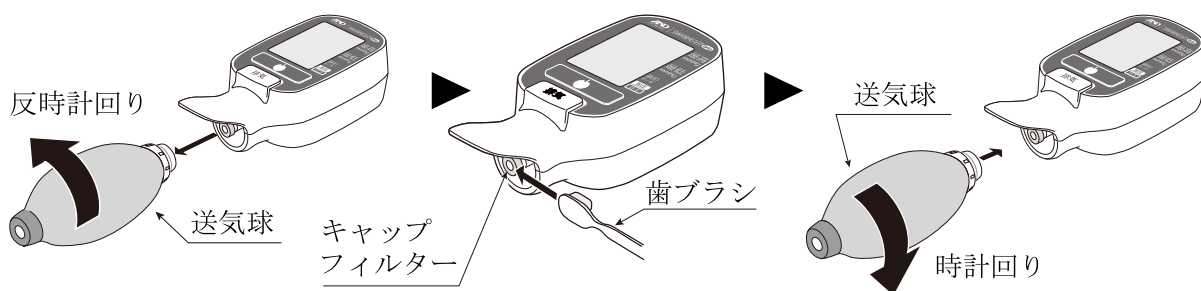

⚠ 注意

- 送気球を外す際は、根元を持って反時計まわりに回しながら外してください。
[根元を持たずに回した場合、送気球がよじれ、破損する可能性があります。]
- キャップフィルターの清掃には薬品は使用しないでください。
[キャップフィルターが詰まる可能性があります。]
- 消毒液を浸したガーゼ等で尻弁およびその付近をふき取らないでください。
[送気球の詰まりの原因となります。]

