

架台 TM-ST100B 取扱説明書

商品コード：TM-ST100B

取扱説明書および製品には、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐため、次の警告サインと図記号を表示しています。警告サインと図記号の意味は次の通りです。

警告サインの意味

 危険	この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示します。
 警告	この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の意味

	△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意事項（左図の場合は感電注意）が記されています。
	⊘記号はしてはいけないこと（禁止）を示しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「分解禁止」を示します。
	●記号は必ず守っていただきたいこと（強制）を示しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「守っていただきたいこと」を示します。

その他

お知らせ	機器を操作するのに役立つ情報です。
-------------	-------------------

この他にも、個別の注意事項がそれぞれのページに記載されていますので併せてご参照ください。

取扱上の注意

このたびは、弊社商品をお買い求めいただき誠に有り難うございます。本書は、使用方法ならびに注意事項について記述したものです。安全にご使用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。本書は大切に保管してください。

警告	
	<ul style="list-style-type: none">■ 本機器は、弊社製ME製品の架台です。指定製品以外に使用しないでください。 [使用中に製品が落下して事故の原因になります。]■ 本機器を改造したり他の用途に使用しないでください。[事故の原因になります。]

注意	
	<ul style="list-style-type: none">■ 使用前に本機器と指定の製品がツマミネジで確実に固定されていることを確認してください。 [使用中に製品が落下して事故の原因になります。]■ 電源プラグを抜き、製品のケーブル類が移動の際に引っかからないように収納した状態で本機器を移動してください。[本機器が転倒して事故の原因になります。]■ 本機器の収納、または使用中は本機器のキャスターロック（5箇所全て）を行なってください。 [本機器が意図せず移動して危険です。]

概要及び使用目的

架台 TM-ST100B は、弊社製ME 製品を載せるための架台です。


- リモートモニター TM-2126
- バイタルセンサ S TM-2590 シリーズ
- バイタルセンサ R TM-2591 シリーズ

梱包内容、製品の構成

ご使用前に下記の付属品がそろっていること、損傷がないことを確認してください。万一、不備がございましたらお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

本体 TM-ST100B 1 台

付属品 ケーブル処理用クランプ 2 個
ツマミネジ+抜け止めワッシャ 2 組(ポリ袋入)
取扱説明書(本書) 1 冊


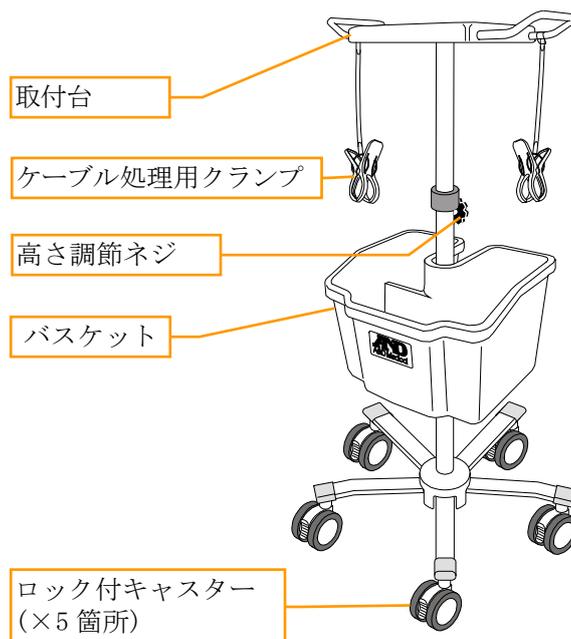


車輪の回転・旋回をロックします。

組み立て方法

1. 本機器の取付台に、ツマミネジ(2箇所)を差し込みます。ツマミネジの差し込み位置は右図のツマミネジの位置を参照してください。
 - リモートモニター (TM-2126)、バイタルセンサ S (TM-2590)、バイタルセンサ R (TM-2591) の場合、A の 2 箇所
2. 抜け止めワッシャでツマミネジをロックした後、製品をツマミネジで固定します。
3. 製品の取付け後、製品本体がガタついていないか確認を行なってください。

ツマミネジの位置

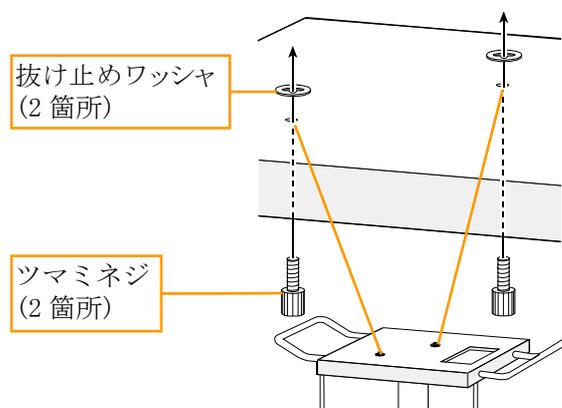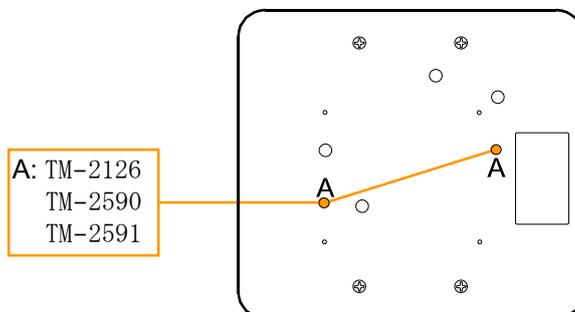

⚠ 注意



- 製品をツマミネジで固定する際は、ネジの緩みがないよう確実に締めてください。

清掃・消毒方法

清掃

- 清掃するとき、または血液、薬剤、汚物などが付着した場合は、水にうすめた中性洗剤を含ませた布、スポンジで汚れを拭き取った後、乾いた布で乾拭きしてください。
- 塩素系洗剤、シンナ、ベンジン、クレゾール等を使用しないでください。

消毒

- 消毒する時は、表(使用可能な消毒液(成分名)例)の消毒液を参照し消毒してください。

使用可能な消毒液(成分名)例

成分名	主な製品名
クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % ヒビテン液
	マスクイン液 (5 vw/v%)
ベンザルコニウム塩化物	オスバン消毒液 10 %
イソプロパール	70 % イソプロパール
エタノール	消毒用エタノール (76.9 - 81.4 vol%)

消毒液の使用にあたっては、各消毒液の添付文書(希釈濃度等)に従ってください。

点検

日常点検

本機器を正しくお使い頂くために、下記項目の日常点検を実施してください。(始業前の点検を推奨します。)

本機器に異常がみられましたら、ME 機器相談センターへお問い合わせください。

点検項目	実施内容	頻度
本体	変形、ヒビ割れ、劣化はないか。	始業前
	汚れはないか。	
キャスター	すべてのキャスターは正常に動作するか。	
	すべてのキャスターロックは、正常にロック/解除できるか。	
バスケット	最大積載量を超えるものを入れていないか。	
高さ調節ネジ	高さ調節ネジを緩めたり締めたりすることができるか。	
	取付台の高さを調節して固定できるか。	
	取付台の高さは適しているか。	
製品取付け	製品を取り付けたときにガタつきはないか。	

定期点検

本機器を安全に正しくお使いいただくために、定期点検を実施してください。(1年毎の定期点検を推奨します。)
本機器に異常がみられましたら、ME機器相談センターへお問い合わせください。

点検項目	実施内容	頻度
本体	変形、ヒビ割れ、劣化はないか。	1年毎
	汚れはないか。	
キャスター	すべてのキャスターは正常に動作するか。	
	すべてのキャスターロックは、正常にロック/解除できるか。	
	破損、汚れはないか。	
バスケット	最大積載量を超えるものを入れていないか。	
	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
高さ調節ネジ	高さ調節ネジは締めることができるか。	
	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
ツマミネジ、抜け止めワッシャ	破損、ヒビ割れ、汚れはないか。	
ケーブル処理用クランプ	破損、劣化はないか。	
製品取付け	製品を取り付けたときにガタつきはないか。	

仕様

材質

本体 : スチール製 粉体塗装仕上げ 一部メッキ仕上げ
バスケット : PP 白色
各種キャップ : PP 青色

寸法 : 500(W)×500(D)×700 ~ 1100(H) mm

質量 : 7.5 kg

安全動作荷重 : 5.0 kg

最大積載量

取付台 : 3.0 kg

バスケット : 2.0 kg

5% ヒビテン液は、住友ファーマ株式会社の商標または登録商標です。

マスキング液 (5 vw/v%)は、丸石製薬株式会社の商標または登録商標です。

オスバン消毒液 10%は、富士製薬工業株式会社の商標または登録商標です。

本書に記載されている商品名及び社名は日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

サービス

- 使用方法、故障などご不明な点はME機器相談センターへお問い合わせください。
- 本書に記載の意匠、仕様及び部品は性能向上のため、一部予告無く変更することがあります。

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ

住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

メディカル機器に関するご質問・ご相談・修理品 窓口

ME機器相談センター 0120-707-188

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00, 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

修理品の発送先

〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-19
株式会社エー・アンド・デイ FE部
TEL. 0572-21-6644