

## 携帯型自動血圧計 TM-244 取扱説明書 追記事項

このたびは、携帯型自動血圧計 TM2441 をお買い求めいただきまして誠に有難うございます。  
本製品に添付されております取扱説明書の内容に追加がございましたので、下記に示します内容を合わせてお読みいただけますようお願いいたします。

### 1. 環境データの保存について 取扱説明書 24 ページ 6.1. 自動血圧測定 (24 時間用)

環境データは、**AUTO** スイッチが「ON」の状態のときに保存されます。



#### ⚠ 注意



- 設定されております動作時間を過ぎても、**AUTO** スイッチが「ON」になっていれば環境データは継続して保存されます。
- 最大 12 日間の環境データが保存されますが、その場合は解析ターミナル TM-2486 でのデータ読込に約 20 分かかることがございます。

### 2. 開始時刻について 取扱説明書 47 ページ 8.3. 自動血圧測定の条件設定

開始時刻を設定して自動測定を開始 (**AUTO** スイッチを「ON」) しますと下記のような画面表示になります。

開始時刻の設定が現時刻より前だと翌日の設定時刻より自動測定が開始されます。



← 設定された開始時刻になるまで「— — —」表示となります。

#### ⚠ 注意



- 開始時刻を設定された場合、自動測定中に **AUTO** スイッチを「OFF」にして、再度「ON」に戻しますと、再度設定された開始時刻から自動測定が開始されます。

### 3. USB 通信不能時の対処方法 取扱説明書 80 ページ 9.5. 修理を依頼される前に

発生状況	主な原因	対処
通信できない 注 1	解析ターミナル TM-2486 と通信中に通信ケーブルを抜いてしまうと通信出来なくなることがあります。	通信ケーブルを取り外し、乾電池を装着し直して再起動させてください。
通信に時間が掛かる 注 1	長時間の環境データが保存されていることが考えられます。	通信が完了するまでお待ちください。(通信完了までに最大 20 分間かかる場合がございます。)

注 1 : 別売りの専用解析装置が必要です。

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 23 番 14 号  
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129

ME 機器に関するお問い合わせ  
エー・アンド・デイ ME 機器相談センター  
**0120-707-188**  
受付時間: 月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:00