

1. 筐体部の USB コネクタ側を手前にする



2. USB コネクタカバーを外し、コネクタ下部にある穴(下図赤枠内)にピンセット等を差し込み、部品 A を外す




3. 白色のプラグを引き抜き、赤枠 1 で囲ったねじをドライバーで外し、筐体部から USB コネクタ側の部品 B を取り外す
その後、ドライバーを使い赤枠 2 で囲ったねじを外す



4. 筐体スイッチ側を手前にし、筐体部裏側にある赤枠で囲ったねじをドライバーで外し、スイッチ側の部品 C を取り外す



5. 上ケースを取り外し、筐体の中身を下ケースから取り外す

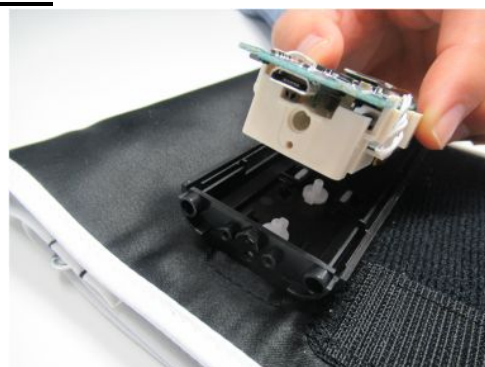

6. 充電電池のコネクタを下図のように 3 本まとめて持ち、引き抜くことで充電電池の取り外し完了



- ※スイッチを押しても本体が動作しなくなることを確認してから行ってください。
- ※取り外した電池の端子をショートさせないように注意してください。
- ※取り出した電池はネックレスやヘアピンなどの金属と一緒に持ち運ばないでください。