

※電池を完全に使い切り、スイッチを押しても本体が動作しなくなることを確認してから行ってください。
 ※取り外した電池はネックレスやヘアピンなどの金属と一緒に持ち運ばないでください。
 ※電池の端子をショートさせないように注意してください。

1. スイッチ側のカフをめくり、カフのねじをプラスドライバーで取り外す



2. カフを下に引き、カフ接続部を外す



3. カフを横に引き、カフを取り外す



4. USB カバーを引き抜く




5. 表示パネルの端とケースの隙間にマイナスドライバーを挿しこみ表示パネルのツメを外す




6. 大きめのマイナスドライバーをパネルに挿しこみ表示パネルを取り外す



※表示パネルは4箇所のツメと両面テープで固定されています(下図)

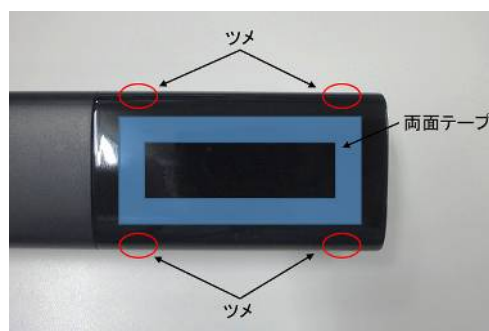


7. 上面のねじをプラスドライバーで取り外す

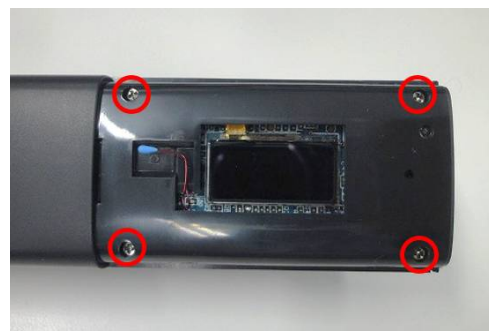



8. 裏面のねじをプラスドライバーで取り外す




9. 上ケースを取り外し、内部のねじをプラスドライバーで取り外す

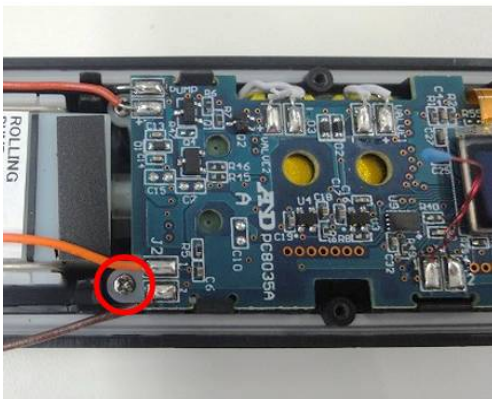

10. 基板を固定しているツメ(3箇所)を外し、基板を上を持ち上げる

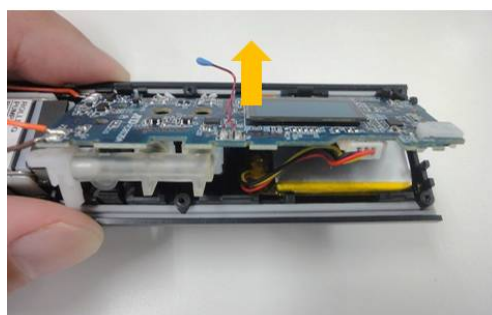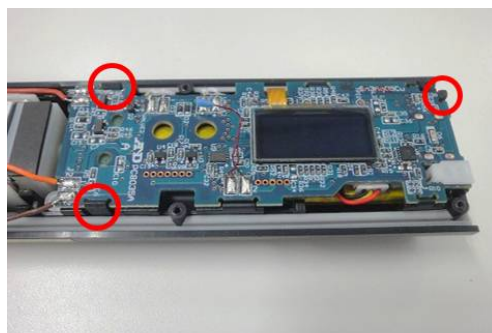

11. 充電電池のコンネクタを下図のように3本まとめて持ち、引き抜く

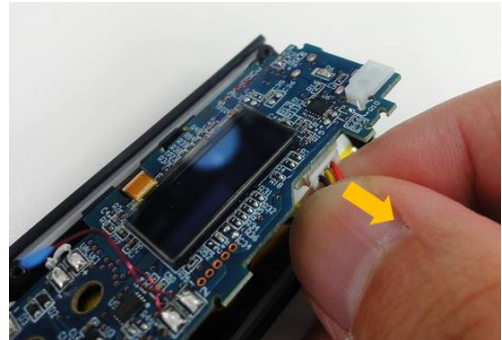

12. 充電電池をマイナスドライバーでゆっくり持ち上げ、充電電池の取り外し完了

