
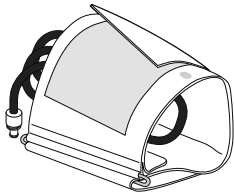
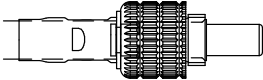



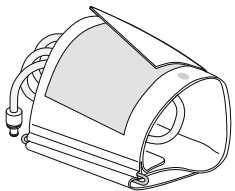
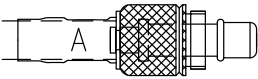

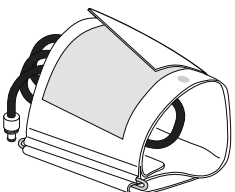
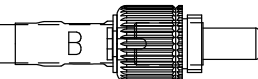
本体とカフの対応表

携帯型自動血圧計 TM-2441 シリーズは規制対応によりカフコネクタの形状を変更しております。
 本体とカフの組合せは下表をご確認ください。
 注意：組合せが異なる場合、加圧されない又は本体とカフが接合せず測定出来ないのでは、ご注意ください。

【現行仕様】

本体外観	本体シリアル番号	カフ外観	カフコネクタ	対応カフ型式 ^{※1}
	SN.2A6903816~	 ホース色：紺色		TM-CF202D TM-CF302D TM-CF402D TM-CF502D TM-CF802D

【旧式仕様】

本体外観	本体シリアル番号	カフ外観	カフコネクタ	対応カフ型式 ^{※1}
	~SN.2A6902760	 ホース色：灰色		TM-CF202A TM-CF302A TM-CF402A TM-CF502A TM-CF802A
	SN.2A6903011 ~ SN.2A6903765	 ホース色：紺色		TM-CF202B TM-CF302B TM-CF402B TM-CF502B TM-CF802B

※1 カフ型式は以下のラベル内に記されています。

