

全自動血圧計TM-2657P/TM-2657VP スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」スタートアップガイド 血圧計から印刷したQRコードのデータをアプリに取込む方法



1. 【血圧計の設定】

測定した血圧値をQR印字するよう設定する
TM-2657P, TM-2657VP：プリンタ搭載機器

①「▲」スイッチと「選択」スイッチ
を押しながら電源を入れる

[▲]スイッチ
[選択]スイッチ



②「選択」スイッチでF29へ変更

③「▲」スイッチで4へ変更

④電源を切る



認証番号226AHBZX00016000

【血圧計表示部設定数値】

最高血圧表示部

F29


最低血圧表示部

4

2. 【スマホアプリのインストール】

「A&D Connect Smart」をインストール

iPhoneならばApp Storeから、AndroidならばGoogle Playから
アプリ名で検索するか以下のQRをカメラで読み取りアプリを
スマートフォンにインストールしてください（無料です）

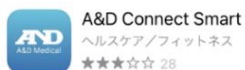

(iPhone) App Store



(Android) Google Play



4. 【スマホアプリ「A&D Connect Smart」の操作】

①アプリを起動します
上のアイコンをクリック



②特に設定は必要ありません
「ログインせずに使用する」を
選択してください



③A&D Connect Smart
初期設定画面



④メニュー選択で
ダッシュボード選択



⑤ダッシュボード画面
QRコードアイコン選択



⑥起動したカメラで
QRコードを読み取り



⑦データ取込みの完了
データが読みこまれる
とダッシュボードに
データが表示されます

3. 【血圧の測定】

①血圧を測定します（詳しくは取扱い説明書を参照ください）



[スタート/ストップ] スイッチ



測定結果

最高血圧 138
最低血圧 74
脈拍数 76

プリント



印字結果



②測定終了後プリントにQRコードが印字されて
いることを確認します

グラフ表示の仕方



①ダッシュボードの
データをタップ



②グラフ表示にかわります